

## Base de transferencia Wave



La ingeniosa **Base de transferencia** para la **silla de ducha Wave** es ideal para usuarios grandes, facilitando así tanto su transferencia como su limpieza por parte del cuidador. Se puede utilizar en bañeras de hasta 60,5 cm de alto.

Esta Base es **plegable y fácil de mover**, y se puede colgar en la pared en el **gancho** que se facilita al comprarla.

**Importante:** al comprar la Base tenga en cuenta si debe girarla en dirección a las agujas del reloj o en dirección contraria.

### Uso:

- Colocar dos patas de la Base dentro de la bañera y dos fuera, pero en la posición más alejada posible de la bañera.
- Colocar al usuario en la silla de ducha Wave y desplazar la Base hacia dentro de la bañera.
- Frenarla.
- Girar lentamente la silla de ducha 90°, levantando las piernas del usuario al pasar por el borde de la bañera.

## Modelos y tallas

- RI-Z227 Wave - Base de transferencia (gira en dirección contraria agujas del reloj / Se recomienda Wave con reposapiernas / Obligatorio Patas para Base de transferencia)
- RI-Z228 Wave - Base de transferencia (gira en dirección agujas del reloj / Se recomienda Wave con reposapiernas / Obligatorio Patas para Base de transferencia)
- RI-Z224 Wave - Patas para Base de transferencia estándar (mínimo 39 cm - máximo 50 cm)
- RI-Z238 Wave - Patas para Base de transferencia largas (mínimo 51 cm - máximo 61 cm)
- RI-Z265 Wave - Patas para Base de transferencia combinadas