

Base de transferència Wave



La enginyosa **Base de transferència** per la **cadira de dutxa Wave** és ideal per a usuaris grans, facilitant així tant la seva transferència com la seva neteja per part del cuidador. Es pot utilitzar en banyeres de fins a 60,5 cm d'alt.

Aquesta Base és **plegable i fàcil de moure**, i es pot penjar a la paret en el **ganxo** que es facilita al comprar-la.

Important: en comprar la Base tingui en compte si ha de girar en direcció a les agulles del rellotge o en direcció contrària.

Ús:

- Col·locar dues potes de la Base dins de la banyera i dues fora, però en la posició més allunyada possible de la banyera.
- Posar a l'usuari a la cadira de dutxa Wave i desplaçar la Base cap a dins de la banyera.
- Frenar-la.
- Girar lentament la cadira de dutxa 90°, aixecant les cames de l'usuari en passar per la vora de la banyera.

Models i talles

- RI-Z227 Wave - Base de transferència (gira en direcció contrària agulles del rellotge / Es recomana Wave amb reposa cames / Obligatori Potes per Base de transferència)
- RI-Z228 Wave - Base de transferència (gira en direcció agulles del rellotge / Es recomana Wave amb reposa cames / Obligatori Potes per Base de transferència)
- RI-Z224 Wave - Potes per Base de transferència estàndard (mínim 39 cm - màxim 50 cm)
- RI-Z238 Wave - Potes per Base de transferència llargues (mínim 51 cm - màxim 61 cm)
- RI-Z265 Wave - Potes per Base de transferència combinades