

## Posicionador de cadera Pacer



El posicionador de cadera se balancea con el movimiento de deambulaci3n del paciente permitiendo al usuario cambiar el peso de una pierna a la otra.

El posicionador de cadera se vende con un par de empuñaduras.

Los anillos en la correa posterior del posicionador de la cadera se acoplan en las empuñaduras, esto permite asegurar r3pidamente al paciente despu3s de una transferencia.

Para mantener la pelvis en la l3nea media del usuario, y por detr3s de los hombros puede fijar las correas anteriores m3s atrasadas en el marco de Pacer.

Puede bajar las empuñaduras y alargar las correas para usar el posicionador de cadera como eslinga de seguridad.

Puede levantar las empuñaduras y acortar las correas para distribuir el peso y conseguir una marcha parcial.

Dispone de un pad posicionador de cadera, que se desliza sobre el posicionador para dar m3s comodidad, gracias a que es muy acolchado.

## Medidas

### Dimensiones sin pad:

Longitud de entrepierna: 6 cm.

Anchura: 3 cm.  
Longitud: 23 cm.

## **Modelos y tallas**

- K513            Posicionador de cadera - Talla única
- K541            Pad posicionador de cadera - Talla única