

Posicionador de cadera Pacer











El posicionador de cadera se balancea con el movimiento de deambulación del paciente permitiendo al usuario cambiar el peso de una pierna a la otra.

El posicionador de cadera se vende con un par de empuñaduras.

Los anillos en la correa posterior del posicionador de la cadera se acoplan en las empuñaduras, esto permite asegurar rápidamente al paciente después de una transferencia.

Para mantener la pelvis en la línea media del usuario, y por detrás de los hombros puede fijar las correas anteriores más atrasadas en el marco de Pacer.

Puede bajar las empuñaduras y alargar las correas para usar el posicionador de cadera como eslinga de seguridad.

Puede levantar las empuñaduras y acortar las correas para distribuir el peso y conseguir una marcha parcial.

Dispone de un pad posicionador de cadera, que se desliza sobre el posicionador para dar más comodidad, gracias a que es muy acolchado.

Medidas

Dimensiones sin pad:

Longitud de entrepierna: 6 cm.

Anchura: 3 cm. Longitud: 23 cm.

Modelos y tallas

• K513 Posicionador de cadera - Talla única

• K541 Pad posicionador de cadera - Talla única