

MADITA-Fun

La silla terapéutica moderna e integradora



Instrucciones de uso



Querido cliente,

Le queremos dar las gracias por su confianza en nuestra empresa y por comprar nuestro producto.

Le rogamos lea las instrucciones de uso detenidamente antes de utilizar por primera vez el producto. Tenga en cuenta que las pautas e imágenes de estas instrucciones pueden desviarse de su producto debido a que tenga un equipamiento diferente.

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas.

¡Información importante!

Asegúrese que estas instrucciones de uso permanecen con el producto.

Su equipo Schuchmann

Contenido	Página
1. Preparación de la silla terapéutica para su uso	
1.1 Transporte.....	2
1.2 Medidas de seguridad antes de su uso.....	2
1.3 Desecho seguro del material de embalaje.....	2
1.4 Localización de las instrucciones.....	2
2. Descripción de producto	
2.1 Información sobre el material.....	3
2.2 Zonas de aplicación, uso de acuerdo con su finalidad.....	3
2.3 Uso no de acuerdo con la finalidad prevista/pautas de advertencia.....	3
2.4 Equipamiento del modelo básico.....	4
2.5 Lista de accesorios.....	4
2.6 Visión general del producto.....	4
3. Ajustes	
3.1 Altura de asiento.....	5
3.2 Ángulo de asiento.....	5
3.3 Profundidad de asiento.....	5
3.4 Inclinación del respaldo.....	6
3.5 Altura del respaldo.....	6
3.6 Reposabrazos.....	6
3.7 Placa del reposapiés/reposapiés.....	7
3.8 Ruedecillas.....	8
4. Accesorios	
4.1 Reposacabezas.....	8
4.2 Respaldo extraíble.....	8
4.3 Soportes de tronco.....	9
4.4 Soportes laterales de tronco abatibles.....	9
4.5 Soportes laterales de cadera.....	9
4.6 Guías abductoras.....	10
4.7 Guía pélvica ajustable.....	10
4.8 Mesa terapéutica.....	11
4.9 Apoyo de rodillas.....	11
4.10 Extensión de base con ruedas.....	11
5. Reparaciones y limpieza	
5.1 Limpieza.....	11
5.2 Reparaciones.....	11
5.3 Recambios.....	11
6. Datos técnicos	12
7. Garantía	12
8. Identificación	
8.1 Declaración de conformidad CE.....	13
8.2 Número de serie / fecha de fabricación.....	14
8.3 Versión del producto.....	14
8.4 Expedición del documento.....	14
8.5 Nombre y dirección del fabricante, el distribuidor especialista que suministra el producto.....	14

1. Preparación de la silla terapéutica para su uso

1.1 Transporte

Cuando reciba el producto, compruebe que esté completo, que no hay defectos y que no haya daños debido al transporte.

Inspeccione la mercancía en presencia del transportista

Si ha habido algún daño a causa del transporte, haga una incidencia (especificando los daños) en presencia del transportista. Rogamos envíen la queja por escrito al distribuidor especializado responsable.

1.2 Medidas de seguridad antes de su uso

El uso correcto de la silla terapéutica requiere de una formación precisa y cuidadosa por parte de la persona acompañante. Rogamos lea las instrucciones de uso atentamente antes del uso del producto.

1.3 Desecho seguro del material de embalaje

El producto de embalaje debe ser guardado en caso que necesite ser transportado otra vez. Si debe devolver el producto para reparación o garantía, utilice si es posible la caja original para que el producto esté bien empaquetado.

Si no, rogamos deseche el material de embalaje de una forma profesional para promover el reciclaje de los recursos. Por esta razón, separe el material de embalaje de acuerdo a la clasificación de reciclaje. No deje el material de embalaje desatendido, ya que es una posible fuente de peligro.

1.4 Localización de las instrucciones

Asegúrese que estas instrucciones de uso permanecen con el producto. Encontrará copias adicionales en www.rehagirona.com.

2. Descripción del producto

2.1 Información del material

La base del chasis y los elementos individuales son de acero y aluminio, no corrosivos y pulverizados. Las fundas son 100% poliéster.

2.2 Zonas de aplicación, uso de acuerdo a su finalidad

La silla terapéutica MADITA-Fun ha sido diseñada para niños y adolescentes que no son capaces de sentarse o ponerse de pie independientemente, pero cuya postura limitada de tronco significa que no tienen que estar constantemente sentados en un asiento.

2.3 Uso no de acuerdo con la finalidad prevista / pautas de advertencia



¡ADVERTENCIA!

- Asegúrese que la silla terapéutica es utilizada solo por un niño/adolescente.
- Utilice la silla terapéutica solo en superficies planas y solidas.
- No utilice la silla terapéutica para transportar personas.
- Para garantizar un levantamiento seguro cuando transporte la silla terapéutica, colóquese al lado de la silla terapéutica y coja la parte delantera y trasera del asiento. En este momento todas las partes móviles deben estar bien fijadas, como por ejemplo el ajuste del asiento en profundidad.
- Nunca deje al niño desatendido mientras está en la silla terapéutica.
- Un correcto uso la silla terapéutica requiere de formación precisa y cuidadosa por parte de la persona acompañante.
- La carga máxima (ver punto 6) no puede ser excedida.
- No utilice la silla terapéutica con partes defectuosas, desgastados o faltantes.
- Por razones de seguridad contra incendios, la silla terapéutica no debe situarse cerca de fuego u otras fuentes de calor como estufas eléctricas o de gas.
- Utilice solo los accesorios y recambios fabricados por Schuchmann, en caso contrario pondrá el niño en peligro.
- Utilice solo la silla terapéutica si todos sus componentes han sido montados y ajustados correctamente.

2.4 Equipamiento del modelo básico

- Inc. reposabrazos, placa de reposapiés, empuñadura, acolchado de asiento estándar con funda
- La altura del asiento puede ser ajustada mediante el pistón de gas (1200N)
- 4 ruedas (75 mm), 2 de ellas con sistema de bloqueo
- Posibilidades de ajuste: ángulo de asiento (mediante pistón de gas 500N), ángulo de respaldo, anchura y profundidad de asiento, altura del ángulo y anchura ajustable de los reposabrazos, respaldo ajustable en altura

2.5 Lista de accesorios

- Reposacabezas
- Respaldo extraíble
- Soportes laterales de tronco (también abatibles)
- Soportes laterales de cadera
- Guía pélvica ajustable
- Mesa terapéutica
- Apoyo de rodillas
- Extensión base con ruedas
- Kit de hebillas para fijación de cinturones en el asiento
- Kit de hebillas para fijación de cinturones en el respaldo
- Tapizado asiento impermeable
- Fijaciones

2.6 Visión general del producto

La imagen de abajo le muestra la designación de los componentes más importantes y también los términos que se utilizan y encontrará en estas instrucciones de uso.




3. Ajustes

3.1 Altura del asiento

La altura del asiento se ajusta mediante un pistón de gas. Con el fin de ajustar la altura del asiento hacia arriba, se debe accionar el pedal (A) en la base del chasis. Pulsando ligeramente, la unidad del asiento se desliza hacia arriba. La bajada se consigue mediante presión desde arriba y sobre el asiento, utilizando al mismo tiempo el pedal. El pistón de gas sirve simplemente para ayudar en el ajuste de la altura.

El pedal puede ser asegurado contra una activación involuntaria con el resorte (B) (situado en el interior del pedal). Para ello, gire el resorte hasta que encaje.

Si es necesario, ayude al bloqueo moviendo el pedal suavemente. El bloqueo se cancela tirando del resorte y girándolo un cuarto de vuelta.

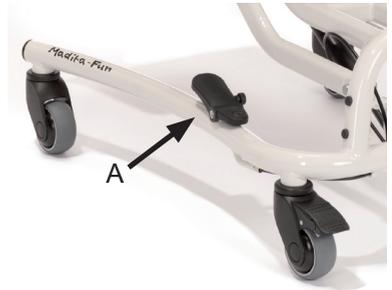

Asegúrese que durante la fijación/ajuste de la altura del asiento, ninguna parte del cuerpo (los pies) se quedan atrapados en la zona del mecanismo de fijación / ajuste (entre el suelo y el reposapiés de la silla terapéutica) con el fin de evitar lesiones


3.2 Ángulo de asiento

Con el fin de ajustar el ángulo de la unidad de asiento, se debe accionar (tirando de él) la palanca manual (C) en la parte posterior y debajo del soporte de asiento. La unidad de asiento ahora se puede ajustar en una posición activa o pasiva.



3.3 Profundidad de asiento

Después de aflojar los cuatro tornillos de debajo de la silla con una llave hexagonal, la superficie del asiento se puede mover de forma continua hacia delante o hacia atrás.

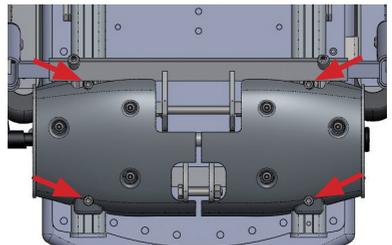

¡Después de cada ajuste, rogamos vuelva a apretar todos los tornillos!

3.4 Inclínación del respaldo

El respaldo se puede ajustar al ángulo correcto después de aflojar la palanca de sujeción (D) situado en el lado derecho del asiento.



Asegúrese que durante la fijación/ajuste de la inclinación del respaldo, ninguna parte del cuerpo queden atrapados en la zona del mecanismo de fijación / ajuste con el fin de evitar lesiones.



3.5 Altura del respaldo

Afloje el tornillo (E) con la llave hexagonal (M8) de la parte trasera y coloque el respaldo a la altura deseada.




3.6 Reposabrazos

Los reposabrazos se pueden ajustar en ángulo, altura y anchura.

Para ajustar el ángulo, afloje la perilla de estrella (F). La altura se puede ajustar aflojando el tornillo de estrella (G).



La anchura se ajusta aflojando los dos tornillos de presión (H), que se encuentran en la parte inferior de la unidad de asiento.

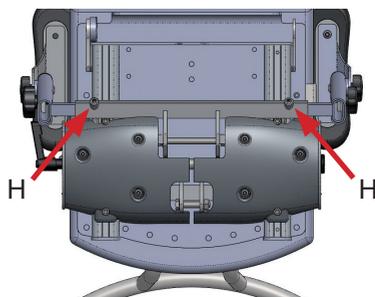


¡Después de cada ajuste, rogamos vuelva a apretar todos los tornillos!

3.7 Placa del reposapiés / reposapiés

Afloje la palanca de fijación (I) situada debajo del asiento y coloque la placa del reposapiés en la posición deseada. Utilizando la articulación de trinquete, la posición se puede ajustar en pequeños pasos.



El reposapiés se puede ajustar individualmente. Para ello, afloje la palanca de sujeción (J) de debajo del asiento y coloque los reposapiés en la posición deseada. Usando las dos articulaciones dentadas, las posiciones se pueden ajustar en pequeños pasos.

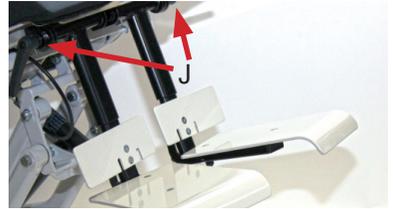


El ángulo del pie se puede ir ajustando tanto en la placa del reposapiés como en los dos reposapiés. Para ello, atornille los tornillos hexagonales (K) para dentro o para fuera.



¡Apriete las tuercas después de cada ajuste del ángulo de pie!

La altura del reposapiés se puede ir ajustando continuamente, tanto en la placa del reposapiés como en los dos reposapiés. Para hacer esto, por favor afloje los 2 tornillos (L) y coloque la placa del reposapiés / reposapiés en la posición deseada.

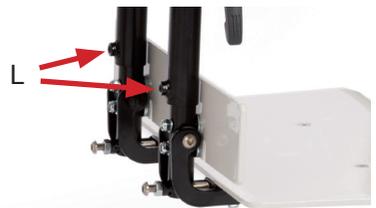

¡Después de cada ajuste, por favor, vuelva a apretar la palanca de fijación!

3.8 Ruedas

Mediante el freno de las 2 ruedas trasera, se impide que la silla terapéutica ruede inadvertidamente. Para ello, presione el freno (M) hacia abajo con la punta del pie.



El freno sirve meramente para evitar que ruede inadvertidamente en superficies planas.

4. Accesorios

4.1 Reposacabezas

El reposacabezas se puede ajustar en altura, profundidad y ángulo. Para hacer esto, debe aflojar los 2 tornillos con una llave hexagonal, y coloque el reposacabezas en la posición deseada.



4.2 Respaldo extraíble

Se manipula el respaldo extraíble por la parte posterior de la silla terapéutica. Para ello, afloje un poco los pomos (N) y extraiga el respaldo.



La función del respaldo extraíble se puede integrar en un plan terapéutico. También se utiliza en períodos cortos de tiempo, ya que el respaldo, incluyendo el reposacabezas, se puede volver a montar rápidamente, y proporciona al niño un posicionamiento y un soporte cuando están cansados.



¡Después de cada ajuste, por favor, vuelva a apretar todos los tornillos!

4.3 Soportes de tronco


Los soportes de tronco son ajustables individualmente en altura y anchura. Para hacer esto, por favor afloje los 2 tornillos (O) con una llave hexagonal y coloque los soportes de tronco en la posición deseada.



4.4 Soportes de tronco abatibles

Los soportes de tronco abatibles se pueden plegar a los lados para facilitar la colocación del niño.

Para hacer esto, debe presionar el botón rojo (P) situado en el lado del soporte de tronco sobre la articulación, y gire el soporte de tronco hacia un lado.

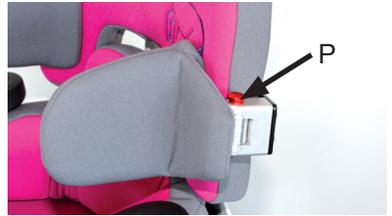


¡Cuando se despliegue otra vez, asegúrese de que el soporte de tronco se acopla!

4.5 Soportes laterales de cadera

Los soportes laterales de cadera son ajustables individualmente en altura y profundidad.

Para ajustar la profundidad, afloje las tuercas (Q) de debajo del asiento y coloque el soporte lateral de cadera en la posición requerida.

El ajuste de profundidad es posible en cualquier soporte lateral de cadera, excepto en la versión estándar de talla 0 con guías pélvicas ajustables. Para ajustar la profundidad, debe abrir las cremalleras (R), aflojar los 3 tornillos (S) con una llave hexagonal y poner los soportes en la posición deseada.



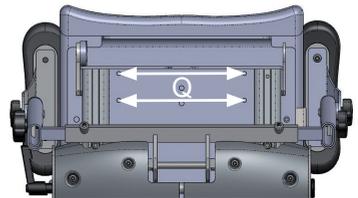


¡Después de cada ajuste, por favor, vuelva a apretar todos los tornillos!

4.6 Guías abductoras

Las guías abductoras permiten la abducción médicamente necesaria de los muslos y la compensación de la diferencia en la profundidad de asiento.

Con el fin de ajustar las guías abductoras, rogamos afloje las tuercas (T) de debajo del asiento, y coloque las guías abductoras en la posición deseada.

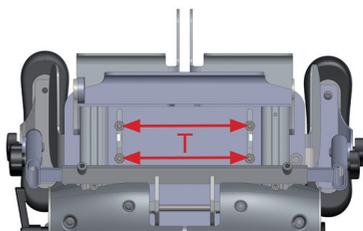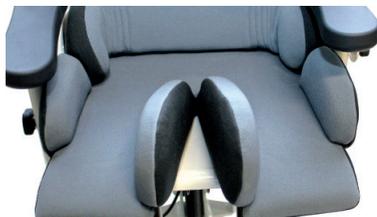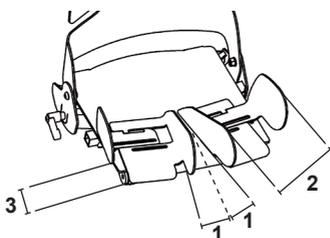

Puede ajustar fácilmente el ángulo de abducción (1), la anchura del muslo (2) y también la compensación de longitud de la pierna o la diferencia en profundidad del asiento (3) a través de los agujeros ranurados, mientras el niño está sentado en la silla terapéutica.


4.7 Guía pélvica ajustable

La guía pélvica ajustable se puede ajustar en anchura y proporciona al niño un alto nivel de seguridad y posicionamiento de la pelvis.

Primero afloje el tornillo de la parte posterior de la silla terapéutica en el borde inferior de la funda (U), luego empuje la parte delantera del acolchado ligeramente hacia abajo y afloje el tornillo hexagonal (V).

Ahora, coloque al niño en la silla y ajuste la guía pélvica en la posición deseada. Primero apriete el tornillo (U) y luego retire el niño.

Ahora sólo tiene que apretar el tornillo hexagonal (V) y luego puede colocar de nuevo al niño en la silla.

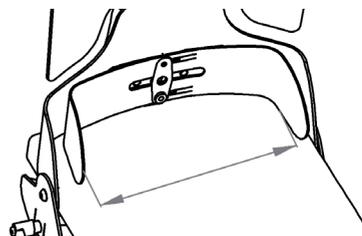

¡Después de cada ajuste, por favor, vuelva a apretar todos los tornillos!

4.8 Mesa terapéutica

La mesa terapéutica se puede ajustar en altura y profundidad. Se puede ajustar la altura mediante el ajuste de los reposabrazos (véase el punto 3.6). Para ajustar la profundidad, afloje el tornillo de mariposa (W) y coloque la mesa terapéutica en la posición deseada.

Cuando quiera plegar la mesa terapéutica a un lado, por ejemplo para cuando el niño entra o sale, afloje los tornillos de mariposa (W + X), gire la mesa hacia arriba y guíelo hacia el lado de la silla terapéutica.



4.9 Apoyo de rodillas

El apoyo de rodillas se debe montar en la parte frontal de la placa de asiento mediante un eje flotante. Para hacer esto, por favor presione el botón del eje flotante, y la parte de abducción podrá ser fácilmente eliminado o insertado. Al introducir el taco abductor, oírás un "clic".

4.10 Extensión de base con ruedas

¡La extensión de base con ruedas no puede ser ajustada! Se utiliza puramente para mantener el producto estable, en particular con placas de asiento largos y ángulos de asiento extremadamente inclinados.



¡Después de cada ajuste, por favor, vuelva a apretar todos los tornillos!

5. Reparaciones y limpieza

5.1 Limpieza

Limpie todos los elementos del chasis con una esponja o paño húmedo. Los acolchados se pueden quitar y lavar a 30 ° en la lavadora. Por favor, no ponga las fundas en la secadora, y, en general, no utilice productos de limpieza agresivos o productos similares.


5.2 Reparaciones

Rogamos lleve a cabo una inspección visual diariamente y revise la silla terapéutica con regularidad para comprobar que no haya grietas, roturas, partes faltantes o un mal funcionamiento. En caso de defecto o mal funcionamiento, por favor póngase en contacto con el distribuidor especialista que le suministró el producto (véase el punto 8.5).

5.3 Recambios

Si desea pedir recambios, por favor póngase en contacto con el distribuidor especialista que le suministró el producto, indicando el número de serie de la silla terapéutica (véase el punto 8.5).

6. Datos técnicos

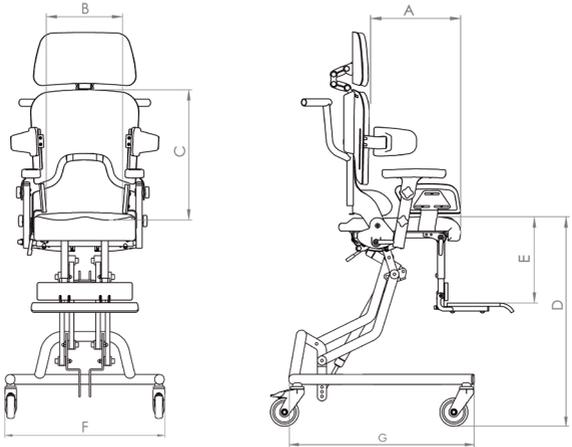Dimensiones - Modelo básico				
				
		Madita-Fun Talla 0	Madita-Fun Talla 1	Madita-Fun Talla 2
A	Profundidad de asiento	15 - 25 cm	21 - 30 cm	30 - 42 cm
B	Ancho de asiento	16 - 26 cm	20 - 30 cm	28 - 38 cm
C	Altura de respaldo corto	32 - 37 cm	32 - 37 cm	42 - 52 cm
C	Altura de respaldo largo	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 - 63 cm
D	Altura asiento-suelo	25 - 62 cm	25 - 62 cm	25 - 62 cm
E	Longitud rodilla/pie	18 - 24 cm	22 - 32 cm	30 - 48 cm
F	Ancho total	56 cm	56 cm	66 cm
G	Largo total	65 cm	65 cm	75 cm
	Regulación ángulo asiento	(-)8° - 30°	(-)8° - 30°	(-)8° - 30°
	Regulación ángulo respaldo	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
	Peso	19 kg	20 kg	24 kg
	Carga máxima	30 kg	30 kg	50 kg

7. Garantía

El periodo legal de garantía de dos años se aplicará para todos los productos. Este período de garantía se iniciará al envío o entrega de la mercancía. En caso de que un material tenga un defecto verificable o de fabricación y se produzca dentro de este plazo, deberá devolvernos el producto a portes pagados, después nosotros comprobaremos el daño indicado, y pasaremos a reparar o enviar el producto, bajo nuestro criterio.

8. Identificación

8.1 Declaración de conformidad EC

Schuchmann GmbH & Co.KG

Dütestr. 3

D-49205 Hasbergen

Tel.: +49 (0)54 05 / 909 - 0

Fax: +49 (0)54 05 / 909 - 109



declara, bajo su única responsabilidad que el producto nombrado a continuación está clasificado como un producto de clase 1

"MADITA-FUN" - la silla terapéutica moderna e integradora

Art. No.: 74 00 000 (Talla 0)

74 01 000 (Talla 1)

74 02 000 (Talla 2)

Las normas de los reglamentos y directrices que figuran a continuación de acuerdo con:

- EC Directiva 93/42/EEC productos sanitarios del 14 de Junio del 1993
- DIN EN 12182 Ayudas técnicas para discapacitados
- EN ISO 14971 Productos sanitarios - Aplicación de la gestión de riesgos en los productos médicos

Esta declaración de conformidad se aplica sólo para los productos con los números de artículo mencionados anteriormente.

Fecha 26.03.2012

Firma 

Nombre Torsten Schuchmann

Función Representante de la seguridad de productos sanitarios

