




RehaGirona, sl  
Trens Petits 1  
Pol. Ind. Mas Xirgu  
17005 Girona

T +34 902 48 72 72  
F +34 972 40 50 54  
www.rehagirona.com  
rehagirona@rehagirona.com

# REHA TOM 4X COUNTRY REHA TOM 4X COUNTRY MINI REHA TOM 4X COUNTRY MAXI

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

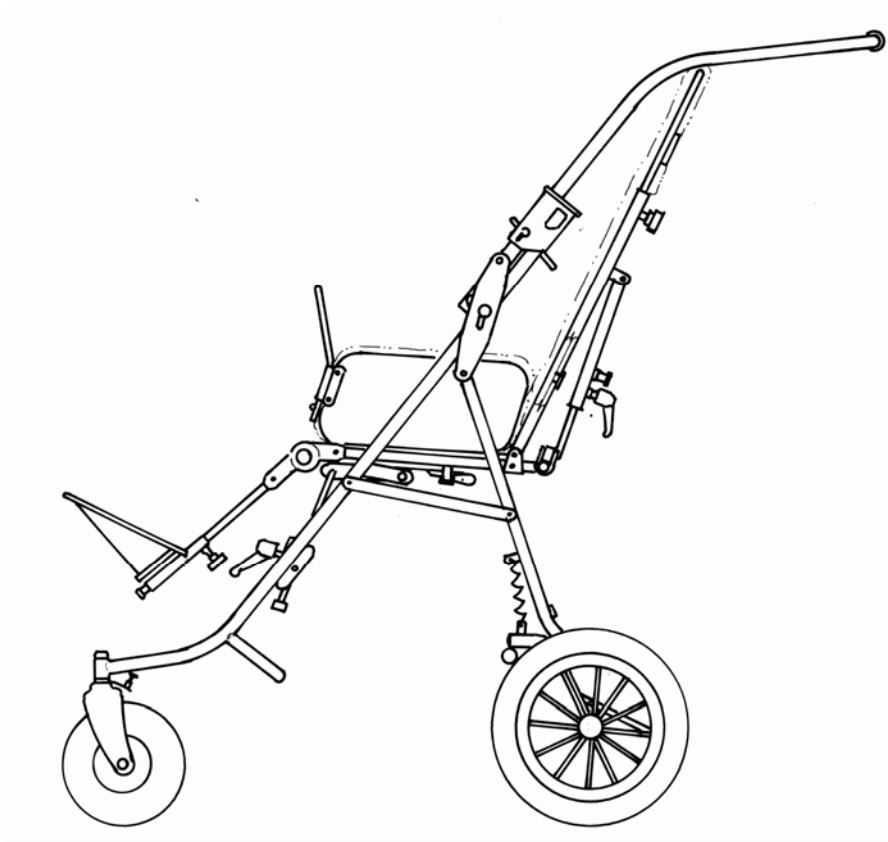



## 1. GENERALIDADES

### Información importante


- Lea con atención las instrucciones antes de utilizar el cochecito.
- Guarde las instrucciones de uso para futuras consultas.

### Nota

- Asegúrese, antes de usar el cochecito, que la parte trasera del respaldo esta firmemente fijada.
- Antes de poner el niño en el cochecito, asegurarse de que no lleve ningún tipo de ropa o manta que pueda cogerse a las ruedas
- Nunca usar la silla del cochecito en ningún tipo de vehículo motor.
- Usar siempre los frenos del cochecito cuando éste esté estacionado y al poner y sacar el niño.
- No deje nunca a su hijo sin vigilancia.
- Asegurarse que el niño está en la posición adecuada antes de hacer los ajustes correspondientes.
- Asegúrese de que el niño siempre lleve puesto correctamente el cinturón de seguridad.
- No sobrecargar el cochecito en peso o con otros accesorios que no sean los propios.
- No permanecer nunca de pie en el reposapiés.

## 2. ESQUEMA GENERAL. COMPONENTES BASICOS.

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 Cierre de plegado                       | 7 Botón de seguridad             |
| 2 Mecanismo de seguridad del cierre       | 8 Ajuste ángulo del reposapiés   |
| 3 Botón ajuste empuñadura (mini/Standard) | 9 Ajuste altura del reposapiés   |
| 4 Regulación altura respaldo              | 10 Ajuste profundidad de asiento |
| 5 Reclinación de respaldo                 | 11 Ajuste de asiento             |
| 6 Barra de seguridad                      | 12 Soporte de freno              |
|   | 13 Freno                         |

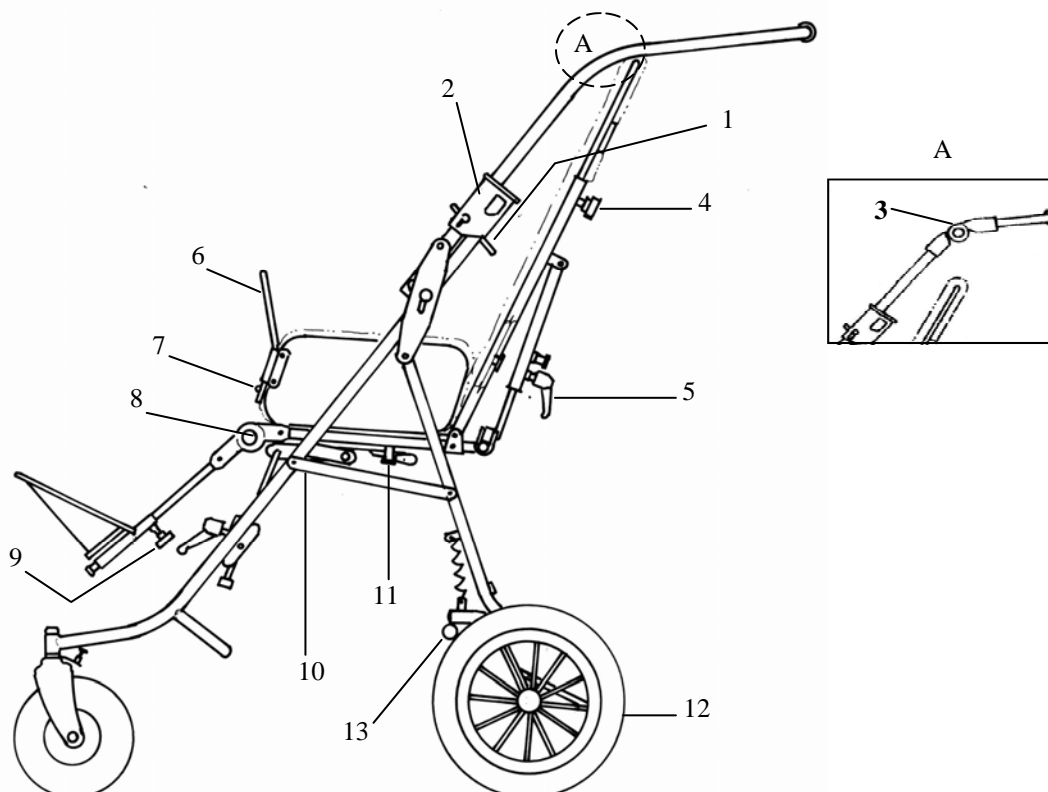


### 3. INSTRUCCIONES DE USO

#### 3.1 Montaje y desmontaje básico

Para desplegar el chasis, colocarse entre las ruedas traseras, sujetar fuerte la empuñadura y tirar hacia arriba. Mover la empuñadura unas cuantas veces, con el fin de asegurarse que el cierre de plegado queda firmemente sujeto y en su correcta posición.

Estos movimientos deben realizarse con cuidado para evitar dañar los dedos.

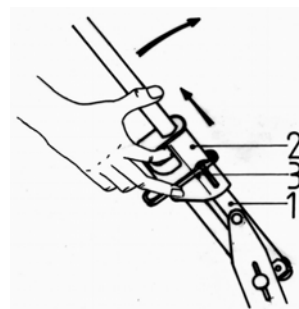

Para plegar el cochecito, colocar el reposapiés en posición horizontal y cerrarlo. Presionar el respaldo hacia el asiento. Levantar el cierre de plegado de la empuñadura y el mecanismo de seguridad. Presionar la empuñadura hacia las ruedas delanteras.

Es recomendable quitar todos los accesorios para que una vez el cochecito esté plegado, ocupe menos espacio.

#### 3.2 Ajustes

##### 3.2.1 Graduar la inclinación del respaldo


Sujete firmemente el respaldo. Libere la palanca de sujeción para graduar la inclinación. Sitúe el respaldo en la posición deseada. Vuelva a fijar la palanca.

##### 3.2.1 Graduar la altura y la reclinación del reposapiés

Sujetar el reposapiés. Liberar los sistemas de sujeción para graduar la altura. Situar en la posición deseada, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo, y volver a poner las palomillas, fijándolas firmemente.


Presionar los dos botones que se encuentran a los lados del reposapiés simultáneamente y ajustar al ángulo deseado. Suelte los botones y ajuste la posición para que los ejes del reposapiés queden fijos.

Para recoger la plataforma del reposapiés, sola tiene que tirar de ella hacia arriba.

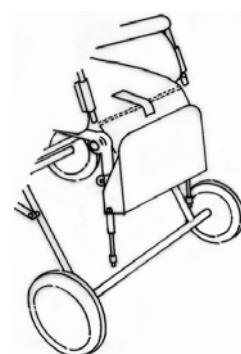

#### 3.3 Frenos

Colóquese detrás del cochecito. Para accionar el freno de estacionamiento sólo tiene que presionar el pedal de freno hacia abajo. Para desbloquear el freno de estacionamiento, sólo tiene que apretar la barra que lleva el mismo freno.

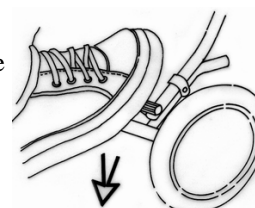

### **3.4 Sorteando los bordillos**

**Hacia abajo :** Coloque las ruedas delanteras contra el bordillo, sujete firmemente las empuñaduras y empuje de ellas hacia atrás presionando sobre las ruedas traseras. Acerque las ruedas traseras al extremo del bordillo. Baje el cochecito siempre apoyando el mismo sobre las ruedas traseras. Nunca incline el cochecito hacia delante mientras baja un bordillo.

**Hacia arriba:** Acerque las ruedas delanteras al bordillo. Sujete firmemente las empuñaduras mientras tira de ellas hacia las ruedas traseras. Coloque las ruedas delanteras encima del bordillo. Ahora tire de las empuñaduras hacia arriba hasta colocar las ruedas trasera encima del bordillo.

### **3.5 Sorteando escalones**

- use las rampas de subida siempre que le sea posible.
- siempre que sea posible, evitar los escalones. Si no hay otra alternativa, asegúrese que al menos otra persona pueda ayudarlo.
- No intente subir o bajar escaleras cargando con el cochecito y su ocupante, a menos que haya otra persona y que estén seguros de contralar el peso.
- durante la operación anterior, es muy importante mantener siempre las manos por la parte interior de las empuñaduras o del chasis.
- descansar a intervalos regulares.
- no levantar el cochecito por el reposapiés.

### **3.6 Subiendo/Bajando escaleras**

**Bajando:** posicione el cochecito recto con las ruedas delanteras mirando hacia el borde del primer peldaño. Empuje las empuñaduras hacia abajo hasta poner las ruedas traseras al borde del peldaño. El ayudante deberá posicionarse frente el cochecito para estabilizar y bajar el cochecito agarrando el armazón delantero. Ahora pueden ir bajando peldaño a peldaño, hasta el final de la escalera siempre controlando el peso.



**Subiendo:** posicione el cochecito con las ruedas traseras pegadas al borde del primer peldaño, empuje de las empuñaduras hacia abajo y suba al siguiente escalón. El ayudante deberá posicionarse frente el cochecito y, como en el caso anterior, estabilizar y subir el cochecito agarrando el chasis delantero, hasta llegar al final de la escalera.



## **4. EL OCUPANTE**

### **4.1 Normas para introducir al ocupante.**

Asegurar el freno de estacionamiento. Para una fácil colocación del niño en el cochecito, sitúe el reposapiés lo más apartado posible del asiento y ciérrelo. Si es posible, apoye el respaldo en una pared o a un objeto inmóvil (como alternativa, otra persona puede sujetar el cochecito). Coloque al niño cuidadosamente, asegurando todos los accesorios de sujeción. Gradúe el reposapiés a una posición cómoda.

### **4.2 Normas para sacar al ocupante**

Asegurar el freno de estacionamiento. Para sacar al niño del cochecito, sitúe el reposapiés lo más apartado posible del asiento y ciérrelo. Si es posible, apoye el respaldo en una pared o a un objeto inmóvil (como alternativa, otra persona puede sujetar el cochecito). Saque al niño cuidadosamente, asegurándose previamente de que todos los accesorios de sujeción han sido desbloqueados.

## 5. CUIDADO Y CONSERVACION

El cochecito Tom 4X Country no necesita ningún cuidado especial. Una revisión regular de las fijaciones y partes movibles es suficiente. Puede usar lubricante para que estas partes sigan funcionando correcta y fácilmente.

Tanto las ruedas, como las partes de plástico y metal, pueden ser lavadas con agua muy caliente y un detergente suave.

La tapicería es extraíble y lavable (máx. 40°).

## 6. DATOS TECNICOS


	<i><u>Tom 4X Country Mini</u></i>	<i><u>Tom 4X Country</u></i>	<i><u>Tom 4X Country Maxi</u></i>
Largo total	102 cm.	102 cm.	110 cm.
Altura total con empuñadura.	115,5 cm.	115,5 cm	105 cm.
Distancia asiento - reposapiés	26-34 cm.	26-34 cm.	21-39 cm.
Ancho asiento	26/30 cm.	24/28/34 cm.	28/32/38 cm.
Profundidad asiento	21-31 cm.	27-35 cm.	30-39 cm.
Basculación asiento	+/- 27°	+/- 27°	+/- 25°
Reclinación respaldo	0°-180°	0°-180°	0°-160°
Altura del respaldo	44,5-59,5 cm.	51-65 cm.	58-70 cm.
Ancho total	58,5 cm	58,5 cm.	65 cm.
Largo del cochecito plegado	90 cm.	90 cm	93 cm.
Alto del cochecito plegado	53 cm.	53 cm.	53 cm.
Peso	17,5 kg	18,5 kg.	21 kg.
Carga máxima	35 kg.	35 kg.	50 kg.
Barra de empuje	Articulada	Articulada	Fija

## 7. ACCESORIOS OPCIONALES

### 1. Capota

Levante la tapicería de la parte superior trasera del respaldo. Encontrará dos tubos metálicos. Colocar las piezas de plástico negras con los correspondientes tornillos en los tubos metálicos. Una vez colocados, insertar la capota en las piezas de plástico.

Para sacar la capota, ayúdese de las lenguetas de plástico que encontrará en la misma.

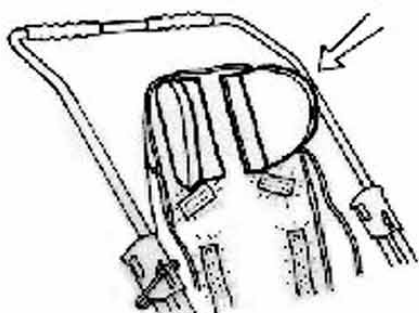


### 2. Reposa cabezas

Sentar al niño en el cochecito y buscar la altura apropiada para el reposa cabezas. Retirar al ocupante. Hacer unos pequeños agujeros en las bandas de piel artificial que se encuentran en la base del respaldo. Colocar los tornillos a través de los agujeros y asegurar el reposa cabezas al respaldo con las tuercas.


### 3. Soportes de tronco

Sentar al ocupante en el cochecito y buscar la altura deseada para los soportes (los soportes de tronco deben ir a la altura de la axila). Retirar al ocupante. Hacer unos pequeños agujeros en las bandas de piel que se encuentran en la base del respaldo. Poner los tornillos a través de los agujeros y asegurar el soporte de tronco en el respaldo con las tuercas.

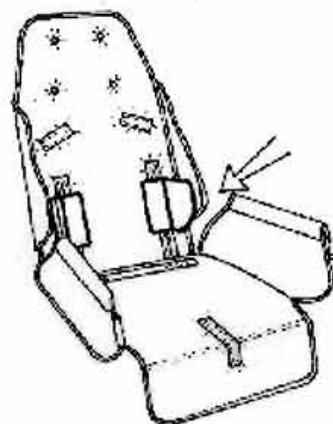


### 4. Soportes laterales de cadera

Sentar al niño en el cochecito para fijar la altura deseada de los soportes laterales. Retirar el ocupante. Pegar la cinta adhesiva por debajo de la tapicería .

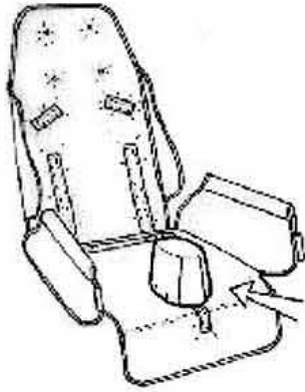

### 5. Taco abductor



Una vez el niño esté sentado en el cochecito, localizar el punto exacto donde es necesario poner el taco abductor. Retirar al niño del cochecito. Hacer un pequeño agujero en la banda de piel coincidiendo con el agujero de la base metálica. Coloque el abductor en el asiento (la parte estrecha debe mirar hacia el respaldo) y asegurarlo con el tornillo y la tuerca correspondientes.

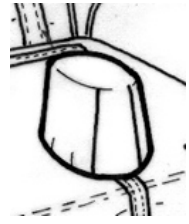

### 6. Peto

Hacer un pequeño corte en las bandas de piel superiores y pasar las tiras de la parte superior del peto por los agujeros hechos en la tapicería y por los agujeros que encontrará en el respaldo del cochecito. Pasar las tiras inferiores alrededor del respaldo. Fijé el peto en la parte trasera de silla ayudándose de los clips que encontrará en el respaldo.


Desabroche el peto y coloque al ocupante en la silla. Ajustar las tiras del peto con los pasadores.

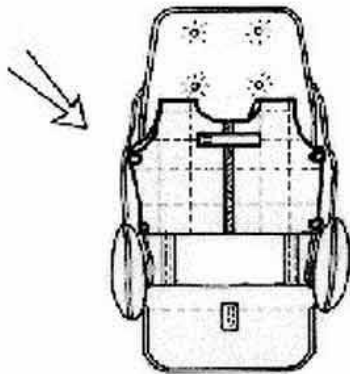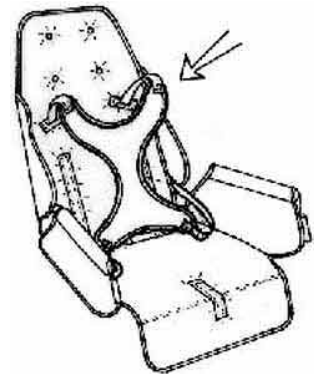

### 7. Chaleco

Montaje: Hacer un corte en las bandas de piel superiores y pasar las tiras de la parte superior del chaleco por los agujeros hechos. Pasar las tiras inferiores alrededor del respaldo. Fijar todas las tiras del chaleco a los clips que encontrará en la parte trasera del respaldo.

Colocación: Desabrochar el chaleco por la parte delantera y sentar al niño en el cochecito. Ajustar el chaleco ayudándose de los pasadores de plástico. Recuerde que el ocupante siempre debe sentirse cómodo con el uso del chaleco.

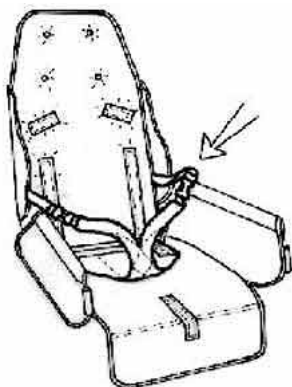

### 8. Pantalón abductor

Coloque el pantalón en la base del asiento. Haga un pequeño corte en la banda de piel que encontrará en la misma base y pegue la parte adhesiva de las tiras a través del agujero de la tapicería. Fije ahora las bandas superiores del pantalón con los pasadores que encontrará en el respaldo de la silla. Ajustar las tiras del pantalón con los pasadores traseros.





### 9. Cinturón de 2 puntos

Fijar las tiras inferiores del cinturón a los clips inferiores de la parte trasera del respaldo.

Desabroche el pasador del cinturón y sienta al usuario en la silla. Ajuste el cinturón a la medida deseada ayudándose de los pasadores traseros.

Recuerde que el ocupante siempre debe sentirse cómodo con el uso del cinturón.

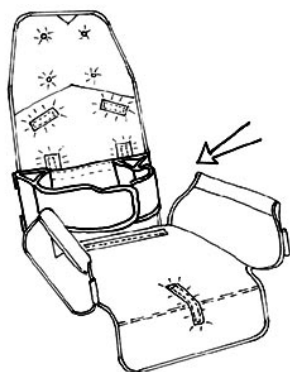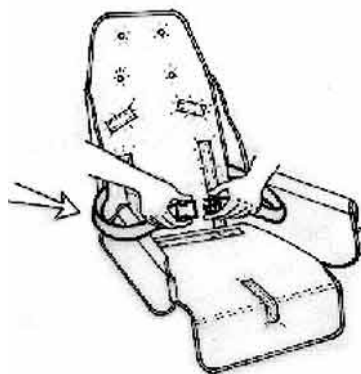

### 10. Cinturón de seguridad de pecho

Una vez el usuario sentado en el cochecito, buscar la altura adecuada para el cinturón. Retirar al ocupante. Fijar el cinturón en la parte trasera del respaldo ayudándose de los clips y el velcro.

Ajuste el cinturón al niño utilizando las banda frontal de velcro.




### 11. Cinturón de 4 puntos

Fijar las tiras inferiores del cinturón a los clips inferiores de la parte trasera del respaldo. Cortar las bandas de piel artificial. Pasar las tiras superiores del cinturón a través de los agujeros hechos y fijarlos en la parte superior trasera del respaldo con los pasadores que allí encontrará.

Afloje todos los tres pasadores del cinturón y sienta al usuario en la silla. Ajuste el cinturón a la medida deseada ayudándose de los pasadores traseros y volviendo a apretar los tres pasadores.

Recuerde que el ocupante siempre debe sentirse cómodo con el uso del cinturón.

### 12. Chasis de interiores

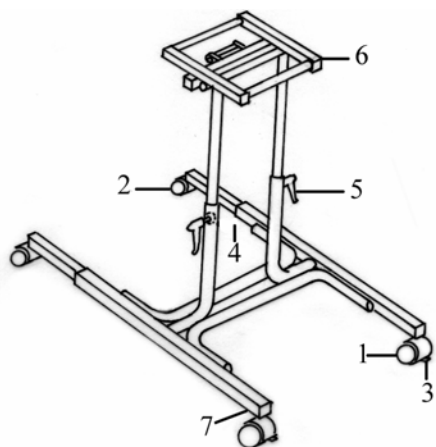

Montaje de las ruedas: Con cuidado introducir el pasador de la rueda dentro del agujero que hay en el tubo frontal (7). Sujete la rueda y gire la tuerca hasta que ésta quede firmemente sujeta.

La distancia entre las ruedas traseras y las ruedas delanteras debe ser la justa para evitar que la base se incline o se mueva una vez montado el asiento.

Usar siempre los frenos en el momento del montaje o desmontaje del asiento.

#### Partes del chasis

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1- Ruedas delanteras | 5- Reguladores de altura   |
| 2- Ruedas traseras   | 6- Adaptador para la silla |
| 3- Frenos            | 7- Posicionador de ruedas  |

### 13. Otros accesorios

