

**meywalk<sup>®</sup> 4**  
Modelo medio y grande

# Manual de instrucciones



CE

**meyland·smith**  
mobility and more

# Contenido

---

Introducción.....	3
Marcaje CE y etiquetaje.....	3
Medidas de seguridad.....	3
Antes del primer uso.....	4
Partes Meywalk® 4.....	4
Juntar la parte superior.....	5
Y la parte inferior.....	5
Carga del muelle.....	5
Ajustes – paso a paso.....	6
Tubos.....	6
Manillar.....	6
Asiento.....	7
Altura de soporte de tronco.....	7
Reemplazo del soporte de tronco.....	7
Función de inclinación.....	8
Entrar y salir.....	8
El tope trasero.....	8
Soporte de tronco.....	9
Frenos.....	9
Ajustes de freno.....	9
Frenos de fricción.....	9
Frenos de no retroceso.....	9
Accesorios.....	10
Bloqueador de dirección ruedas delanteras.....	10
Antivuelcos.....	10
Divisoria de piernas.....	10
Guías de piernas.....	10
Kit de reducción de altura para Meywalk® 4 Mediano.....	11
Asiento clásico.....	11
Almohadilla de tronco.....	11
Limpieza, desinfección y mantenimiento.....	11
Reciclar.....	11
Desechar.....	11
Garantía.....	12

## Introducción

El Meywalk® 4 mediano y grande está diseñado para niños de movilidad reducida, jóvenes y adultos a los que les cueste estar de pie sin una ayuda. El Meywalk® 4 está diseñado para uso en interiores. El peso máximo corporal permitido de un usuario es de 130 kg. Con el Meywalk® 4 usted ha comprado uno de los mejores andadores disponibles.

Se consigue un nivel alto debido a su diseño único y sus materiales de alta calidad. Usted quedará impresionado por sus múltiples funciones:

- El Meywalk® 4 sigue los movimientos del cuerpo y el modo de andar.
- Ayuda al usuario a mantener el cuerpo erguido lo que hace que el usuario se sienta seguro.
- El manillar soporta los brazos del usuario y reduce la presión sobre ellos.
- El asiento puede bajarse cuando se entra o se sale del andador.
- El tope trasero ayuda a mantener cómodamente sentado al usuario.
- Los muelles integrados y el asiento dinámico ayuda la función de caminar.

## Marcaje CE y etiquetaje

La etiqueta del fabricante y tipo se coloca en el chasis debajo del asiento. Las etiquetas deben siempre ser legibles. Reemplace las etiquetas ilegibles o faltantes lo antes posible.

La etiqueta del fabricante y tipo es importante para la identificación del producto y no debe ser retirado.

El Meywalk® 4 es marcado CE. Esto garantiza que el Meywalk® 4 cumple con todos los requisitos relevantes de seguridad especificados en la Directiva 93/42/EEC de productos sanitarios. El Meywalk® 4 fue testado por Berlín Cert, Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte GmbH en la Universidad Técnica de Berlín.

## Medidas de seguridad

¡Nunca deje el usuario en el Meywalk® 4 desatendido!

¡El Meywalk® 4 es un producto terapéutico – y sólo deberá usarse como tal!

El sistema de muelles utilizado en Meywalk® 4 puede comportar algunos riesgos de volcado si es utilizado por un usuario muy agitado.

El Meywalk® 4 rueda muy fácilmente, así que siempre hay que tener en cuenta algunos riesgos potenciales para el usuario.

Sujete siempre la barra inclinada de manera segura cuando se esté subiendo o bajando al usuario. Tenga especial cuidado cuando abra la barra inclinada para bajar al usuario, ya que habrá una fuerza dirigida hacia arriba que aumentará gradualmente conforme la barra inclinada se eleve.

No suelte nunca la barra inclinada en medio de una operación de subida o de bajada, incluso si el efecto del peso le coge por sorpresa.

Tenga en cuenta el alto riesgo de pellizco de los dedos cuando ajuste el andador.

Si quita algunas piezas, los extremos abiertos de los tubos quedarán a la vista. Éstos pueden tener bordes interiores afilados que pueden resultar peligrosos para los dedos. Sin embargo, el Meywalk® 4 y sus accesorios están diseñados para evitar extremos abiertos! Aún así, si se diera el caso, le recomendamos que los selle con tapones de plástico. La espuma de poliuretano y el tubo de espuma no puede ser consumido. Tenga en cuenta que la tapicería se calienta si se coloca directamente a la luz del sol. Esto puede causar daños en la piel si se toca la tapicería.

Por lo tanto, cubra las partes de tapicería o proteja el andador de la luz directa del sol.

El andador debe ser utilizado solo en un suelo anivelado y firme. Evite superficies sueltas como gravilla,

tierra o follaje. Tenga en cuenta las irregularidades y agujeros en el suelo ya que hay el riesgo de vuelco o de quedarse atascado.

Sea especialmente cuidadoso en superficies mojadas o con hielo, ya que el riesgo de deslizamiento es aún mayor.

Compruebe que todas las partes están abrochadas con seguridad antes de usar el andador. No utilice herramientas de limpieza de alta presión o productos químicos cáusticos para limpiar el andador.

### Antes de la primera utilización

El Meywalk® 4 se suministra casi totalmente montado.

Compruebe que el paquete contiene las siguientes partes:

- :: Chasis inferior con ruedas y frenos
- :: Parte superior con asiento y soporte de tronco.
- :: Un set de muelles de acuerdo con el peso corporal del usuario.
- :: Los accesorios según pedido.



### Junta el chasis superior e inferior

Coloque la parte superior dentro los tubos de la parte inferior. Recuerde de posicionar la parte superior de modo que los puntos del manillar estén en la dirección de las ruedas delanteras giratorias.



### Carga del muelle

Los dos muelles dentro de los tubos pueden cambiarse para obtener una suspensión más fuerte o suave. Como norma, los muelles deben estar completamente comprimidos por el peso corporal del usuario. Existen 5 niveles de diferentes intensidades de fuerza de acuerdo con el peso del usuario:



- :: Muelles blancos para 20 kg - 45 kg
- :: Muelles amarillos para 45 kg - 65 kg
- :: Muelles azules para 65 kg - 80 kg
- :: Muelles rojos para 80 kg - 100 kg
- :: Muelles grises para 100 - 130 kg

Los muelles pueden ser fácilmente intercambiados. Coja y abra la barra de balanceo de modo que el chasis se baje. Los extremos del tubo están cerrados con una tapa - abra las tapas para extraer los muelles.

Para abrir la tapa tire hacia arriba y gire hacia la derecha antes de empujar la tapa hacia abajo y afuera. Después de extraer los muelles antiguos, se pueden insertar en los tubos. Ahora la tapa puede ser fijada de nuevo repitiendo los pasos descritos anteriormente pero en orden inverso.



### Ajustes— paso a paso

Es siempre una buena idea consultar a uno de nuestros profesionales antes de ajustar el Meywalk® 4.

### Tubos


¡Advertencia! No lleve a cabo este ajuste, mientras el usuario está colocado en Meywalk® 4.

La altura de Meywalk® 4 se ajusta por medio de la maneta. Afloje la maneta en ambos lados y ajuste el chasis a la altura deseada. Sujete las manetas con firmeza. Es importante que ambas partes estén ajustadas a una altura igual. Usted puede comprobar esto a través de las muescas en los tubos.



### Manillar


El ángulo del manillar se puede ajustar en tres pasos. Afloje los dos tornillos y gire el manillar a la posición deseada. Ajuste los tornillos ligeramente. Si el manillar está colocado correctamente, no debería ser posible girarlo con los tornillos fijados ligeramente. Cuando se ha asegurado de que el manillar esté colocado correctamente, ya puede fijar bien los tornillos.

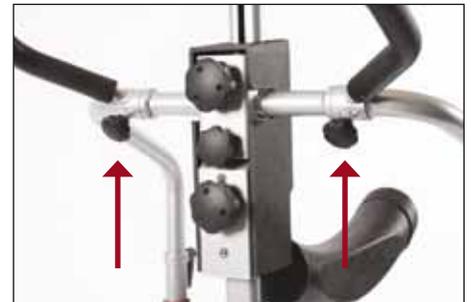

### Asiento


¡Advertencia! No lleve a cabo este ajuste, mientras el usuario está colocado en Meywalk® 4.

Ajuste la altura del asiento de acuerdo a la longitud de las piernas del usuario. Gire el tornillo inferior situado en la parte delantera del Meywalk® 4. El tornillo tiene un "bloqueo infantil" que se suelta presionando y girando simultáneamente. Cuando se libera, el asiento se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo. Coloque el asiento a la altura correcta. Coloque su mano debajo de la barra inferior del asiento para ayudar a que el asiento se deslice hacia arriba y abajo más fácilmente. Vuelva a apretar el tornillo cuando se haya posicionado en la altura deseada.

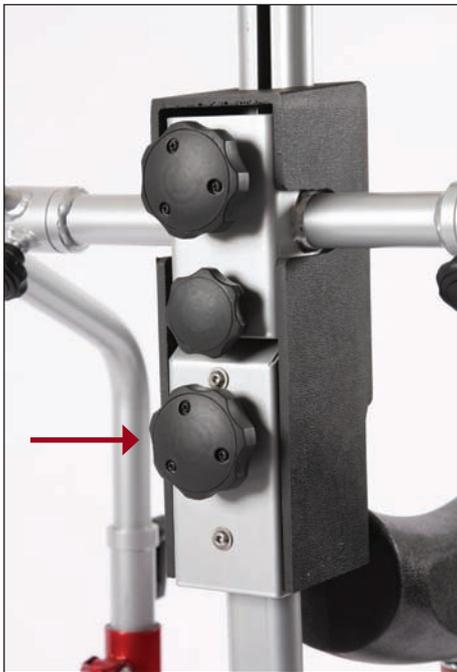

### Altura soporte de tronco

Ajuste el soporte de tronco de acuerdo a la altura del usuario individual. Gire el tornillo superior situado en la parte delantera de la Meywalk® 4. El tornillo tiene un "bloqueo infantil", que se suelta presionando y girando simultáneamente. Cuando se libera, el soporte del tronco se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo hasta que se encuentre la altura correcta. Vuelva a apretar el tornillo.

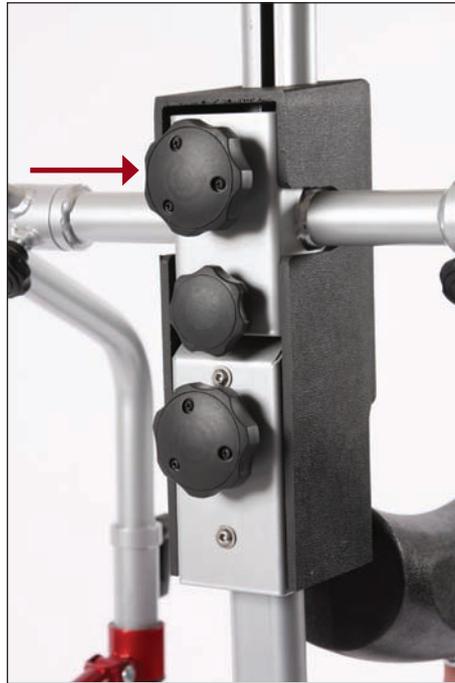

### Reemplazo del soporte de tronco

¡Advertencia! No lleve a cabo este ajuste, mientras el usuario está colocado en Meywalk® 4.

Para reemplazar el soporte de tronco, afloje los dos tornillos Allen delante del soporte. Los dos tornillos encajan todos los soportes de tronco. El soporte de tronco está disponible en cinco variantes.


Circunferencia 70, 90, 105, 120 y 130 cm.



### Función de inclinación

¡Advertencia! No lleve a cabo este ajuste, mientras el usuario está colocado en Meywalk® 4.

Por medio de la función de inclinación la postura del usuario se puede cambiar. Gire el tornillo central para inclinar el soporte. El tornillo está situado en la parte delantera de Meywalk® 4. Al girar el tornillo, se puede cambiar el ángulo del soporte de tronco y el asiento hasta 15°. La función de inclinación se puede ajustar continuamente.

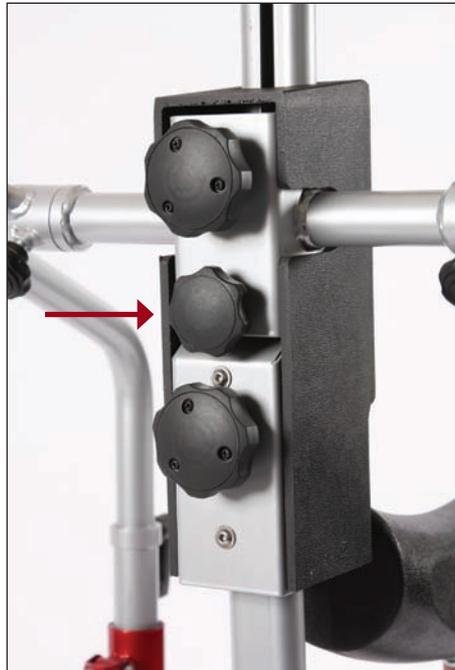

### Entrar y salir

Con una única elevación y descenso del sistema Meywalk® 4 ha hecho que para el usuario sea más fácil entrar y salir. Agarre la parte delantera de la barra de balanceo con las dos manos y levante hacia arriba mientras aprieta las dos clavijas que bloquean la barra de balanceo. De esta manera el asiento se bajará 7 cm aprox. Para el mediano y 24 cm para el grande. Cuando el usuario se ha sentado, cierre el soporte del tronco y levante el tope trasero. El asiento se levanta, empujando hacia abajo la barra de balanceo hasta que encaje con un clic audible. El sistema integrado del engranaje de elevación y descenso significa que la presión hacia abajo sólo necesita ser alrededor de un tercio del peso del usuario.



### Tope trasero

El tope trasero siempre debe estar cerrado en posición vertical cuando haya un usuario en Meywalk® 4. Tire del tope trasero hacia atrás del asiento y gírelo hacia arriba. Ahora usted puede empujarlo hacia abajo en la posición de bloqueo. Repita el procedimiento en orden inverso para abrir el tope trasero de nuevo.



### Soporte de tronco

Para abrir el soporte de tronco empuje las dos partes acolchadas del tubo hacia el interior y gírelo hacia abajo. Para cerrar el soporte del tronco empuje las piezas del tubo hacia el interior y gírelo hacia arriba hasta la posición de bloqueo.



### Frenos

Los frenos son frenos de estacionamiento que funcionan bloqueando directamente las ruedas traseras con una polea que presiona el neumático. Para frenar el aparato, presione las palancas de freno hacia abajo hasta que se detenga definitivamente. Los frenos se auto-bloquean en esta posición. Los frenos se liberan tirando de nuevo de las palancas de freno.



### Ajuste de los frenos

¡Advertencia! Los ajustes de los frenos deben llevarse a cabo solo por profesionales.

A lo largo del tiempo puede ser necesario reajustar los frenos. Afloje los dos tornillos un poco. Ahora puede reposicionar los frenos. Apriete los tornillos firmemente de nuevo.



### Frenos de fricción

Para ajustar los frenos de fricción, gire la llave de mando, bajo los frenos con la llave Allen, gire a la derecha para aumentar la fuerza de frenado, y contrario a las agujas del reloj para disminuir la fuerza de frenado.



### Frenos unidireccionales

Para activar o desactivar los frenos tirar y girar el pasador de encaje 90°



# Accessories

## Rueda delantera giratoria

Para activar o desactivar los bloqueos de giro, tirar y girar el pasador de encaje de 90°.




## Ruedas antivuelco

Las ruedas antivuelco están montadas en cada lado retirando los tornillos de fijación de las ruedas. Utilice una llave Allen de 6 mm. Coloque el soporte antivuelco en la parte exterior de la horquilla trasera del Meywalk® 4, de esta manera encajarán en los dos agujeros de la horquilla trasera. Atornille los tornillos en ambos lados. Vuelva a apretar con firmeza.



## Divisoria de piernas

Fije la divisoria de piernas debajo de la barra del asiento con los dos tornillos.

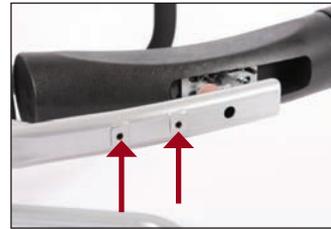


La altura de la divisoria de piernas es ajustable. Aflojar el tornillo en la parte delantera del tubo central. Ajuste la divisoria de piernas hasta la altura deseada y vuelva a apretar el tornillo con firmeza.



## Guías para las piernas

Fije la divisoria de piernas debajo de la barra del asiento con los dos tornillos. La altura de la divisoria de piernas es ajustable. Aflojar el tornillo en la parte delantera del tubo central. Ajuste la divisoria de piernas hasta la altura deseada y vuelva a apretar el tornillo con firmeza.

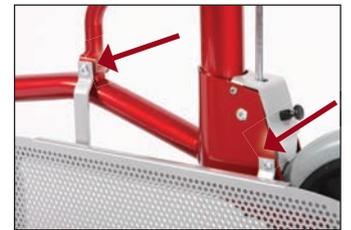

### Kit de reducción de altura para Meywalk® 4 Mediano

El Kit de reducción de altura para Meywalk® 4 Mediano se puede reducir 6 cm con un conjunto de accesorios para la reducción de la altura. Los accesorios de reducción de altura se montan en el mismo soporte de la barra de balanceo. Retire la barra de balanceo y monte los accesorios de reducción de altura en el mismo soporte dónde está instalada la barra de balanceo.



### Asiento clásico

La forma del asiento clásico ya es conocido por las versiones anteriores. El asiento clásico para Meywalk 4 viene completo con: soportes, goma y tope trasero.


Para montar el asiento clásico, primero extraiga el asiento dinámico quitando los tornillos debajo de la barra de asiento. Quite el asiento dinámico y reemplácelo por el asiento clásico.

Coloque los tornillos firmemente. El tope trasero del asiento puede ser ajustado en profundidad. Primero levante el tope trasero e inclínelo hacia atrás. Esto revela un tornillo Allen dentro el perfil en forma de "U". Cuando el tornillo Allen está aflojado, el tope trasero puede ser deslizado hacia delante o hacia atrás en el tubo externo. Después del ajuste apriete de nuevo el tornillo Allen.



### Almohadilla de tronco

La almohadilla de tronco se monta en la cubierta de poliuretano negro de el cuadro central. Primero retire los tornillos y arandelas del revestimiento. A continuación, montar la plataforma del tronco utilizando los tornillos que vienen con la plataforma de tronco.

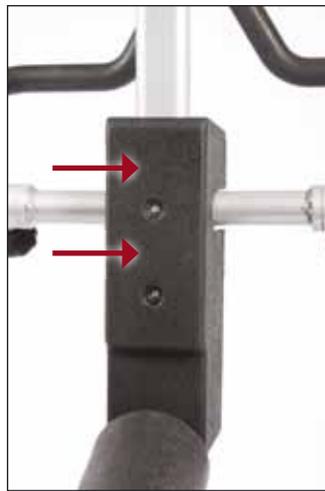

### Limpieza, desinfección y mantenimiento

Meywalk® 4 se puede lavar en agua tibia con detergente pero tenga cuidado de no lavar el acolchado de espuma en la parte posterior del soporte de tronco. Con el tiempo el marco pintado puede perder brillo si se lavó con detergente en repetidas ocasiones. Si es así, el marco se puede pulir con pulimento para el coche. Siga las instrucciones del pulimento para su correcto uso.

El marco y las piezas de plastic pueden ser desinfectadas a base de alcohol desinfectante.

El acolchado de espuma no se puede desinfectar. Se recomienda comprobar regularmente el estado de todas las empuñaduras, tuercas y tornillos. Vuelva a apretar si es necesario. Comprobar el freno de estacionamiento. Cuando los frenos están activados, no será posible empujar el andador.

Cuando los frenos están desactivados, será posible empujar el andador. Además todas las piezas móviles deben funcionar de forma fácil. Si escucha algún ruido de fricción o chirrido en el caminador, consulte a un profesional.

### Reciclaje

En la entrega o reciclaje del andador, toda la documentación técnica necesaria debe ser entregada al usuario para garantizar un manejo seguro.

El andador debe ser limpiado, desinfectado y verificar los daños por un profesional antes de entregar el producto.

### Desechar

Cuando el andador ya no está en uso y desea deshacerse de él, por favour revise las reglas y regulaciones con la empresa local de gestión de residuos.

## Garantía

La garantía cubre los defectos de fábrica y materiales. El periodo de garantía es de 24 meses a partir de adquirir el producto. La garantía no cubre ningún daño debido al desgaste por uso, la manipulación intencionada o el mal uso. Esto también se aplica si utiliza detergentes y lubricantes no adecuados.

Cuadro de medidas:	Mediano	Largo
Longitud:	93 cm	96 cm
Ancho exterior:	62 cm	66 cm
Ancho interior:	48 cm	53 cm
Altura de asiento*:	57-81 cm	77-100 cm
Altura soporte de tronco*:	95-127 cm	115-147 cm
Circunferencia de apoyo:	70, 90, 105, 120 and 130 cm	70, 90, 105, 120 and 130 cm
Peso: (sin accesorios):	32 kg	34 kg
Carga máxima:	130 kg	130 kg
Colores:	Rojo metálico	Negro Metálico

## Materials:

Chasis:	Tubo de acero con recubrimiento en polvo
Accesorios:	Acero pintado al polvo
Tapicería:	Poliretano
Ruedas:	Cubiertas macizas con llantas de plástico

\* Las alturas son medidas con los muelles a media compresión.



Trens Petits 1 Pol. Ind. Mas Xirgu. 17005 Girona  
T+ 34 902 48 72 72 F+34 972 40 50 54  
info@rehagirona.com  
www.rehagirona.com

Dealer: