


MADITA

der mobile, mitwachsende Therapiestuhl




Stücklisten

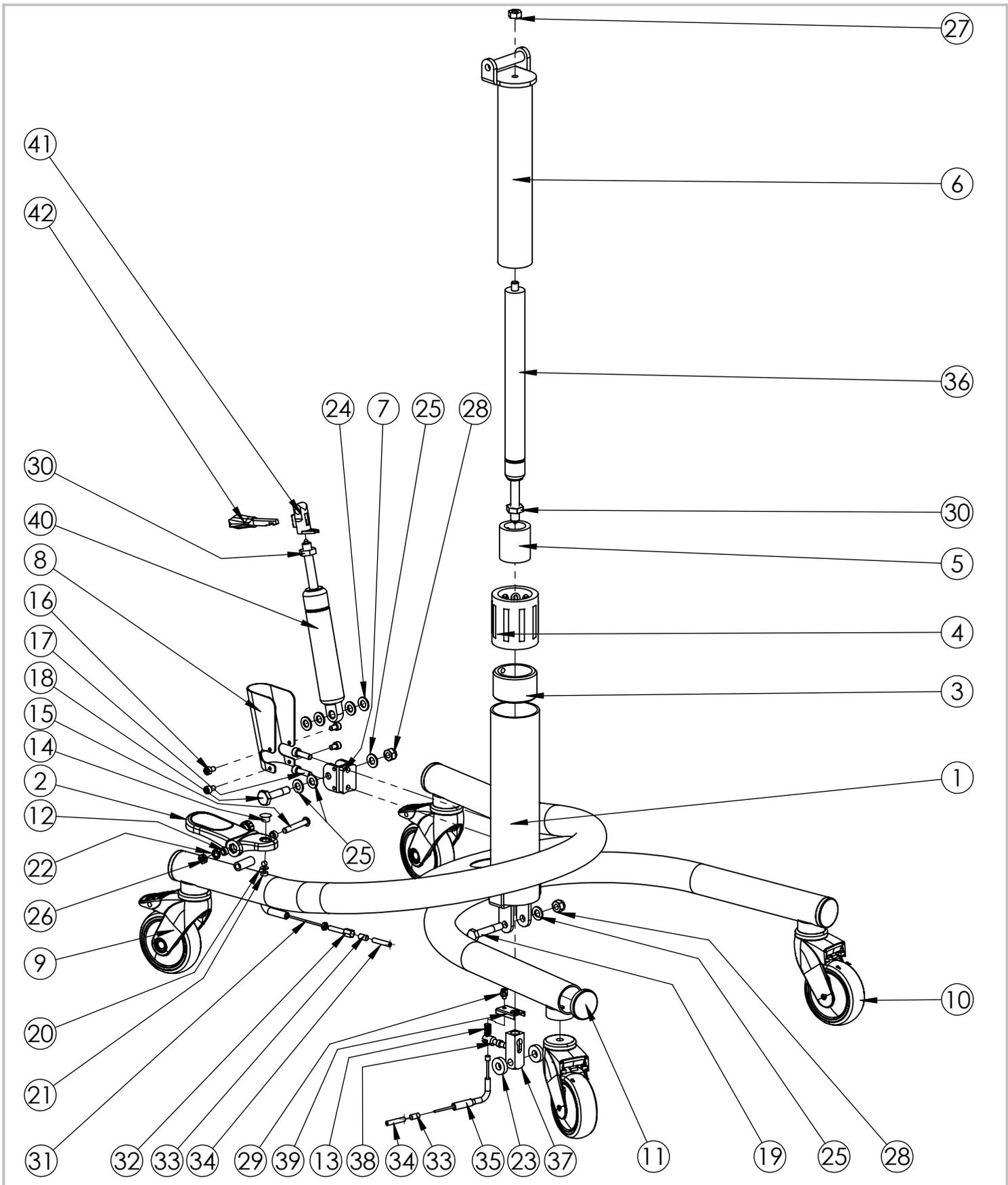

Produkt/product: verwendet in		Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx		z.B. Oberflaechen, Koerperkanten		Dateiname/filename: Madita Untergestell Größe 1	
						Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
			Datum gez. 30.04.2014	Name TE	Benennung / part name: Untergestell Madita Größe 1		
				Zeichnungsnummer / drawing number XXX			A4
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight:6069.82		MASSSTAB:1:10	BLATT 1 VON 2

**Schuchmann
GmbH & Co. KG**


POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Madita Grundgestell Gr. 0 + 1	3151031	1
2	Fusspedal komplett	10000001	1
3	Führungshülse POM	3190090	1
4	Linearkugellager mit Doppellippendichtung LBBR 40-2LF	3190092	1
5	Verstärkungsring innen	3093004	1
6	Höhenverstellung Hubsäule	3093001	1
7	Halteblock	3093025	1
8	Abdeckblech Gasdruckfeder	3190026	1
9	Laufrolle Ø75 mm gebremst	9000391	2
10	Laufrolle Ø75mm ungebremst	9000390	2
11	Kunststoffendkappen für Rundrohre Ø36 mm	9090008	4
12	Gleitlager 6x9x4 (Fußpedal)	3195022	2
13	Druckfeder Madita Gasdruckfeder Höhenverstellung	3195035	1
14	Stopfen EMICO 1800029	9090142	1
15	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 40	316178	1
16	Inskt.Schr. ISO 4762 8.8 M 5 x 8 galv. verzinkt	080311	4
17	Inskt.Schr. ISO 4762 8.8 M 6 x 20 galv. verzinkt	070541	2
18	Paßschraube M8 x 37	2193030	1
19	Passschraube M8 x 40	3193005	1
20	Scheibe DIN 9021 3,2 galv. verzinkt	511411	1
21	Distanzhülse 3.1x8x3 schwarz	2193032	1
22	Zahnscheiben DIN 6797 A 6,4 galv. verzinkt	513671	1
23	Distanzhülse Kunststoff M8 20x5x8,5	9090102	2
24	Scheibe ISO 7089 Polyamid 8	470140	4
25	Scheiben ISO 7089 8 galv. verzinkt	500681	4
26	Sechskantmuttern ISO 4035 04 BM 6 galv. verzinkt	163031	1
27	Sechskt.-Muttern DIN 934-8 M 8 galv. verzinkt	160651	1
28	Sicherungsmuttern DIN 985 N M 8 verzinkt	480050	2
29	Klemmnippel	6190050	1
30	Sechskantmuttern DIN 439 A2 M 10 x 1 für Gasdruckfeder	291855	2
31	Universal Innenschaltzug Stahl verz. mit Birnen- und Walzennippel	6190041	1
32	Stellschraube ungeschlitzt M5x24	6190051	1
33	Endhülse Außenzug	6190046	2
34	Bowdenzug-Außenhülle für Gr. 0+1 Teflon beschichtet	6190003	2
35	90° Rohr für Bowdenzug	3195028	1
36	Gasdruckfeder Madita Höhenverstellung Gr 0+1 (250 N)	6090034	1
37	Auslösekopf 4-kt 15x15 M10x1 - Bohrung 90° versetzt Ø8,1 quer	6050001	1
38	Bedienhebel kurz Bowdenzug Ø5,1	6090038	1
39	Schuh für Bowdenzug nach Zg. 42300035	6090037	1
40	Gasdruckfeder 500 N kurz Sitzwinkelverstellung	6090009	1
41	Auslösekopf_Stabilus M10x1 ohne Halter Führungshülse	2153000	1
42	Handauslösehebel für Sitzwinkelverstellung	6090004	1

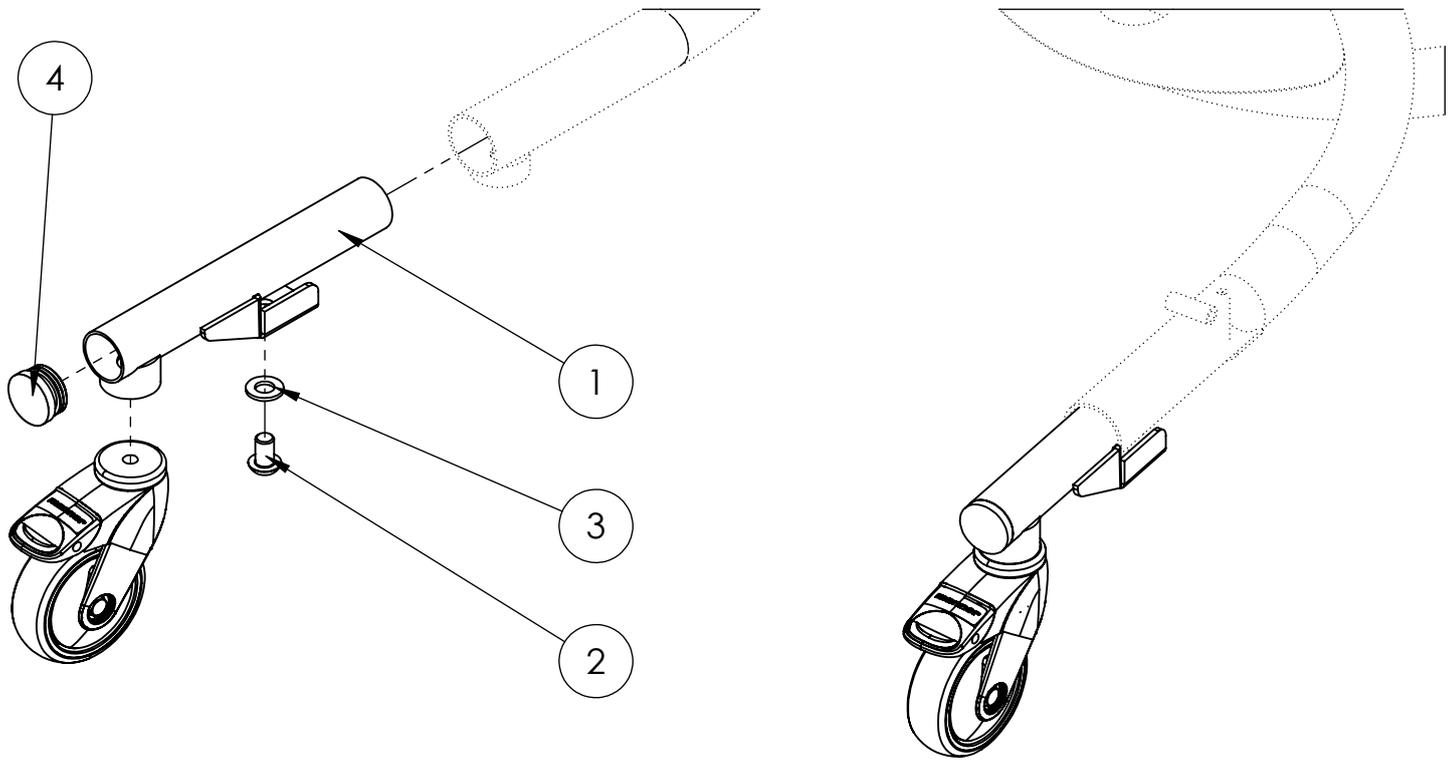

Kunststoffendkappen für Rundrohre Ø36 mm (2x) fallen hinten bei der Radstandverlängerung am Untergestell weg.

Pos	Art-Nr.	Bez_1	St
1	3191080	Radstandsverlängerung	2
2	316250	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 10 x 16	2
3	290070	Scheiben DIN 125 A2 A 10,5	2
4	9090028	Kunststoffendkappen für Rundrohre 30 mm	2

Produkt/product: Madita		Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx		z.B. Oberflächen, Körperkanten		Dateiname/filename: Madita Radstandsverlängerung	
						Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
				Datum 30.04.2014		Name TE	
						Benennung / part name: Madita Radstandvserlängerung	
				Schuchmann GmbH & Co. KG		Zeichnungsnummer / drawing number XXX	
						A4	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight:5307.26		MASSSTAB:1:1	
						BLATT 1 VON 1	

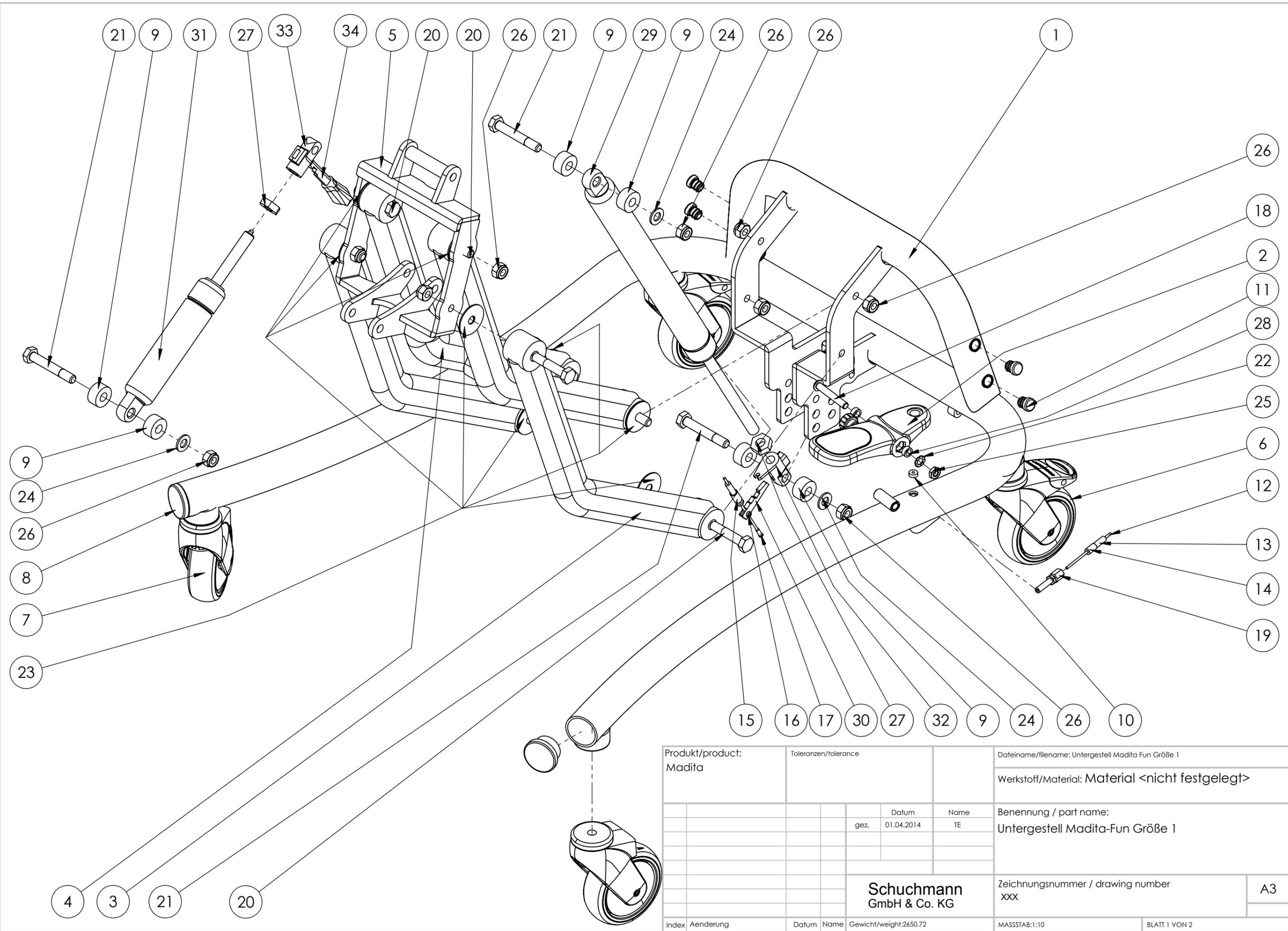


Produkt/product: Madita		Toleranzen/tolerance		Dateiname/filename: Untergestell Madita Fun Größe 1	
				Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
		Datum gez. 01.04.2014	Name TE	Benennung / part name: Untergestell Madita-Fun Größe 1	
Schuchmann GmbH & Co. KG				Zeichnungsnummer / drawing number XXX	
				A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight: 2650.72	MASSSTAB: 1:10
				BLATT 1 VON 2	

POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Franka 2012 Gr.1 kpl. unbeschichtet und unmontiert	2151005	1
2	Fusspedal komplett	10000001	1
3	Schwenkarm Gr. 1+2	2191001	2
4	Schwenkarm Oben Gr.1+2 mit Querstrebe	2191002	1
5	Franka Aufnahmekopf oben	2150007	1
6	Laufrolle Ø75 mm gebremst	9000391	2
7	Laufrolle Ø75mm ungebremst	9000390	2
8	Endkappe für Rundrohre Ø 32 mm	9090006	2
9	Distanzhülse Kunststoff M8 20x10x8,5	9090104	6
10	Distanzhülse 3.1x8x3 schwarz	2193032	1
11	Kunststoffendkappen für Rundrohre 12 mm	9090103	4
12	Universal Innenschaltzug Stahl verz. mit Birnen- und Walzennippel	6190041	1
13	Bowdenzug-Außenhülle für Gr. 0+1 Teflon beschichtet	6190003	1
14	Endhülse Außenzug	6190046	1
15	Führungshülse Bowdenzug Stahl	6090018	1
16	Schraubnippel Gaszug	6190049	1
17	Endkappe Innenzug	6190047	1
18	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 40	316178	1
19	Stellschraube ungeschlitzt M5x24	6190051	1
20	Passschraube M8 x 40	3193005	8
21	Paßschraube M8 x 52 für Verschraubung der Gasdruckfeder	2193031	3
22	Zahnscheiben DIN 6797 A 6,4 galv. verzinkt	513671	1
23	Permaglide Scheibe 30x8x1	2193028	8
24	Scheiben ISO 7089 8 galv. verzinkt	500681	3
25	Sechskantmuttern ISO 4035 04 BM 6 galv. verzinkt	163031	1
26	Sicherungsmuttern DIN 985 N M 8 verzinkt	480050	12
27	Sechskantmuttern DIN 439 A2 M 10 x 1 für Gasdruckfeder	291855	2
28	Gleitlager 6x9x4 (Fußpedal)	3195022	2
29	Gasdruckfeder 1200 N Franka Sitzhöhenverstellung	6090008	1
30	Auslösehebel M8 u. M10	2153008	1
31	Gasdruckfeder 500 N kurz Franka, Madita, Fridolin	6090009	1
32	Auslösekopf M10 x 1	2153000	1
33	Auslösekopf_Stabilus M10x1 ohne Halter Führungshülse	2153000	1
34	Handauslösehebel für Sitzwinkelverstellung	6090004	1

Pos 21 bei Größe 2 durch 9090066 ersetzen

Pos 45 - Bei Telegrau durch 474060 ersetzen

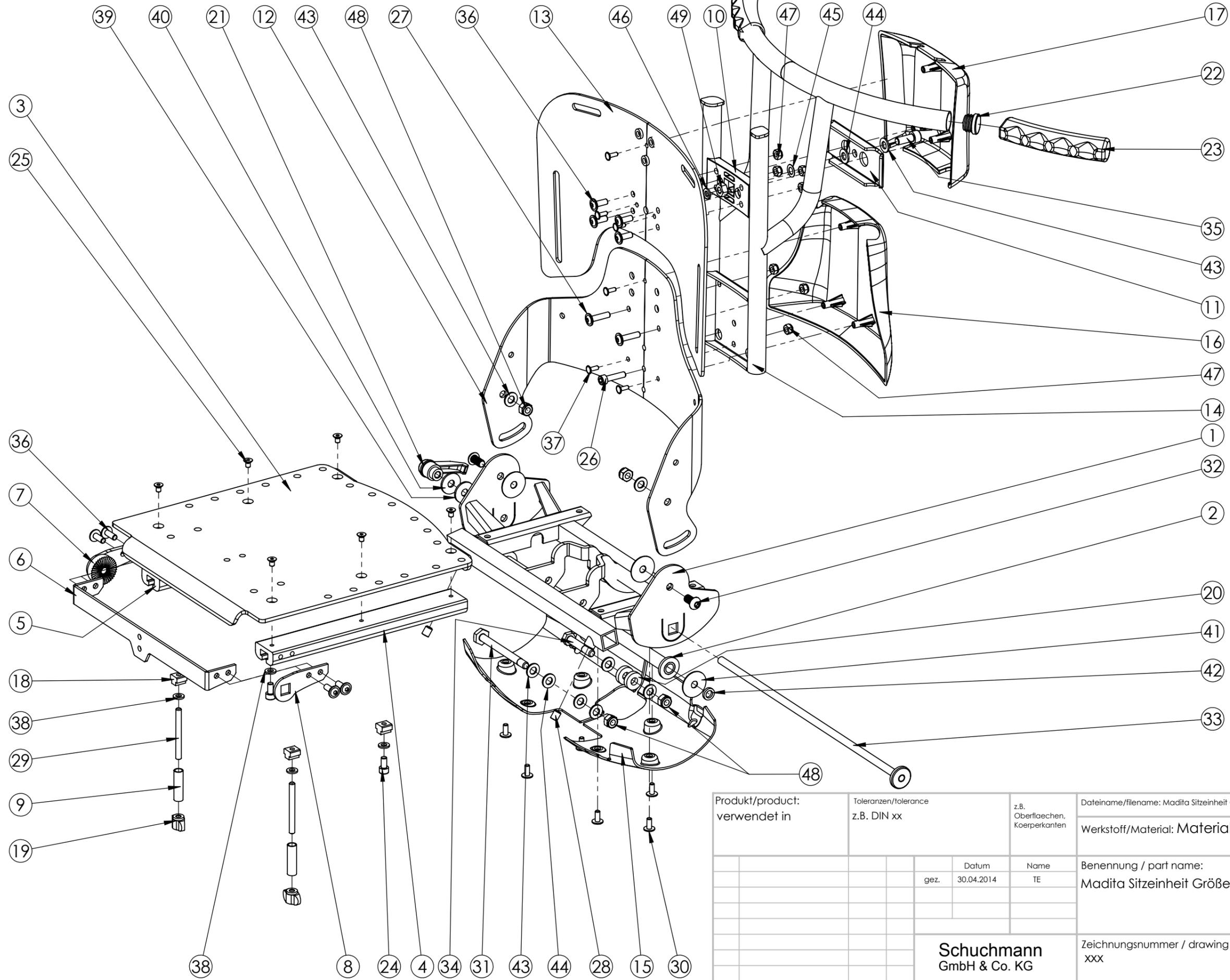


41 auf beiden Seiten

42 auf beiden Seiten


Produkt/product: verwendet in		Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx		z.B. Oberflächen, Körperkanten		Dateiname/filename: Madita Sitzereinheit Größe 1	
						Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
		Datum gez. 30.04.2014		Name TE		Benennung / part name: Madita Sitzereinheit Größe 1	
						Zeichnungsnummer / drawing number xxx	
				Schuchmann GmbH & Co. KG		A3	
Index Aenderung		Datum Name		Gewicht/weight: 7208.27		MASSSTAB: 1:1 BLATT 1 VON 2	

POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Oberrahmen Gr. 1	3191022	1
2	Klemmrohr Gr1	3150015	1
3	Sitzblech Gr. 1	3191034	1
4	Aluschiene Größe 1 - Paar	3191025	1
5	Aluschiene Größe 1 - Paar	3191025	1
6	Querstrebe für Fußbank get Gr1	3191023	1
7	Befestigung Fußbank mit Raster Gr 0-2 rechts	3191126	1
8	Haltestück Fußbank Gr 0-2 links	3190095	1
9	Edelstahlbuchse 35x10x1 Sitztiefenverstellung	3195029	2
10	Rückenblech Verdrehschutz	3191063	1
11	Klemmstück	3150004	1
12	Beckenblech Gr1	3151029	1
13	Rückenblech kurz Größe 1	3191036	1
14	Rückenrohr mit Schiebegriff kurz	3150006	1
15	Sitzabdeckung Gr 1	3191013	1
16	Beckenblechabdeckung geschlossen	3150041	1
17	Rückenblechabdeckung kurz	3150040	1
18	Muttern für T-Nuten DIN 508.8 M 6 x 8	798020	4
19	Novo Grip Miniwing M6 Innengewinde	9090147	2
20	Distanzhülse Kunststoff M8 20x5x8,5	9090102	2
21	Klemmhebel mit Innengewinde M8	9090078	1
22	Kunststoffendkappen für Rundrohre 22mm	9090026	2
23	Deltagrip 850 Lenkergriff	6190096	2
24	Inskt.Schr. ISO 4762 8.8 M 6 x 12 galv. verzinkt	070511	2
25	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 5 x 8 galv. verzinkt	150421	6
26	Inskt.Schr. ISO 4762 8.8 M 6 x 25 galv. verzinkt	070551	1
27	Linsenflanschkopfschr. 10.9 AM 6 x 25 galv. verzinkt SB	155796	2
28	Gewindestift ISO 4026 H45 M 8 x 10 galv. verzinkt	120861	2
29	Gewindestifte ISO 4026 H45 M 6 x 60 galv. verzinkt	120791	2
30	Linsenflanschkopfschr. 10.9 AM 5 x 12 galv. verzinkt SB	155788	6
31	Sechskant-Passschraube M8 x 87	3191082	1
32	Inskt.Schr. ISO 4762 A2 M 8 x 16	311150	2
33	Gewindestange Rückenwinkel M8 Gr1 - 360	8290077	1
34	Passschraube M8 x 40	3193005	1
35	Inskt.Schr. ISO 4762 8.8 M 8 x 20 galv. verzinkt	070741	1
36	Linsenflanschkopfschr. 10.9 AM 6 x 16 galv. verzinkt SB	155794	8
37	Plasfast-Schr. 30° Flan.-K. TX 4,0 x 12 mm galv.-verz.	919678	6
38	Scheiben ISO 7089 Polyamid 6	470130	4
39	Scheiben DIN 9021 Polyamid 8,4 mm	470340	1
40	Scheiben DIN 9021 8,4 galv. verzinkt	511471	1
41	Permaglide Scheibe 30x8x1	2193028	4
42	Nord-Lock-Scheibe NL8	2191025	2
43	Scheiben ISO 7089 8 galv. verzinkt	500681	7
44	Scheibe ISO 7089 Polyamid 8	470140	3
45	Passscheibe DIN 988 - PS 8 x 14 x 0,5	474059	1
46	Scheiben ISO 7089 6 galv. verzinkt	500671	1
47	Sicherungsmutter DIN 985 N M 6 verzinkt	480030	7
48	Sicherungsmuttern DIN 985 N M 8 verzinkt	480050	4
49	Sechskt.-Muttern DIN 934-8 M 8 galv. verzinkt	160651	1

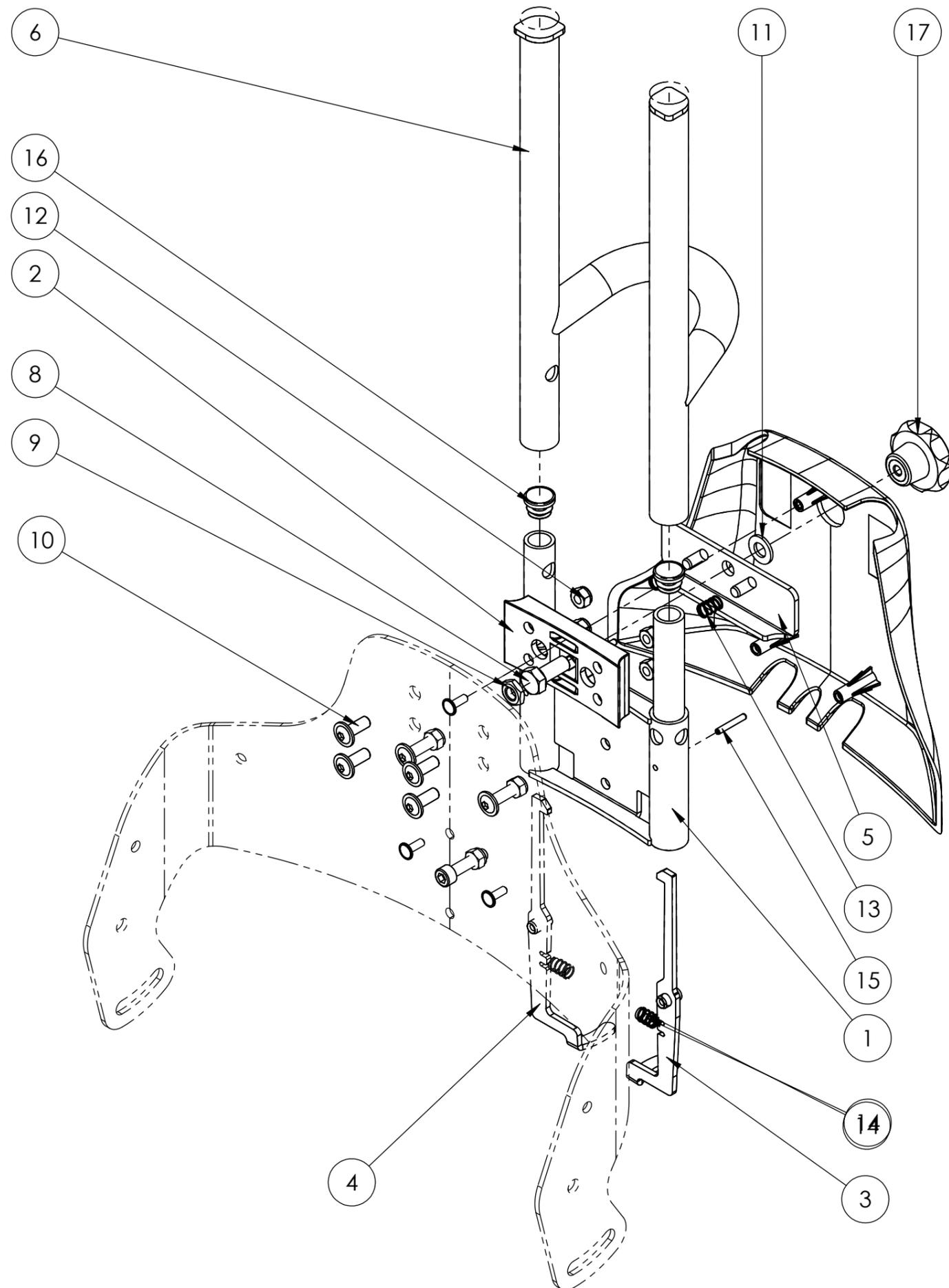


Pos	Art-Nr.	Bez_1	St.
1	3150020	Rückenrohrfixierung für abnehmbaren Rücken	1
2	3191063	Rückenblech Verdrehschutz	1
3	3150045	Rastblech mit Bohrbuchse links	1
4	3150046	Rastblech mit Bohrbuchse rechts	1
5	3150023	Klemmstück für abnehmbaren Rücken inkl. Zylinderstiften	1
6	3150032	Rückenrohr ohne Schiebegriff lang - abnehmbarer Rücken	1
7	3150038	Beckenblechabdeckung abnehmbarer Rücken	1
8	045451	Sechskantschr. DIN 933 8.8 M 8 X 20	1
9	163041	Sechskantmutter ISO 4035 04 BM 8 galv. verzinkt	1
10	155794	Linsenflanschkopfschr. 10.9 AM 6 x 16 galv. verzinkt SB	4
11	470140	Scheibe ISO 7089 Polyamid 8	1
12	480030	Sicherungsmutter DIN 985 N M 6 verzinkt	4
13	3150026	Druckfeder D-122A-12	2
14	3150027	Druckfeder - D-128	2
15	522690	Spannhülsen ISO 8752 (DIN1481) 3,0 x 20	2
16	9090024	Kunststoffendkappe für Rundrohre Ø16	2
17	9090091	Sterngriff M8 mit Innengewinde	1

Produkt/product: Madita		Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx	z.B. Oberflächen, Körperkanten	Dateiname/filename: Madita abnehmbarer Rücken Größe 1	
				Werkstoff/material: Material <nicht festgelegt>	
				Benennung / part name: Madita - abnehmbarer Rücken	
				Zeichnungsnummer / drawing number	
				A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight: 2567.24	MASSSTAB: 1:1
				BLATT 1 VON 1	

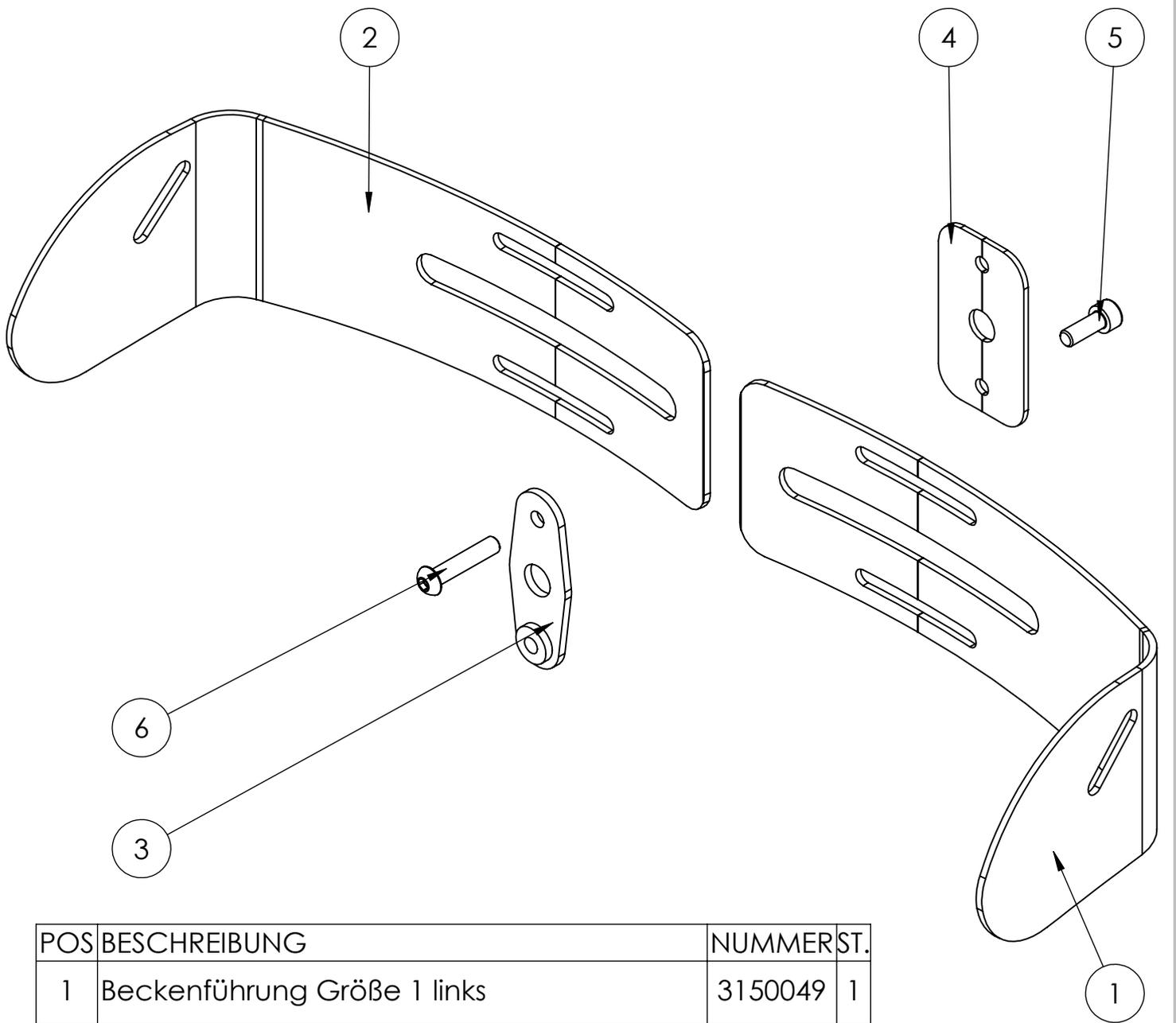

POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Beckenführung Größe 1 links	3150049	1
2	Beckenführung Größe 1 Rechts	3150050	1
3	Beckenführung Fixierung	3151002	1
4	Distanzblech für Beckenführung	3191078	1
5	Inskt.Schr. ISO 4762 8.8 M 6 x 16 galv. verzinkt	070521	1
6	Innenskt.Schr. ISO 10642 A2 M 6 x 30	314350	1


Produkt/product: verwendet in		Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx		z.B. Oberflächen, Körperkanten		Dateiname/filename: Madita einstellbare Beckenführung Größe 1	
						Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
						Benennung / part name: Madita einstellbare Beckenführung Größe 1	
						Zeichnungsnummer / drawing number XXX	
				Schuchmann GmbH & Co. KG		A4	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight: 169,00		MASSSTAB: 1:1	
						BLATT 1 VON 1	

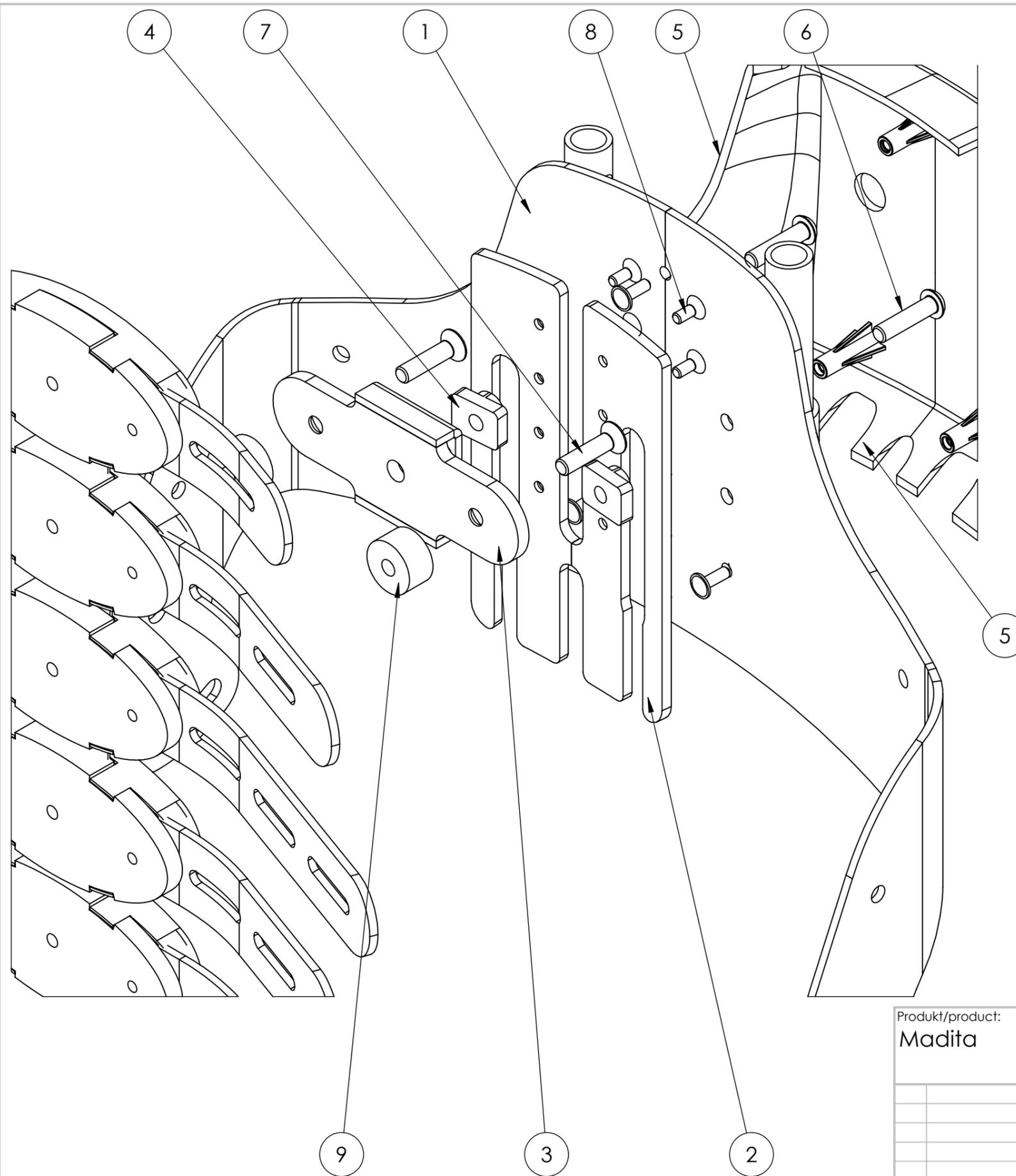

POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Madita Beckenblech Gr1	3151029	1
2	TARTA Führungsblech	3195042	1
3	TARTA Halter	3195043	1
4	Nutstein 20x15x8	3195041	2
5	Beckenblechabdeckung TARTA Rücken	3150041	1
6	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 25	316166	2
7	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 6 x 25 galv. verzinkt	150791	2
8	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 4 x 10 galv. verzinkt	150231	4
9	Distanzhülse aus PE für Tarta Adapter	3195175	2

**Pos 01 muss gebohrt werden
 Beckenpolster fällt weg
 Rückenpolster fällt weg
 Beckenführung nicht möglich
 Thoraxpelotte nicht möglich**


Produkt/product: Madita		Toleranzen/tolerance		Dateiname/filename: Madita Größe 1 Adapter für TARTA Rückensystem	
				Werkstoff/material: Material <nicht festgelegt>	
		Datum gez. 30.04.2014		Name TE	
				Benennung / part name: Madita Adapter für TARTA Rückensystem	
		Schuchmann GmbH & Co. KG		Zeichnungsnummer / drawing number A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight: 3207.67	MASSSTAB: 1:1
				BLATT 1 VON 1	

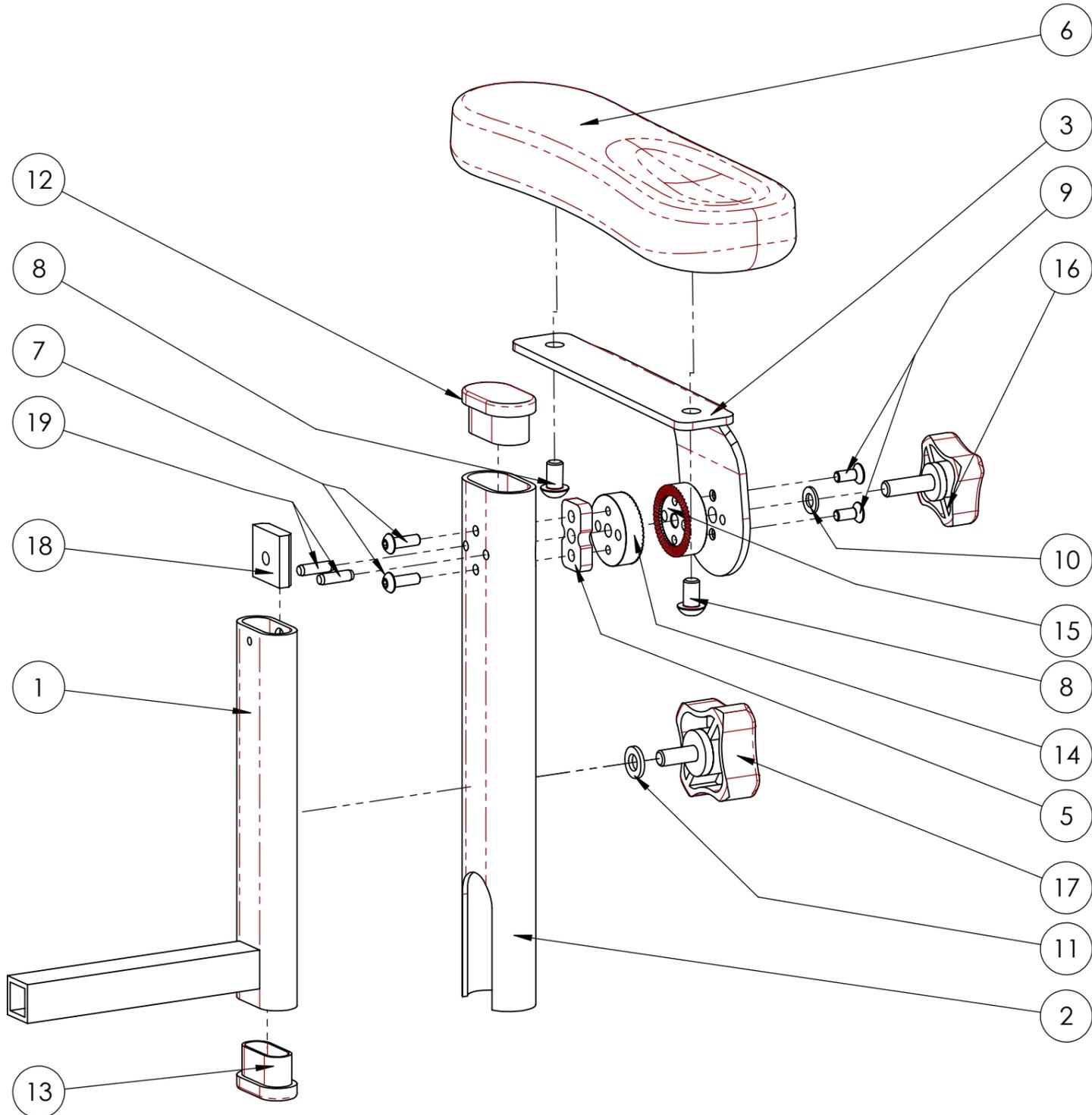

POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Armlehnenhalter Innenrohr	3191018	2
2	Armlehnenhalter Aussenrohr Ø27,5	3191019	2
3	Halteblech Armlehne rechts	3195031	1
4	Halteblech Armlehne Links	3195030	1
5	Distanzstück Armlehne	3191021	2
6	Armlehnenpolster Gr1	3191002	2
7	SHR-ISO7380-1-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X12	8290308	4
8	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 10	316155	4
9	Innenskt.Schr. ISO 10642 010.9M 4 x 10 galv. verzinkt	153011	4
10	Scheiben ISO 7089 5 galv. verzinkt	500661	2
11	Scheiben ISO 7089 6 galv. verzinkt	500671	2
12	Stopfen mit Lamellen 35x20 oval schwarz	9090109	2
13	Lamellenstopfen 30x15 halboval	9090036	2
14	Rasterscheibe mit Senkung D27 FORM C	3191095	2
15	Rasterscheibe mit Senkung D27 FORM D	3191096	2
16	Viersterngriff, flach M5x20	9090152	2
17	Sterngriffschraube M6x15	9090093	2
18	Kulissenstein	3093015	2
19	Zylinderstifte geh. DIN 6325 4M6 x 14 mm	843117	4

Hier dargestellt: Rechte Hand
 Bei der Linken Seite wird POS 3 durch Pos 4 "31-95-030 Halteblech Armlehne Links" ersetzt
 Alle anderen Teile sind gleich.

Produkt/product: Madita		Toleranzen/tolerance -		Dateiname/filename: Armlehnen mit Halter Größe 1	
				Werkstoff/material: Material <nicht festgelegt>	
		Datum gez. 30.04.2014		Name TE	
				Benennung / part name: Armlehnen mit Halter Größe 1	
		Schuchmann GmbH & Co. KG		Zeichnungsnummer / drawing number XXX	
				A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight:1450,71	MASSSTAB:1:1
				BLATT 1 VON 1	

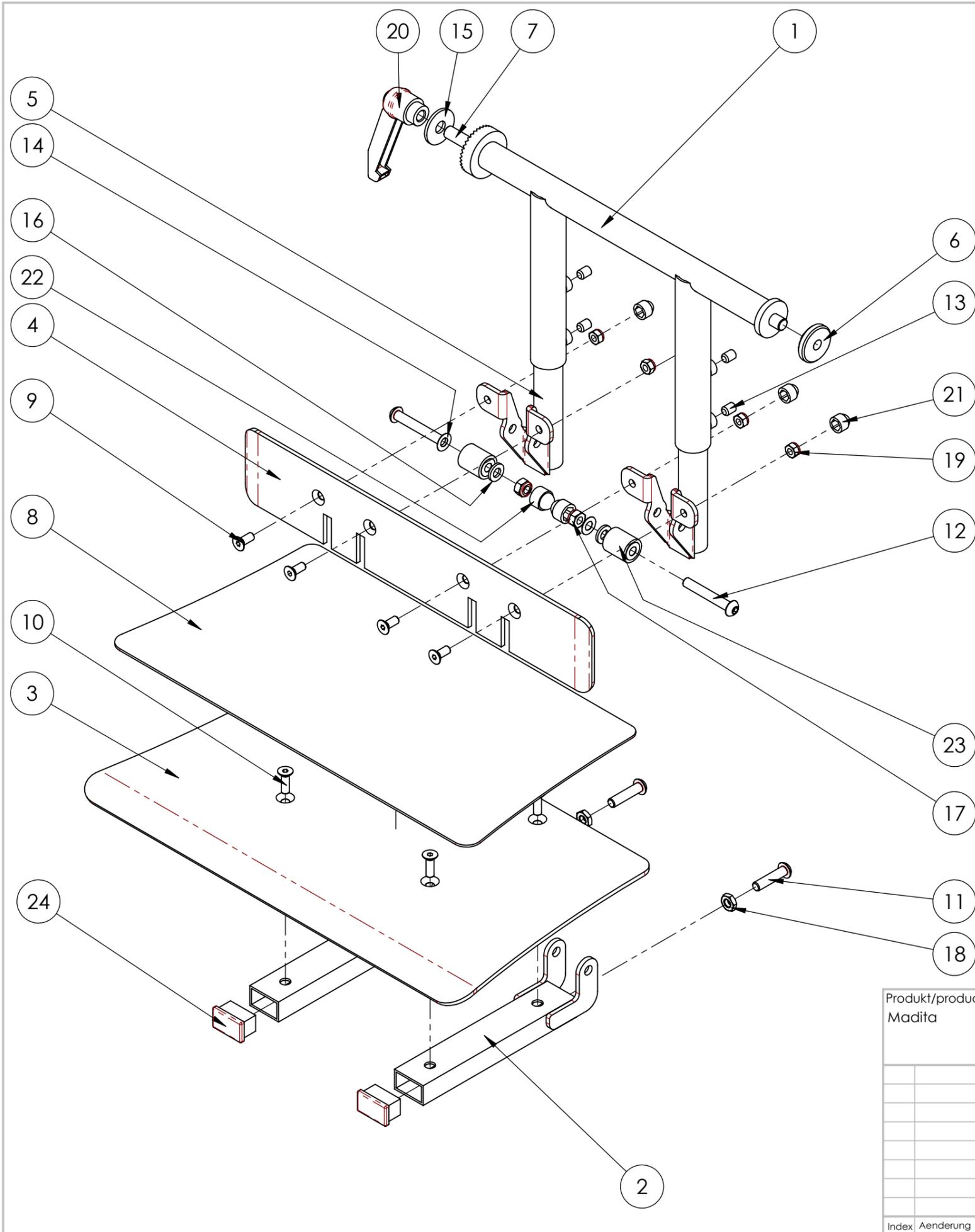


POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Fußbank Schweißbaugruppe Aussenrohr Gr1	3191031	1
2	Fußbankträger Größe 0-2	3195032	2
3	Fussbank Größe 1	3191028	1
4	Fersenplatte Alu Gr1	3191030	1
5	Fußbank Innenrohr Gr. 1 KTL	3191097	2
6	Klemmstück	3093007	1
7	Gewindestange M8 - 293mm	504651	1
8	Gummiauflage Fußbank Größe 1	3191100	1
9	Innenskt.Schr. ISO 10642 010.9M 5 x 12 galv. verzinkt	150441	4
10	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 5 x 16 galv. verzinkt	150461	4
11	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 25	316166	2
12	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 40	316178	2
13	Gewindestifte ISO 4026 H45 M 6 x 8 galv. verzinkt	120621	4
14	Passscheibe DIN 988 A2 6x12x0,25	3190004	4
15	Scheiben DIN 9021 8,4 galv. verzinkt	511471	1
16	Scheiben ISO 7089 6 galv. verzinkt	500671	2
17	Sicherungsmutter DIN 985 N M 6 verzinkt	480030	2
18	Sechskantmuttern ISO 4035 04 BM 6 galv. verzinkt	163031	2
19	Sicherungsmutter DIN 985 N M 5 verzinkt	480020	4
20	Klemmhebel mit Innengewinde M8	9090078	1
21	Schutzkappe für Sechskantmuttern für M5	9090029	4
22	Schutzkappe für Sechskantmuttern für M6	9090030	2
23	Distanzhülse 16x6,2x18	3195033	2
24	Kunststoffendkappe für Vierkant 25x15	9090139	2

Produkt/product: Madita		Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx		z.B. Oberflächen, Körperkanten		Dateiname/filename: Madita Fussbank Größe 1	
						Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
						Benennung / part name: Madita Fußbank Größe 1	
						Zeichnungsnummer / drawing number xxx	
						A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight: 1911.82		MASSSTAB: 1:1	
						BLATT 1 VON 1	


**Schuchmann
GmbH & Co. KG**

Teil 3190095 wird hierdurch ersetzt

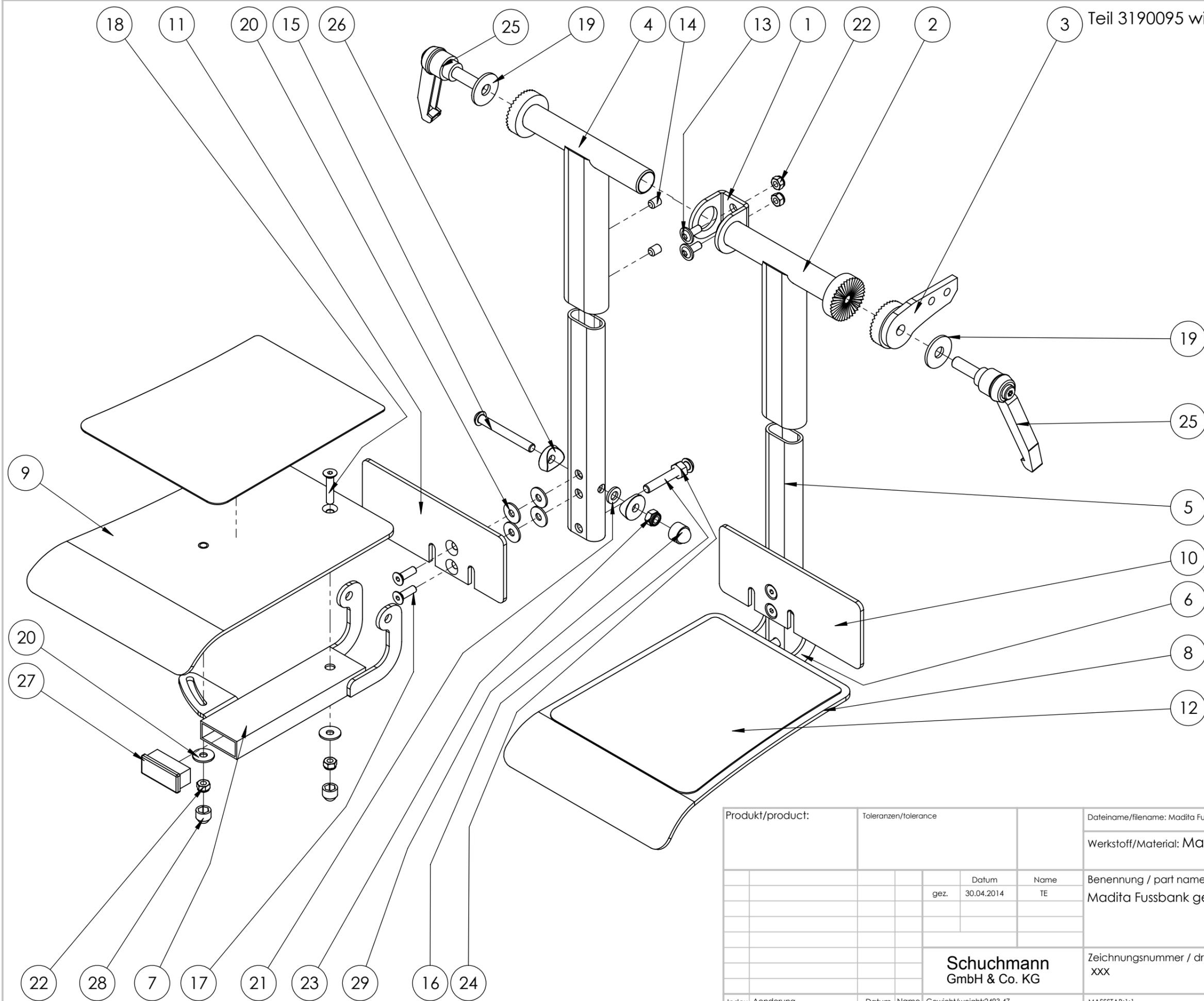


Produkt/product:		Toleranzen/tolerance		Dateiname/filename: Madita Fussbank geteilt Größe 1	
				Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
		Datum gez. 30.04.2014		Name TE	
				Benennung / part name: Madita Fussbank geteilt Größe 1	
				Zeichnungsnummer / drawing number XXX	
				A3	
Index Aenderung		Datum Name		Gewicht/weight: 2493.47	
				MASSSTAB: 1:1	
				BLATT 1 VON 2	

POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Achsaufnahme geteilte Fussbank Gr 0-2	3191048	1
2	Geteilte Fußbank Aussenrohr Gr1 Links	3190099	1
3	Befestigung geteilte Fußbank Gr 0-2 links mit Raster	3191125	1
4	Geteilte Fußbank Aussenrohr Gr1 Rechts	3190100	1
5	Geteilte Fußbank Innenrohr Gr1	3191049	2
6	Träger geteilte Fußbank Gr 0-2 Links	3191117	1
7	Träger geteilte Fußbank Gr 0-2 Rechts	3191118	1
8	Fussbank geteilt Größe 1 Links	3190108	1
9	Fussbank geteilt Größe 1 Rechts	3190109	1
10	Fersenplatte Größe 1 geteilt Links	3191119	1
11	Fersenplatte Größe 1 geteilt Rechts	3191120	1
12	Gummimatte Fußbank geteilt Gr. 1 Paar, Madita	3191101	1
13	Linsenflanschkopfschr. 10.9 AM 5 x 12 galv. verzinkt SB	155788	2
14	Gewindestifte ISO 4026 H45 M 6 x 8 galv. verzinkt	120621	4
15	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 50	316185	2
16	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 40	316178	2
17	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 5 x 16 galv. verzinkt	150461	4
18	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 5 x 25 galv. verzinkt	150501	2
19	Scheiben DIN 9021 8,4 galv. verzinkt	511471	2
20	Scheiben ISO 7089 5 galv. verzinkt	500661	12
21	Scheiben ISO 7089 6 galv. verzinkt	500671	2
22	Sicherungsmutter DIN 985 N M 5 verzinkt	480020	6
23	Sicherungsmutter DIN 985 N M 6 verzinkt	480030	2
24	Sechskt.-Mutter DIN 934 A2 M 6	292040	2
25	Klemmhebel M8x25	9090083	2
26	Sattelscheibe EMICO 1020200599	2594050	4
27	Kunststoffendkappen für Vierkant 35x15	9090015	2
28	Schutzkappe für Sechskantmuttern für M5	9090029	4
29	Schutzkappe für Sechskantmuttern für M6	9090030	2

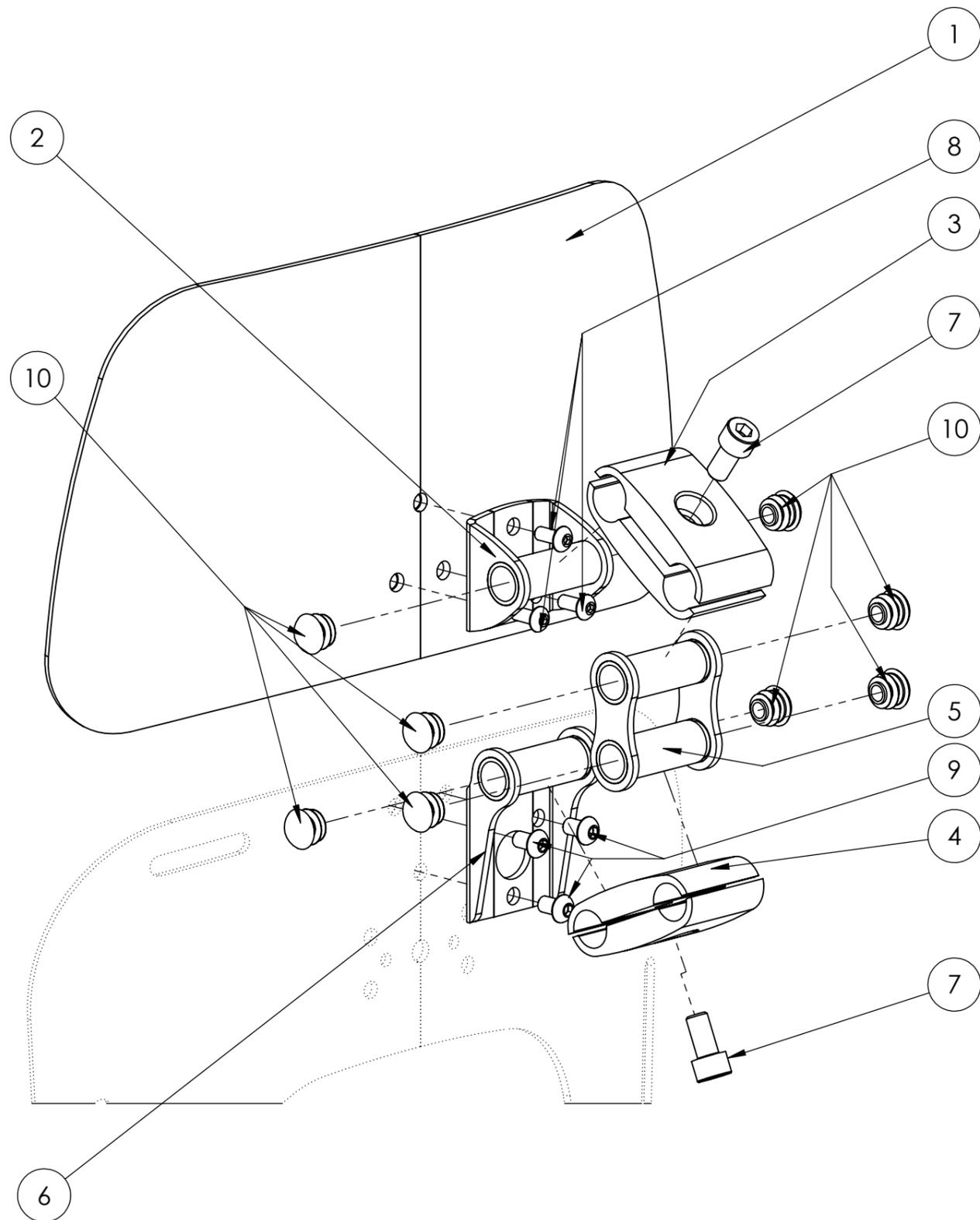


POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	St.
1	Kopfstützenblech Größe 1	3191038	1
2	Befestigung Kopfstützenblech	3195021	1
3	Klemmteil mit Sacklochbohrung	3191116	2
4	Klemmteil mit Gewinde	3191116	2
5	Zwischenteil für Kopfstütze	3190023	1
6	Rückenblechbefestigung für Kopfstütze	3190022	1
7	Inskt.Schr. ISO 4762 8.8 M 8 x 16 galv. verzinkt	070721	2
8	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 5 x 12	316106	3
9	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 10	316155	3
10	Lamellenstopfen GPE SFL 15 G	9090144	8

Produkt/product: Madita		Toleranzen/tolerance		Dateiname/filename: Standard Kopfstütze mit Halter Größe 1	
				Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
		Datum gez. 30.04.2014		Name TE	
				Benennung / part name: Standard Kopfstütze mit Halter Größe 1 Größe 1	
				Zeichnungsnummer / drawing number xxx	
				A3	
Index Aenderung		Datum Name		Gewicht/weight: 1428.85	
				MASSSTAB: 1:5	
				BLATT 1 VON 1	

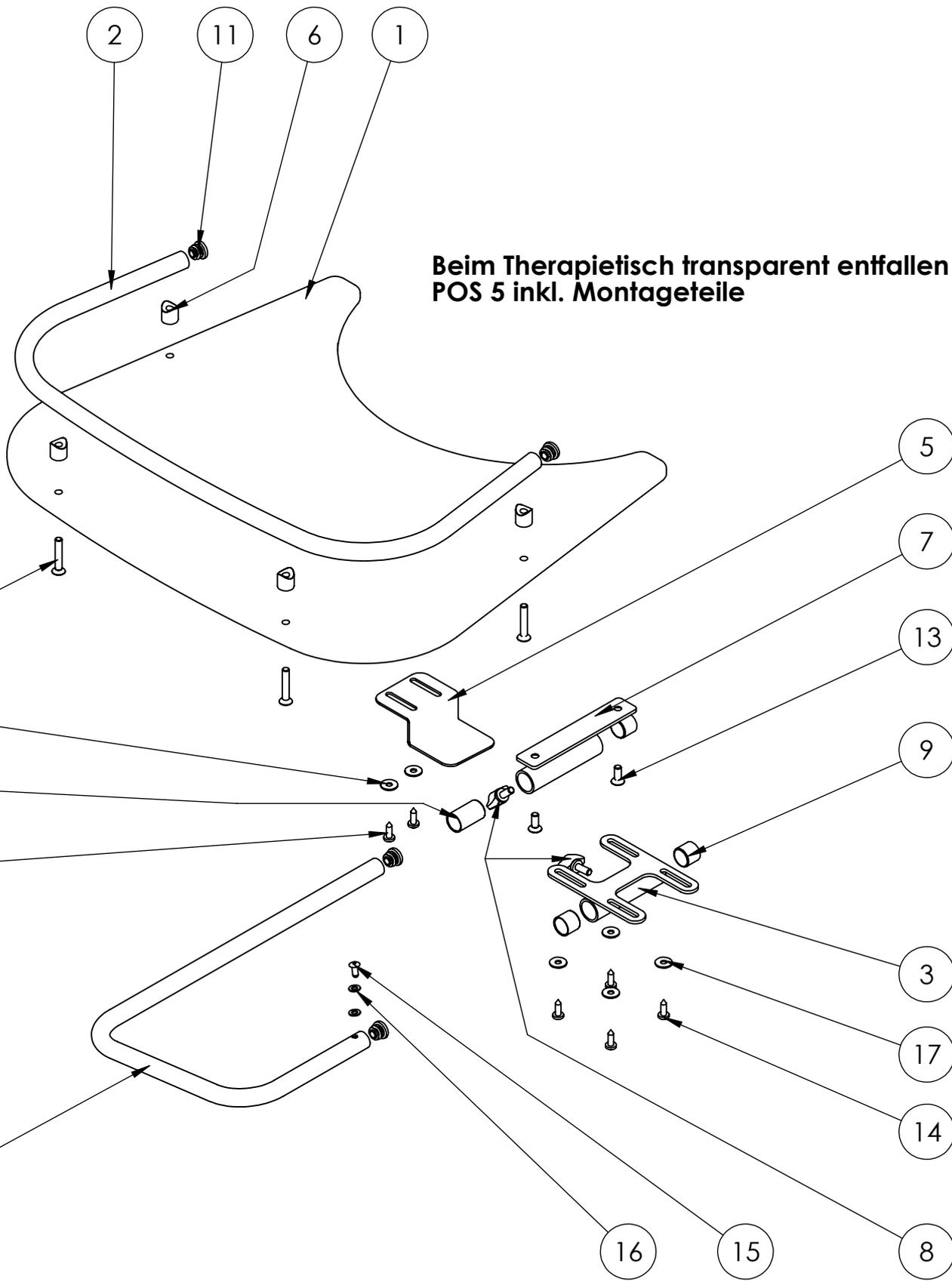


Produkt/product: Madita		Toleranzen/tolerance		Dateiname/filename: Madita Tisch Größe 1	
				Werkstoff/material: Material <nicht festgelegt>	
			Datum gez. 30.04.2014	Name TE	Benennung / part name: Tisch Komplett Größe 1
				Zeichnungsnummer / drawing number -	
				A4	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight:2635.10	MASSSTAB:1:5
				BLATT 1 VON 2	

POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Therapietisch Gr. 0+1	3191054	1
2	Tischumrandung Größe 1	3191055	1
3	Halteplatte	3191057	1
4	Rohrbügel Größe 1	3191059	1
5	Tisch Klemmblech	3191060	1
6	Kunststoff-Distanzstück schwarz, 12,5mm	3195040	4
7	Tischrohr Aufnahme	3191058	1
8	Novo Grip Miniwing M6x15	9090040	2
9	igus GSM-1618-15	3195026	3
10	igus GLWSM-1618-30	3195025	1
11	Kunststoffendkappe für Rundrohre Ø16	9090024	4
12	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 5 x 35 galv. verzinkt	150521	4
13	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 6 x 16 galv. verzinkt	150751	2
14	Blechschr. DIN 7981 verzinkt C 4,8 x 16	265620	6
15	DIN7337 A 4,8 x 9,3 FK	8990004	1
16	Scheiben ISO 7089 5 galv. verzinkt	500661	2
17	Scheiben DIN 9021 5,3 galv. verzinkt	511441	6

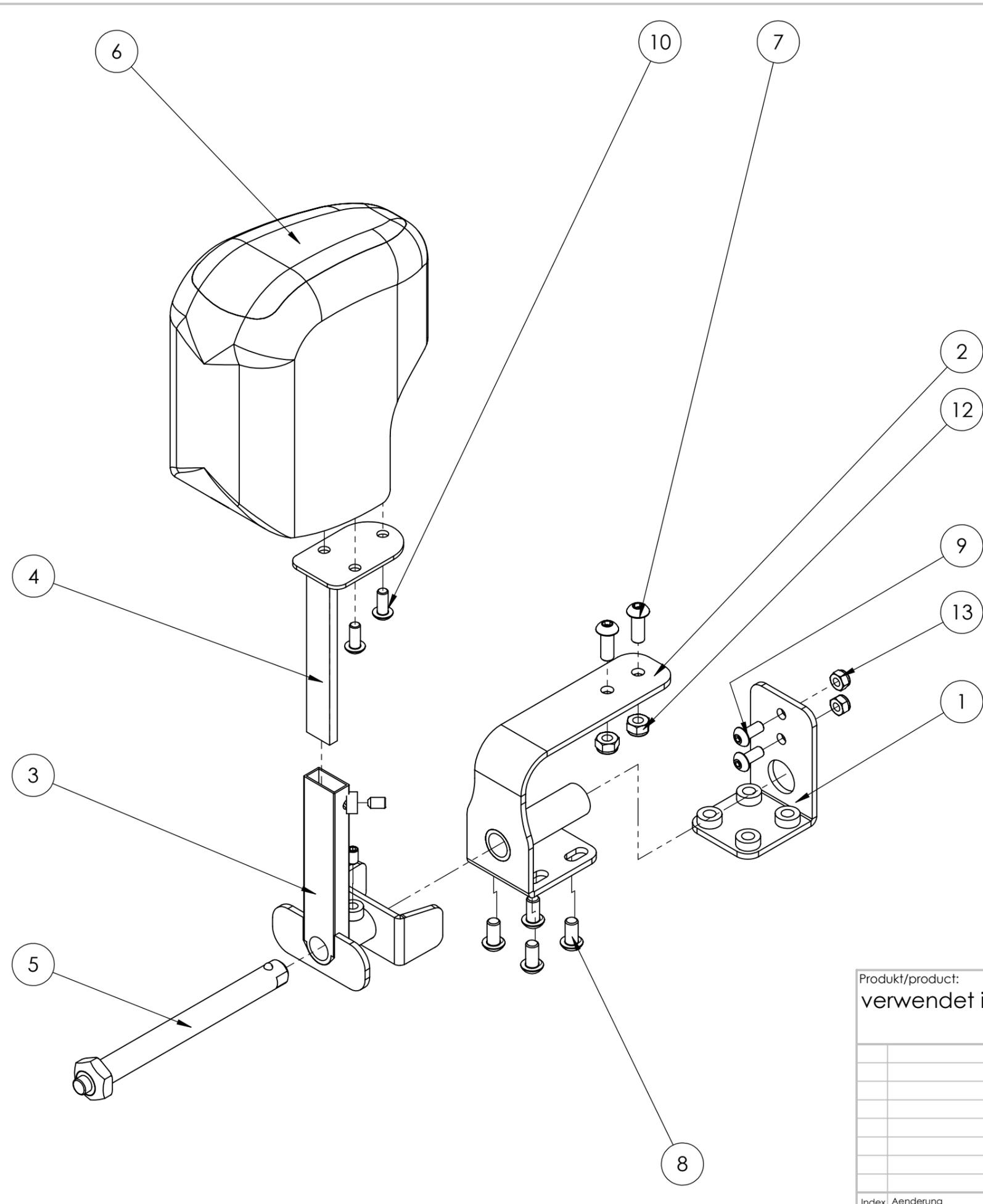

Pos	Art-Nr.	Bez_1	St
1	3195039	Abduktionsblockhalter Abstützblech Gr. 0-2	1
2	3195038	Aufnahme für Steckachse	1
3	3195037	Aufnahme für Höhenverstellung	1
4	3150030	Höhenverstellung Gr. 1+2	1
5	3190019	Steckachse für Abduktionsblockhalter 12mm x 85mm	1
6	7391317	Abduktionsblock Größe 1 inkl. Polster	1
7	316158	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 16	2
8	150731	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 6 x 12	4
9	316106	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 5 x 12	2
10	155787	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 5 x 10	3
11	120381	Gewindestifte ISO 4026 H45 M 5 x 8 galv. verzinkt	2
12	480030	Sicherungsmutter DIN 985 N M 6 verzinkt	2
13	480020	Sicherungsmutter DIN 985 N M 5 verzinkt	2


Produkt/product: verwendet in		Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx	z.B. Oberflaechen, Koerperkanten	Dateiname/filename: Abduktionsblock Größe 1 mit Halter	
				Werkstoff/material: Material <nicht festgelegt>	
		Datum gez. 30.04.2014	Name TE	Benennung / part name: Abduktionsblock Größe 1 mit Halter	
		Schuchmann GmbH & Co. KG		Zeichnungsnummer / drawing number XXX	
				A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight: 1370.67	MASSSTAB: 1:10
				BLATT 1 VON 1	

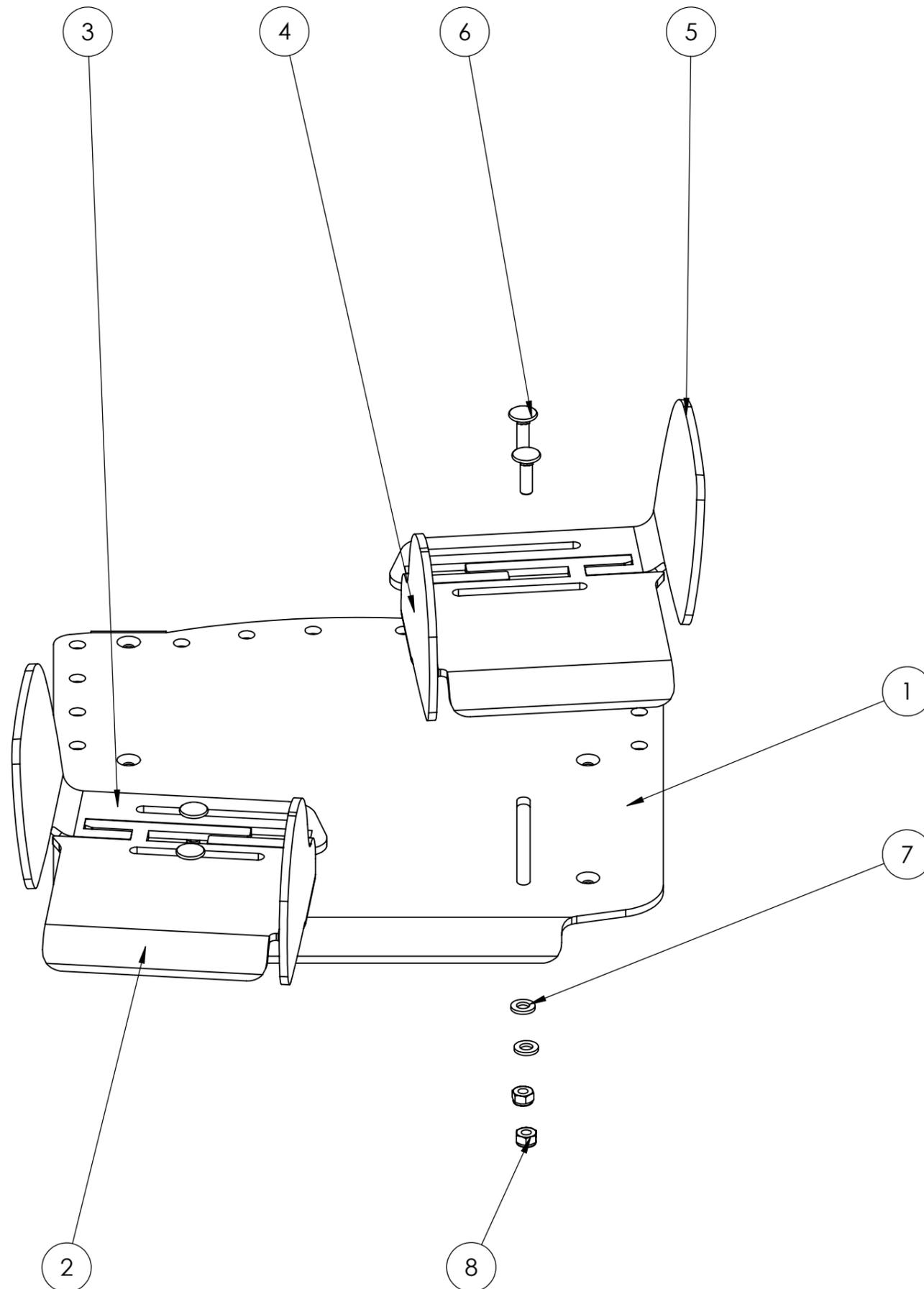

POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Sitzblech Gr.1 abduzierbare Sitzfläche	3150056	1
2	Innenblech Rechts Gr.1 für abduzierbare Sitzfläche	3150060	1
3	Außenblech Rechts Gr.1 für abduzierbare Sitzfläche	3150058	1
4	Neopolen Außenblech Links Größe 1	8890014	1
5	Verbundschaum Außenblech Links Größe 1	8890004	1
6	Weichschaum Außenblech Links Größe 1	8890007	1
7	Neopolen Innenblech Links Größe 1	8890014	1
8	Verbundschaum Innenblech Links Größe 1	8890004	1
9	Weichschaum Innenblech Links Größe 1	8890007	1
10	Innenblech Links Gr.1 für abduzierbare Sitzfläche	3150059	1
11	Außenblech Links Gr.1 für abduzierbare Sitzfläche	3150057	1
12	ISO 8678-M6x20-15-N	016021	4
13	Scheiben ISO 7089 6 galv. verzinkt	500671	4
14	Sicherungsmutter DIN 985 N M 6 verzinkt	480030	4


Produkt/product: Madita		Toleranzen/tolerance -		Dateiname/filename: Madita Abduzierbare Beinführung Größe 1	
				Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
		Datum gez. 30.04.2014		Name TE	
				Benennung / part name: Madita Abduzierbare Beinführung Größe 1	
		Schuchmann GmbH & Co. KG		Zeichnungsnummer / drawing number xxx	
				A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight: 1737.76	MASSSTAB: 1:1
				BLATT 1 VON 1	

POS	BESCHREIBUNG	NUMMER	ST.
1	Beinpelottenhalter Rechts	3191122	1
2	Beinpelottenhalter Links	3191121	1
3	Klemmstück Oberschenkelführung	3191067	2
4	Beinpelotte Gr 2 rechts	xxx	1
5	Beinpelotte Gr 2 links	xxx	1
6	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 5 x 10	316105	10
7	Scheiben DIN 9021 5,3 galv. verzinkt	511441	6

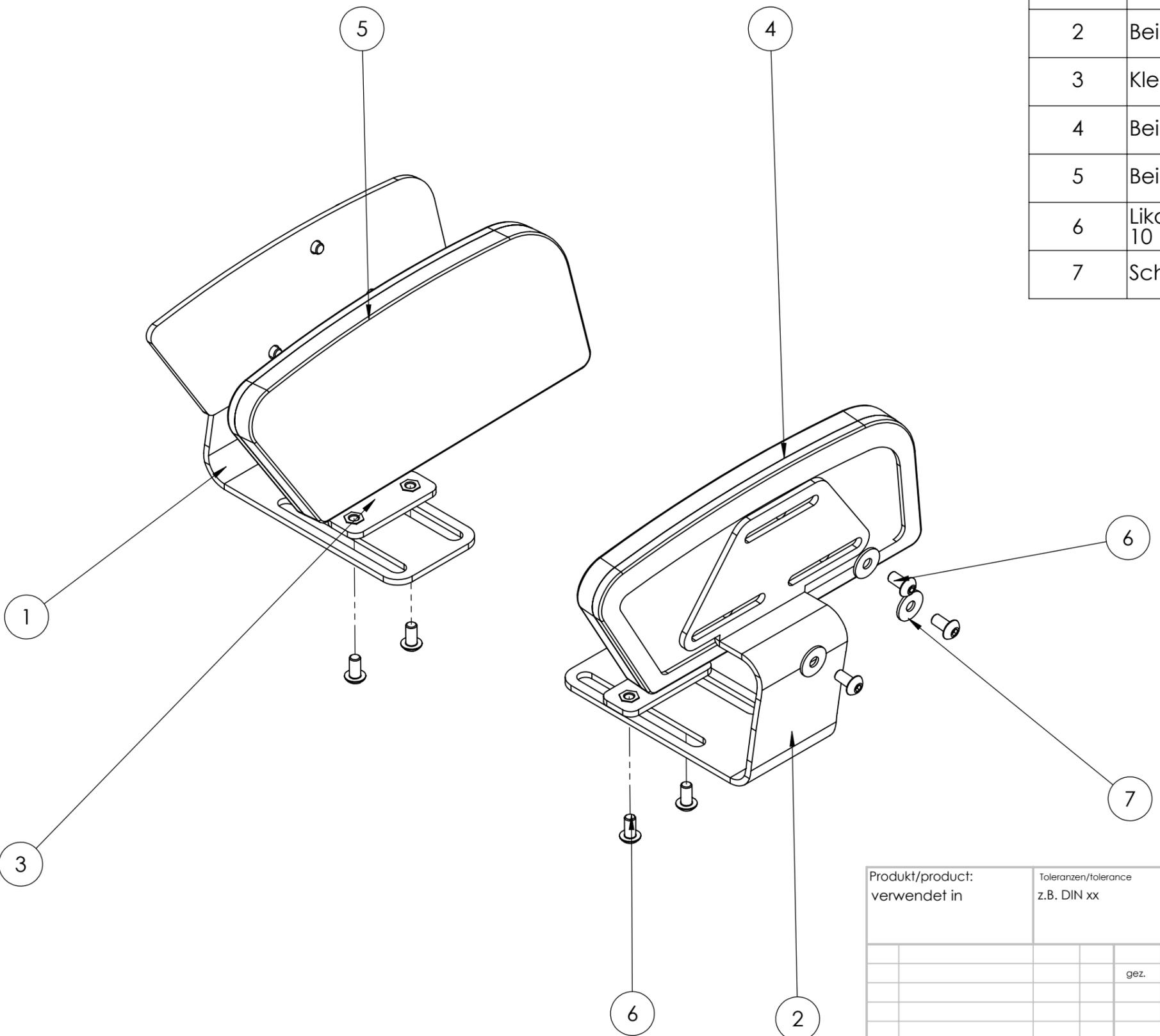

Produkt/product: verwendet in	Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx	z.B. Oberflaechen, Koerperkanten	Dateiname/filename: Madita Beinpelotte mit Halter Größe 2			
			Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>			
			Benennung / part name: Beinpelotten mit Halter Größe 2			
			Zeichnungsnummer / drawing number xxx			
			A3			
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight: 791.85	MASSSTAB: 1:1	BLATT 1 VON 1


Schuchmann
GmbH & Co. KG

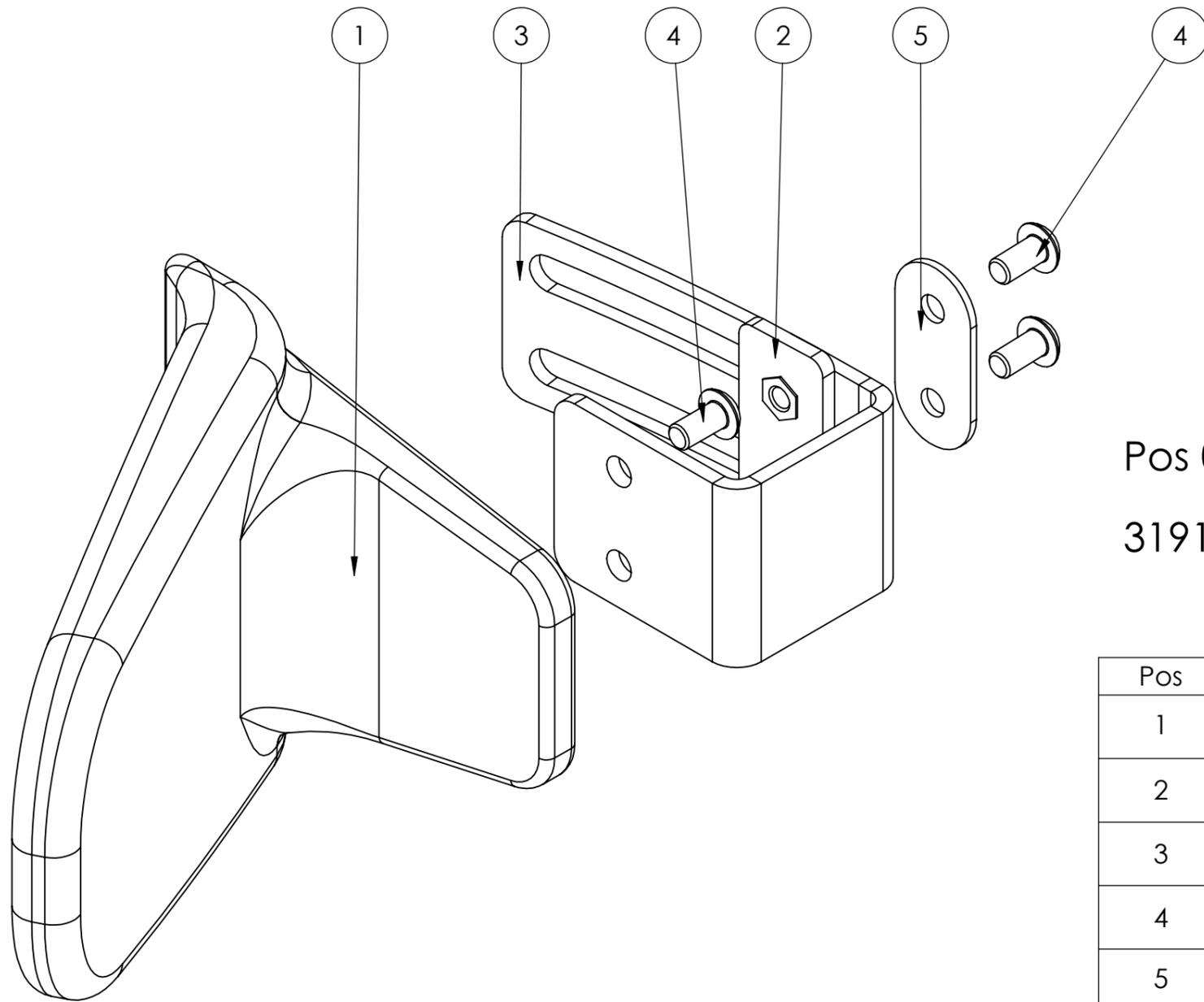

Pos 03 wird bei Oberarmführung ersetzt durch
3191072 Pelottenhalteblech Oberarmführung

Pos	Art-Nr.	Bez_1	St
1	xxx	Seitenpelotte Gr1	1
2	3191024	Pelottenklemmstück	1
3	3191014	Pelottenhalteblech schmal	1
4	316105	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 5 x 10	4
5	3191040	Unterlegscheibe Seitenpelotten	1


Produkt/product: verwendet in		Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx		z.B. Oberflächen, Körperkanten		Dateiname/filename: Seitenpelotte mit Halter schmal Größe 1	
						Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
				Datum gez. Datum		Name Name	
						Benennung / part name: Seitenpelotte mit Halter schmal Größe 1	
				Schuchmann GmbH & Co. KG		Zeichnungsnummer / drawing number xxx	
						A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight:352.71		MASSSTAB:1:1	BLATT 1 VON 1

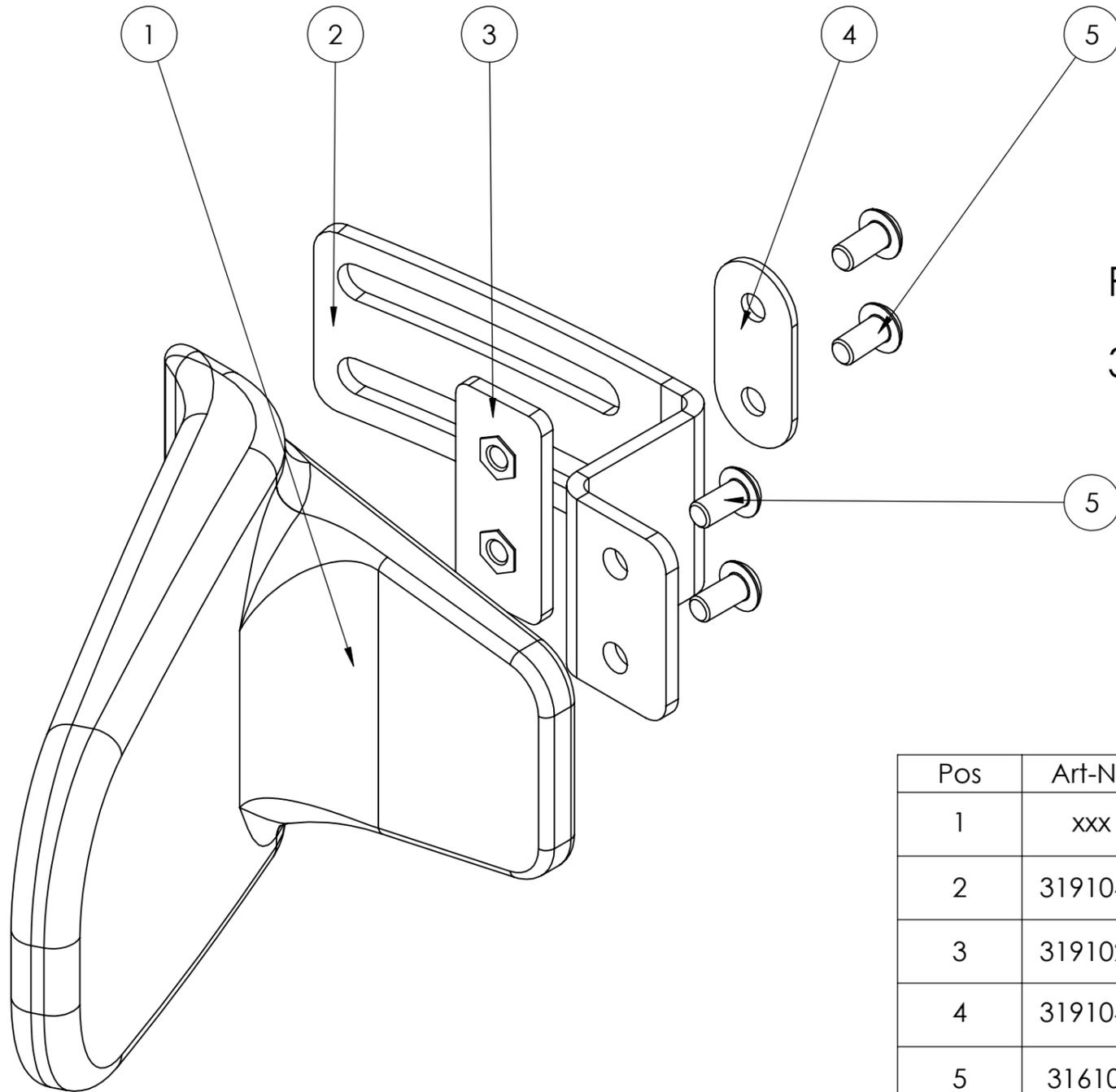

Pos 02 wird bei Oberarmführung ersetzt durch
3191073 Pelottenhalteblech breit Oberarmführung

Pos	Art-Nr.	Bez_1	breit innen/MENGE
1	xxx	Seitenpelotte Gr1	1
2	3191042	Pelottenhalteblech breit	1
3	3191024	Pelottenklemmstück	1
4	3191040	Unterlegscheibe Seitenpelotten	1
5	316105	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 5 x 10	4

Produkt/product: verwendet in		Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx		z.B. Oberflaechen, Koerperkanten		Dateiname/filename: Seitenpelotte mit Halter weit Größe 1	
						Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
						Benennung / part name: Seitenpelotte mit Halter weit Größe 1	
						Zeichnungsnummer / drawing number xxx	
				Schuchmann GmbH & Co. KG		A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight:332.95		MASSSTAB:1:1	BLATT 1 VON 1

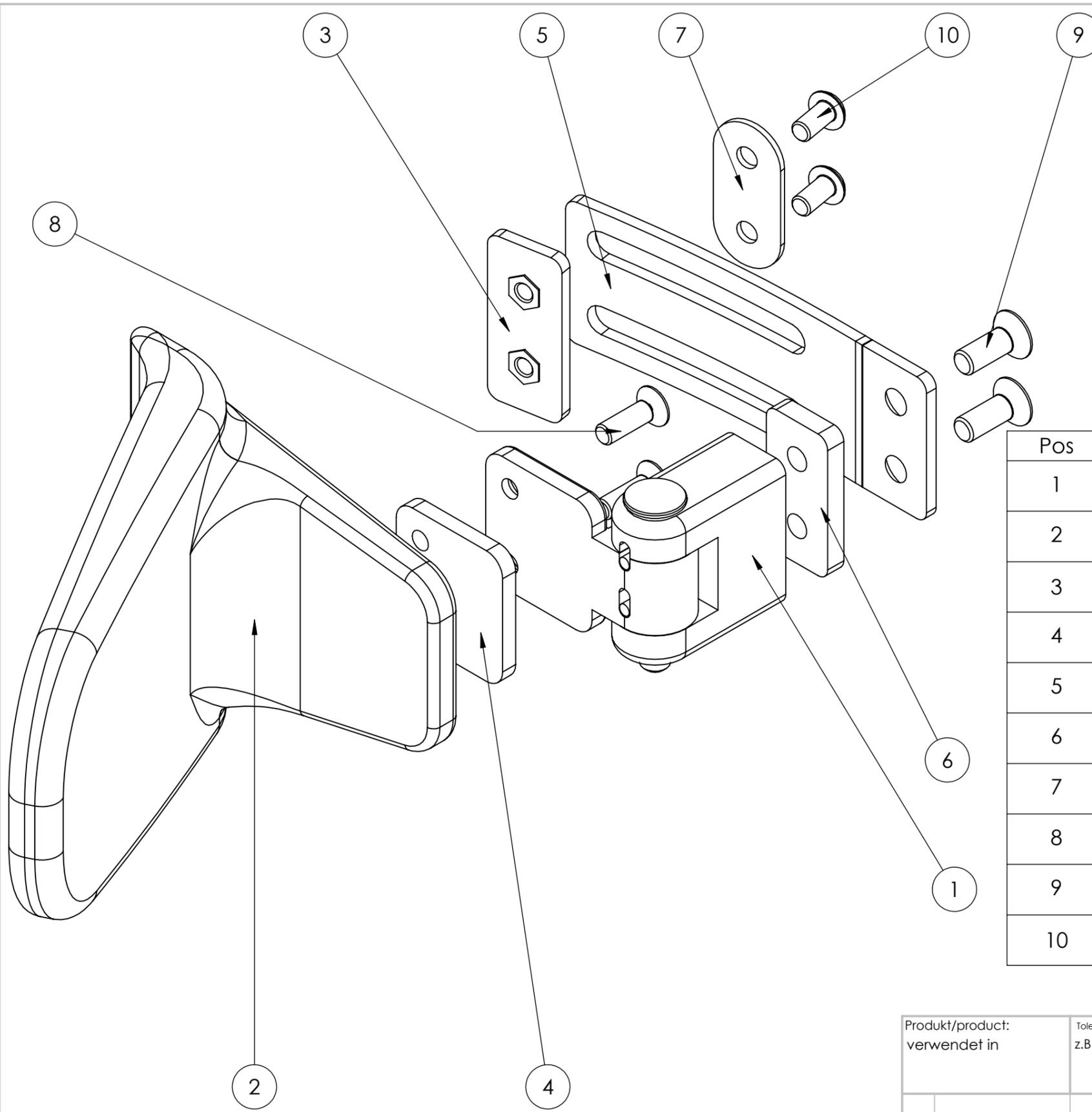


Pos 05 bei Oberarmführung tauschen mit
3191076 Pelottenhalteblech klappbar
Oberarmführung

Pos	Art-Nr.	Bez_1	St
1	3191123	Klappgelenk Thoraxpelotte links	1
2	xxx	Seitenpelotte Gr1	1
3	3191024	Pelottenklemmstück	1
4	3191075	Abstandsblech Klappgelenk schmal	1
5	3191065	Pelottenhalteblech klappbar	1
6	3191074	Abstandsblech Klappgelenk	1
7	3191040	Unterlegscheibe Seitenpelotten	1
8	150461	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 5 x 16 galv. verzinkt	2
9	150751	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 6 x 16 galv. verzinkt	2
10	316105	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 5 x 10	2

Produkt/product: verwendet in	Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx	z.B. Oberflaechen, Koerperkanten	Dateiname/filename: Abklappbare Pelotten schmal Größe 1	
			Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
			Benennung / part name: Abklappbare Pelotte Schmal Größe 1	
			Zeichnungsnummer / drawing number xxx	
			A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight:404.25
				MASSSTAB:1:1
				BLATT 1 VON 1

Schuchmann
GmbH & Co. KG

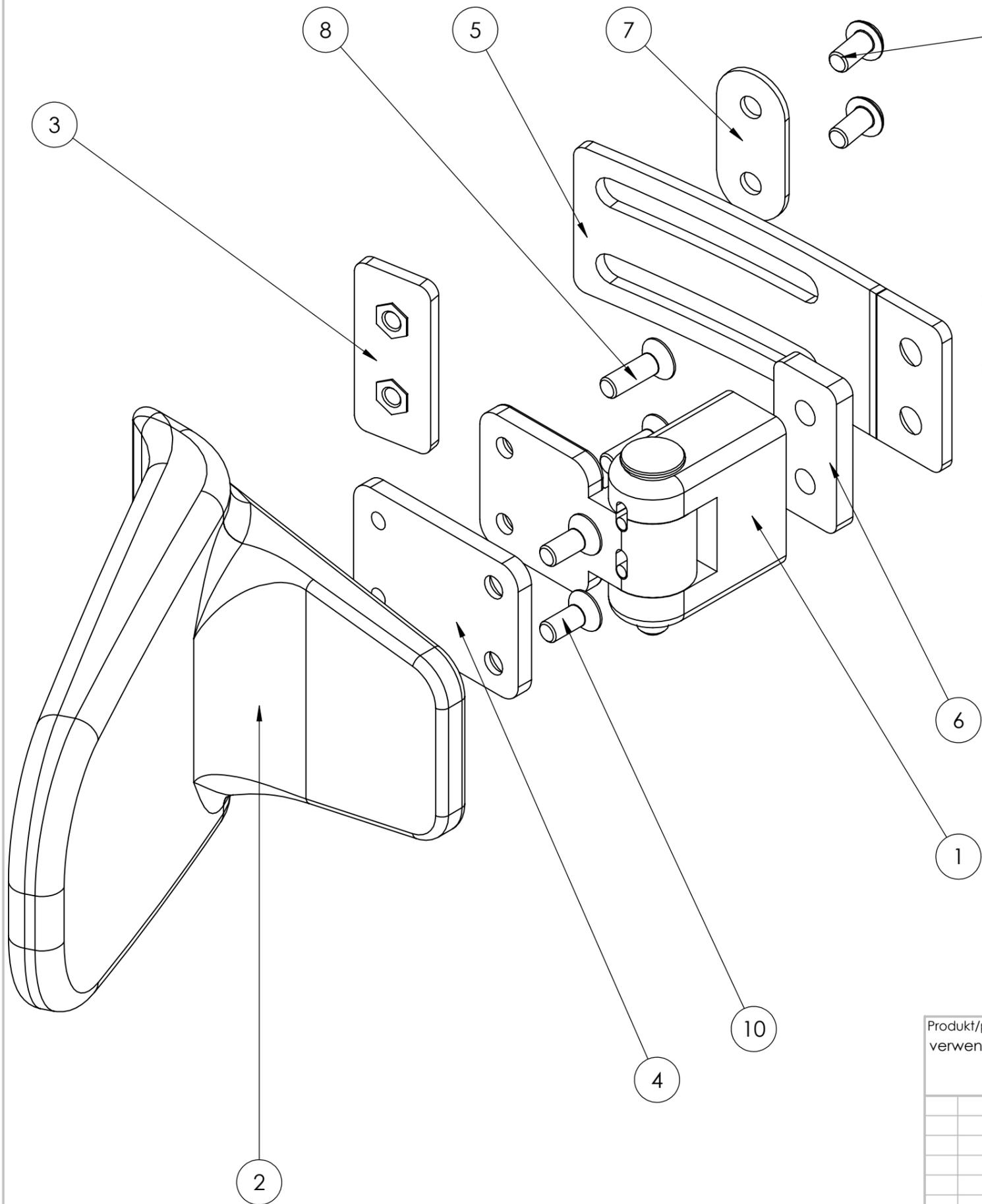

Größe 1:
 Pos 01 bei Oberarmführung ersetzen mit 9190005 Klappgelenk Thoraxpelotte 180°
 Pos 02 wird durch eine bearbeitete Thoraxpelotte mit vernietetem Halter (3191102) getauscht
 Pos 04 entfällt
 Pos 05 wird durch 3191076 Pelottenhalteblech klappbar Oberarmführung ersetzt

Pos	Art-Nr.	Bez_1	St
1	3191123	Klappgelenk Thoraxpelotte links	1
2	xxx	Seitenpelotte Gr1	1
3	3191024	Pelottenklemmstück	1
4	3191066	Adapter Thoraxpelotte weit	1
5	3191065	Pelottenhalteblech klappbar	1
6	3191074	Abstandsblech Klappgelenk	1
7	3191040	Unterlegscheibe Seitenpelotten	1
8	150461	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 5 x 16 galv. verzinkt	2
9	150751	Innenskt.Schr. ISO 10642 08.8 M 6 x 16 galv. verzinkt	2
10	150441	Innenskt.Schr. ISO 10642 010.9M 5 x 12 galv. verzinkt	2
11	316105	Likoschr.Inn.Skt.ISO 7380-1 A2 M 5 x 10	2

Produkt/product: verwendet in		Toleranzen/tolerance z.B. DIN xx		z.B. Oberflaechen, Koerperkanten		Dateiname/filename: Abklappbare Pelotten weit Größe 1	
						Werkstoff/Material: Material <nicht festgelegt>	
						Benennung / part name: Thoraxpelotte Oberarmführung weit	
						Zeichnungsnummer / drawing number xxx	
				Schuchmann GmbH & Co. KG		A3	
Index	Aenderung	Datum	Name	Gewicht/weight:443.55		MASSSTAB:1:1	BLATT 1 VON 1