

FOKA™

HAMACA DE BAÑO



Manual de usuario



¡ATENCIÓN! El fabricante se responsabiliza del uso correcto del dispositivo solo cuando el producto ha sido comprado por un especialista calificado en el distribuidor oficial.

¡ATENCIÓN! REH4MAT se reserva el derecho de introducir cambios técnicos y comerciales en el contenido de las instrucciones sin previo aviso.

Producto médico de primera clase según el Reglamento 93/42 / EWG del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos médicos y con el Acto de Ley de 20 de mayo de 2010 sobre dispositivos médicos (Dz. U. 2010 nr 107 poz 679)

**EMPRESA CON SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO POR DNV GL**

= ISO 13485 =



CONTENIDO

1. El propósito del manual de usuario	5
2. Indicaciones de uso.....	5
3. Características generales del asiento de baño para niños.	6
3.1. Equipamiento estándar.....	6
3.2. Equipamiento adicional	6
4. Tabla de tallas	7
5. Descripción detallada de cómo aplicar la tapicería de tumbona.....	8
6. El ajuste de la hamaca de baño para niños.....	12
7. Cómo ajustar el cojín Bodymap en la hamaca de baño para niños	17
8. Uso de la hamaca de baño para niños.	20
9. Reglas de seguridad	21
10. Mantenimiento y limpieza.	23



INTRODUCCIÓN

La hamaca de baño infantil **FOKA™** es muy útil al cuidar a niños discapacitados. El uso del producto hace que el baño sea más fácil por el hecho de que el niño está asegurado y así no puede sufrir ninguna lesión. Además, los padres pueden realizar todas las actividades de baño por sí solos. El niño se adapta a una posición estable y cómoda gracias a la cual es más fácil bañarse.

La hamaca de baño infantil **FOKA™** está hecha de tubos de aluminio y su construcción es neutral para la influencia nociva del agua. También está equipada con un ajuste del ángulo de inclinación con respecto al reposapiés, el asiento y el respaldo, lo que permite ajustar el producto a las necesidades del niño.

La tapicería está hecha de una red de poliamida que no absorbe la influencia del agua. También está equipada con un soporte ajustable para la cabeza, el tronco y los pies que protege al niño cuando experimenta movimientos involuntarios. La construcción del producto es simple, lo que hace que el producto sea fácil de usar al bañarse. Se adapta fácilmente a la bañera estándar y, además, se ajusta a las necesidades del niño. Es posible ajustar la tapicería con la ayuda de cinturones estabilizadores. Se puede bajar la parte superior de la silla de baño, lo que puede ser útil al lavar el cabello del niño. La hamaca de baño está equipada con fundas de espuma que protegen la bañera contra daños mecánicos.



¡ATENCIÓN! Antes de usar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse con el manual del usuario. Recuerde que cumplir con las pautas es muy importante. Asegura la seguridad y extiende la durabilidad y la estética del dispositivo.



1 EL PROPÓSITO DEL MANUAL

Este manual contiene la información necesaria para el uso correcto de la hamaca para baño **FOKA™**, la preparación del dispositivo antes del uso, el mantenimiento y la limpieza, así como las condiciones de garantía. El Manual debe mantenerse en un lugar de fácil acceso.

El manual está dirigido a los padres, médicos y fisioterapeutas que atienden directamente a los niños discapacitados.



¡ATENCIÓN! Antes de usar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse con el manual del usuario.

Recuerde que seguir las reglas del manual permite un uso seguro del producto, su vida útil prolongada y su estética.

2 INDICACIONES DE USO

La hamaca para baño **FOKA™** está creada para niños con parálisis cerebral infantil (PC) para mantener su salud e higiene. La PC depende de su etapa y puede ser:

- Hemiplejía, caracterizada por la debilidad de un solo músculo lateral, basada en la espasticidad de los músculos o la parálisis flácida.
- La diplejía generalmente involucra extremidades inferiores donde el aprendizaje de la marcha es muy difícil. Los pacientes a menudo usan andadores o muletas.
- La hemiplejía bilateral está relacionada con la posición de extensión y los movimientos limitados. Con la edad, la paresia de las extremidades puede ocurrir, principalmente en los miembros superiores. Los músculos de tronco y cabeza son débiles, por lo general.
- La tetraplejía involucra todo el cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. Los pacientes, según la etapa, pueden gatear, sentarse o tumbarse.



3


CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA HAMACA DE BAÑO PARA NIÑOS

3.1 Equipamiento estándar


1. Chasis
2. Reposacabezas
3. Soporte de tronco
4. Cinturón pélvico-muslo
5. Tapicería que no absorbe el agua
6. Apoyo de pierna



3.2. Equipamiento adicional

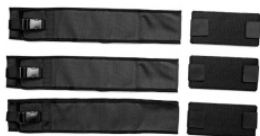

Conjunto de adaptación utilizado para ensamblar el cojín BodyMap

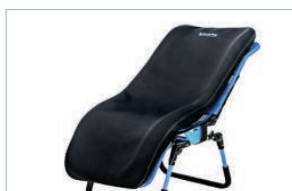

Cojín BodyMap



Base con ruedas



4 TABLA DE MEDIDAS



Símbolo	Medición	Unidad	Talla 1	Talla 2	Talla 3
A	Ancho silla	[cm]	42	45	50
B	Profundidad silla	[cm]	28-33	32-40	37-50
C	Altura reposacabezas	[cm]	16	19	23
C1	Altura respaldo	[cm]	40	44	50
C2	Altura reposapiernas	[cm]	31	36	41
C3	Altura de suelo a asiento	[cm]	11-40	13-49	15-54
	Peso máximo usuario	[kg]	30	50	75

Peso y dimensiones del dispositivo		Talla 1	Talla 2	Talla 3	
	Ancho producto	[cm]	42	45	50
	Ancho con hamaca plegada	[cm]	42	45	50
	Largada del producto	[cm]	75	91	97
	Longitud con hamaca plegada	[cm]	67	76	88
	Altura producto	[cm]	85	96	113
	Altura con hamaca plegada	[cm]	25	29	31
	Peso del producto	[kg]	4	4,5	8

Nota: La tolerancia dimensional en la tabla es +/- 1 cm.



5 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CÓMO INSTALAR LA TAPICERÍA LOUNGER


5.1. Componentes:



- 1** Marco de la tumbona de baño x 1
- 2** Estructura reposapiés
- 3** Estructura respaldo
- 4** Juntas
- 5** Cinturón pélvico / muslo x 1
- 6** Reposacabezas x 1
- 7** Tapicería x 1

Para poner la tapicería en el chasis primero debes:

- Presionar las juntas (G y F) al mismo tiempo, ajustar el ángulo entre el respaldo y el reposapiés (de acuerdo con la figura 1)
- Insertar la parte superior de la tapicería en el marco del soporte de la espalda (figuras 2, 3),

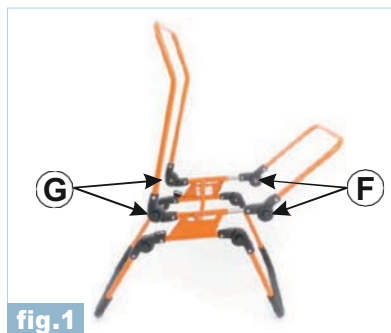

- Empuje la parte inferior de la tapicería sobre estructura del reposapiés (figura 4),



Sujete todas las correas con cierres de velcro desde la parte inferior de la tumbona (figuras 5, 6). Tenga en cuenta que las correas deben cubrir la estructura del asiento.



- Tumbona con tapicería (figura 7) ajustada a la posición utilizable (fig.8).



fig.7

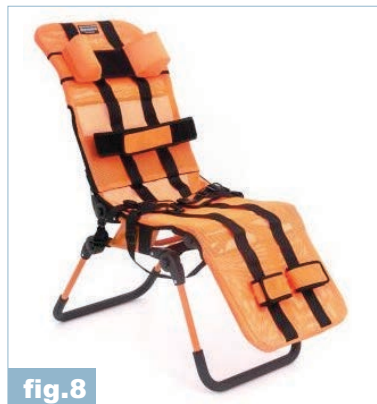


fig.8

Para ensamblar los cinturones de muslo:

- entrelazado de correa A y B (inserto) a través del montaje indicado (figura 9).
- a continuación, entrelace (inserte) las correas a través de la guía como se indica en las fotos (fig.10 -12).



fig.9



fig.10



fig.11



fig.12




- coloque la correa E debajo del chasis, luego conéctela a la correa C y D con una hebilla. Repita en el otro lado con el cinturón D.

Para montar el estabilizador de cabeza debe:

- elija la altura adecuada del estabilizador en el respaldo de la tumbona,

-A continuación, usando correas con cierres de velcro, sujete el estabilizador en la parte posterior de la tumbona (fig. 14, 15).

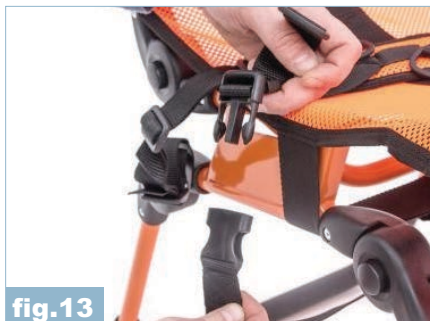



6 EL AJUSTE DEL ASIENTO INFANTIL PARA NIÑOS

Es necesario usar juntas especiales para ajustar el asiento infantil para baño **FOKA™**.

Es posible ajustar las siguientes partes del asiento infantil para baño **FOKA™**:

REPOSACABEZAS



REPOSAPIÉS





EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL ASIENTO




Todos los asientos infantiles de baño **FOKA™** estándar están equipados con soporte para la cabeza, cinturón estabilizador de tronco y cinturones de estabilización de pies. Todas estas partes aseguran al paciente mientras usa el producto. Siga estos pasos mencionados a continuación para usar el producto:

PASO 1. Fije la correa con los *pelottes* de estabilización de la cabeza a la altura elegida. La correa debe sujetarse en la parte posterior del asiento mediante cintas de velcro. La distancia de *pelottes* se puede ajustar.



PASO 2. Fije la correa estabilizadora del tronco. La correa se sujeta con la ayuda de cintas de velcro y se puede fijar a cualquier altura. Es necesario enhebrar la correa a través de arandelas que se encuentran en el respaldo o en el asiento. A continuación, abroche el cinturón.

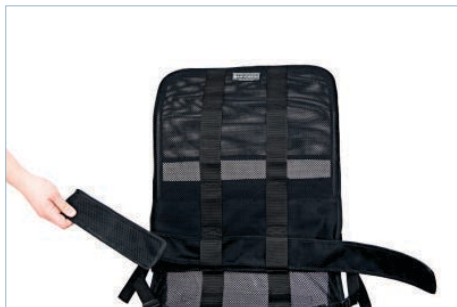

PASO 3. Fije los cinturones de estabilización de los pies. Los cinturones se sujetan con la ayuda de cintas de velcro y se pueden fijar a cualquier altura. Es necesario enhebrar las correas a través de arandelas que se encuentran en el reposapiés. A continuación, sujete los cinturones.



PASO 4. El siguiente paso es unir el cinturón del muslo pélvico. El cinturón garantiza un nivel adecuado de estabilidad y seguridad mientras está sentado en el asiento. Para colocar el cinturón, la correa inferior con hebillas debe colocarse debajo del asiento y luego abrocharse.



correa inferior
con hebillas



Inserte las dos correas laterales en los reguladores como se explica abajo. El cinturón correctamente conectado se muestra en la última imagen.

Correas laterales con reguladores





6.2. Ajuste de la profundidad de asiento

Para ajustar la profundidad del asiento, es necesario presionar los botones en ambos lados al mismo tiempo.



6.3. Tapizar

La tensión de la tapicería se puede ajustar fácilmente mediante correas con Velcros que se encuentran debajo de la silla.




7 CÓMO INSTALAR EL COJÍN BODYMAP

Todos los cojines BodyMap son impermeables y altamente recomendados, por lo que se recomienda utilizarlos junto con la hamaaca infantil para baño **FOKA™** para mejorar la posición vertical y asegurar al paciente mientras realiza actividades de enfermería.

Por favor, siga los pasos mencionados a continuación para instalar el cojín BodyMap:


PASO 1. Desmontar el soporte de la cabeza, la correa estabilizadora del tronco y los cinturones de estabilización de los pies.

PASO 2. Fije los cojines BodyMap con la ayuda del juego de fijación que se incluye en el equipamiento opcional. Cada conjunto está equipado con cinturón pélvico-muslo, dos cinturones anchos que estabilizan al paciente y tres cintas de Velcro que se utilizan para colocar el cojín BodyMap en el asiento.

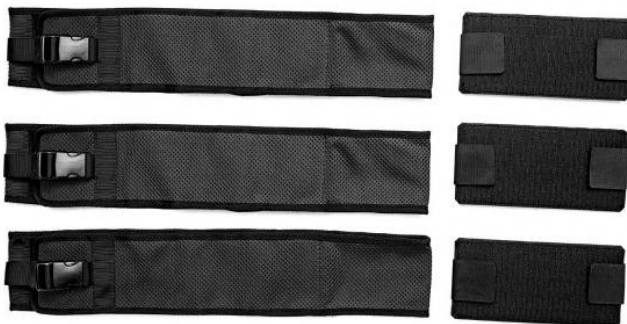



Antes de fijar el cojín BodyMap en ambos asientos, es necesario ensamblar Velcros especiales en la parte inferior, media y superior del asiento. La superficie autoadhesiva del cojín BodyMap permite fijarlo rápidamente en el asiento del baño.

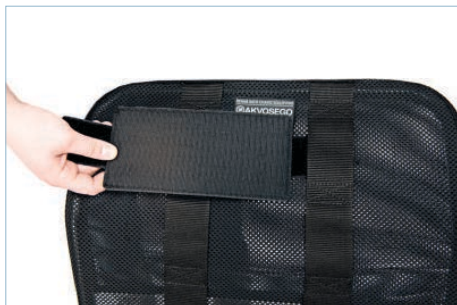

PASO 3. Luego arregle los cinturones estabilizando al paciente. Los cinturones se sujetan con cintas de Velcro y hebillas. A continuación, puede ver el proceso de ensamblaje:





PASO 4. Para arreglar el cojín BodyMap, es necesario desabrochar las correas estabilizadoras. Coloque el cojín sobre la hamaca de forma que su superficie autoadhesiva toque la tapicería del asiento del baño. A continuación, coloque al paciente sobre el cojín y ajuste los cinturones estabilizadores. Recuerde que el cojín BodyMap debe estar configurado de acuerdo con el cuerpo del paciente porque solo entonces el cojín estabiliza correctamente al paciente al sentarse. Familiarícese con las directrices sobre la configuración de los cojines que se incluyen en el Manual del usuario para los cojines.





8 EL USO DEL PRODUCTO



¡ATENCIÓN! El producto debe ser utilizado de conformidad con las pautas incluidas en este manual de usuario y con personal capacitado. ¡Antes de cada uso, no es necesario preparar al paciente y al dispositivo!

Siga estos pasos antes de utilizar el producto:

- Despliegue el dispositivo.
- Coloque el dispositivo en una superficie plana, sin pendientes.
- Asegúrese de que todas las piezas estén en buen estado, montadas correctamente y sean estables,
- Ajuste el asiento del baño y el reposacabezas a las medidas del paciente,
- Desate la correa de estabilización del tronco y los cinturones de estabilización de los pies,
- Coloque al paciente en la hamaca y sujételo con un juego de correas del equipo estándar.

Si el producto se usa junto con el cojín BodyMap; primero fije el cojín en la silla de baño con el conjunto de fijación y luego dele forma según el cuerpo del paciente.

Nuestro dispositivo funciona correctamente solo cuando el producto se ajusta de acuerdo con la altura y el peso del paciente. Recuerde tener en cuenta todas estas medidas al comprar el producto. El ajuste correcto de la hamaca es muy importante para que el producto se utilice de forma seguro. Está prohibido obligar al niño a mantener una posición específica porque se sentirá incómodo y puede llevar a una postura incorrecta.



¡ATENCIÓN! Antes de usar, recuerde asegurarse de que todas las correas y el bloqueo estén correctamente ajustados y sujetos.



9 REGLAS DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN! El asiento infantil para baño **FOKA™** debe usarse de acuerdo con las pautas descritas en el manual de instrucciones.

Es muy importante consultar a un médico o fisioterapeuta para tomar una decisión correcta sobre la elección la hamaca infantil de baño **FOKA™** y su tamaño. Es esencial familiarizarse con las pautas descritas en el manual de instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Antes de usar el producto, es esencial asegurarse de que:

- Asegúrese de que no haya daños que puedan poner en peligro la vida del paciente. Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente y estén montadas correctamente. Además, asegúrese de que no haya grietas ni deformidades.
- Asegúrese de que todos los tornillos, tuercas y otras partes roscadas, pegadas y cosidas, estén bien apretadas.
- Asegurarse de que las hebillas funcionen correctamente;
- Utilice cinturones estabilizadores siempre: las cintas de velcro de estos cinturones deben superponerse min. 8cm;
- Ajustar el producto a las medidas del paciente, así como a las necesidades.
- Asegure al paciente con la ayuda del reposacabezas, la correa estabilizadora del tronco y los cinturones de estabilización de los pies. Es necesario debido a que protege al paciente contra caídas del dispositivo.

2. Está prohibido usar una hamaca de baño para fines diferentes a los previstos.

3. Está prohibido usar una hamaca de baño si se destruye o si falta alguna pieza.

4. Está prohibido dejar al paciente desatendido.

5. Está prohibido usar el producto sin personal capacitado o personal médico.

6. Es necesario doblar y asegurar la hamaca durante el transporte, para evitar posibles daños. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan aparecer debido a una preparación inadecuada del dispositivo durante el transporte.



7. El producto, así como la tapicería, están fabricados con materiales de propagación de llamas limitados, sin embargo, está prohibido colocar el producto cerca del fuego o a altas temperaturas. La hamaca no puede almacenarse ni utilizarse en habitaciones con mucha humedad.

¡ATENCIÓN! El producto contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridos accidentalmente por niños.

¡ATENCIÓN! Está prohibido realizar cambios en la estructura del asiento, debido a que es peligroso y ocasiona la pérdida de la garantía.



¡ATENCIÓN! Está prohibido exceder la carga de peso permitida durante el uso del producto. Toda la información relacionada con la carga de peso se describe en la placa de identificación. Además, puede familiarizarse con la tabla que puede encontrar en este Manual de usuario en la página 7.

¡ATENCIÓN! El asiento infantil para baño **FOKA™** debe usarse de acuerdo con las pautas descritas en el manual de instrucciones.



10 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La hamaca infantil para baño **FOKA™** debe mantenerse limpia y usarse cumpliendo con las recomendaciones del fabricante. El dispositivo debe mantenerse en una habitación limpia, seca y ventilada. El mantenimiento y la limpieza deben realizarse al menos una vez al mes. La limpieza regular y el mantenimiento de la hamaca de baño para niños son indispensables para mantener su correcta funcionalidad y seguridad.

Es muy recomendable realizar un mantenimiento adecuado para conservar bien el producto a nivel estético.

Para hacer eso, es esencial cumplir con estas pautas:

- Es posible limpiar la tapicería con una lavadora. La temperatura máxima es de 60 grados;
- Está prohibido limpiar el tapizado por medio de solventes y productos químicos cáusticos;
- En caso de desinfección de la tapicería, use productos que estén destinados a ella;
- No echarle cloro;
- No planchar;
- Seque lejos del fuego.

¡ATENCIÓN! El fabricante no se responsabiliza por los daños causados por el uso de un producto químico incorrecto.



¡ATENCIÓN! El fabricante solo se responsabiliza por defectos latentes o daños que aparecieron a pesar de que el usuario cumplió con las pautas.

¡ATENCIÓN! Si aparece algún daño, es necesario contactar al vendedor autorizado que le vendió el producto.





ORTHOPAEDIC DEVICES MANUFACTURER



36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47, POLAND

Factory of Orthopaedic Devices:
ul.Truskawkowa 17, Widna Góra, Jarosław, POLAND
tel. 16 621 42 20, 16 621 41 35
fax 16 621 41 13
www.reh4mat.com | www.ortezy.pl
e-mail: biuro@reh4mat.com

Fecha de emisión: 13.04.2015

Última actualización: 20.04.2017



REH4MAT se reserva el derecho de introducir cambios técnicos y comerciales en el contenido de las instrucciones sin previo aviso.