



JUMBO™

POSITIONING CHAIR



MANUAL USUARIO

our passion - your independence!

AKCES[®]MED



¡ATENCIÓN! El fabricante asume la responsabilidad por el uso correcto del dispositivo sólo cuando el producto se adquirió en una tienda médica especializada!



¡ATENCIÓN! AKCES-MED Ltd. se reserva el derecho de introducir cambios técnicos y comerciales en el contenido de la instrucción sin previo aviso.

Producto médico de primera clase de acuerdo con el Reglamento 93/42/EWG del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los productos médicos. Para este producto, el productor emitió la correspondiente declaración de conformidad.

Akces-MED. Sp. Zoo. Compañía introducida al sistema de gestión de calidad ISO 13485 relativa a la producción, venta y servicio. El sistema está certificado por Det Norske Veritas.





CONTENIDO

1. Propósito del manual.....	5
2. Indicaciones de uso.....	5
3. Características generales de la silla.....	6
3.1 Equipamiento estándar.....	6
3.2 Equipamiento adicional.....	7
4. Tamaño de la mesa.....	9
5. Descripción detallada de cómo utilizar la silla.....	10
6. Equipamiento adicional.....	12
6.1 Cinturón de estabilización de cabeza.....	12
6.2 Arnés forma H.....	12
6.3 Funda para reposacabezas.....	12
6.4 Bandeja.....	13
6.5 Funda suave para bandeja.....	13
6.6 Bandeja para terapia manual.....	14
6.7 Chaleco 6 puntos.....	14
6.8 Reposacabezas ajustable.....	15
7. El uso de la silla.....	16
7.1 Preparación del paciente.....	16
7.2 Cómo utilizar la silla.....	17
7.3 Posición de sentado.....	18
8. Normas de seguridad.....	20
9. Mantenimiento y limpieza.....	23
10. Etiqueta.....	25



INTRODUCCIÓN

Adoptar la posición de sentado, para los niños con discapacidades desde edades tempranas, es una parte importante del proceso de rehabilitación. Tiene una alta influencia positiva en el desarrollo y la mejora de las habilidades motoras del niño.

El hecho de que un niño pueda sentarse con autonomía y seguridad cuando ha perdido la habilidad del movimiento autónomo como consecuencia de una enfermedad o de un accidente, tiene una influencia positiva en el paciente y también en la mente de quienes están a su cuidado.

Jumbo es un aparato diseñado para su uso en procesos de rehabilitación diaria de pacientes cuyas enfermedades imposibilitan que puedan sentarse o ponerse de pie.

La madera, tapicería de colores, tonos brillantes y la figura de un elefante hacen que la silla sea más un juguete que un aparato de rehabilitación.

Es un aparato universal, en el que tanto niños flácidos como niños con tono muscular y niños espásticos pueden sentarse. Mejora la calidad de vida del niño y de su familia.

Lea este manual con atención. Encontrará información sobre nuestro producto y aprenderá a utilizarlo de un modo seguro y efectivo.

En caso de dudas, contacte con nuestra oficina (tel. +34 902 48 72 72)



¡ATENCIÓN! Antes de utilizar el producto, el usuario debe familiarizarse con el manual de usuario. Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy importante. Se garantiza la seguridad y se extiende durabilidad, así como la estética del dispositivo.



1 PROPÓSITO DEL MANUAL

El presente manual del usuario contiene información básica que es esencial para el uso apropiado, preparación, mantenimiento, limpieza y condiciones de garantía de la silla de posicionamiento **JUMBO™**. El manual de usuario debe mantenerse en su lugar fácilmente accesible. Está diseñado para las personas que se ocupan de las personas con discapacidad, y por tanto los médicos, así como los fisioterapeutas que operan el dispositivo.



¡ATENCIÓN! Antes de utilizar el producto, el usuario debe familiarizarse con el manual de

Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy importante. Se garantiza la seguridad y se extiende durabilidad, así como la estética del dispositivo.

2 INSTRUCCIONES DE USO

El dispositivo es recomendado para los siguientes usuarios:

- Parálisis cerebral - varios tipos y formas.
- Daños en cerebro y médula espinal con paresia del miembro inferior, equilibrio severo y trastorno del movimiento.
- Enfermedades desmielinizantes cuadriplejía avanzada (esclerosis múltiple, lateral amiotrófica)
- Mielomeningocele.
- Enfermedades musculares, distrofia, miastenia grave, polimiositis.
- Desórdenes genéticos.
- Enfermedades metabólicas degenerativas del Sistema nervioso.
- Después de traumatismos cerebrales o lesión de la columna con la médula espinal y el menor daño extremidades conectadas con paresia y parálisis, especialmente en condiciones cuadriplejía (como una etapa del proceso de rehabilitación o soporte ortopédico permanente).
- Después de las lesiones craneales y de la médula espinal y de la columna vertebral con parálisis y paresia.



3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SILLA

3.1. Equipamiento estándar

1. Estructura con ruedas y frenos
2. Cojín para el asiento
3. Cojín para el respaldo
4. Placas de soporte pectorales
5. Placas de soporte pélvicas
6. Chaleco
7. Taco de abducción
8. Reposapiés con cinturón de estabilización





3.1. Additional equipment

4

 <p>Seguridad</p>		 <p>Stabilization</p>
<p>SLK_002 Cinturón para mover pacientes</p>	<p>SLK_003 Funda para bandeja</p>	<p>SLK_101 Cinturones de abducción - aducción</p>
		
<p>SLK_102 Cincha fijación cabeza</p>	<p>SLK_104 Reposacabezas</p>	<p>SLK_114 H Arnés</p>
		 <p>Comodidad</p>
<p>SLK_123 Reposacabezas</p>	<p>SLK_125 Chaleco 6 puntos</p>	<p>SLK_401 Bandeja terapia manual</p>
		
<p>SLK_403 Bandeja</p>	<p>SLK_407 Bandeja terapéutica</p>	<p>SLK_410 Funda de algodón para el reposacabezas</p>
		
<p>SLK_412 Cojín elástico silla</p>	<p>SLK_413 Respaldo de cojín elástico</p>	<p>SLK_419 Cojín de asiento (forma pomo)</p>



SLK_421 Cojín de asiento
(forma muslo)




SLK_427 Rueda



SLK_507 Soporte oxígeno



4 TAMAÑO DE LA MESA

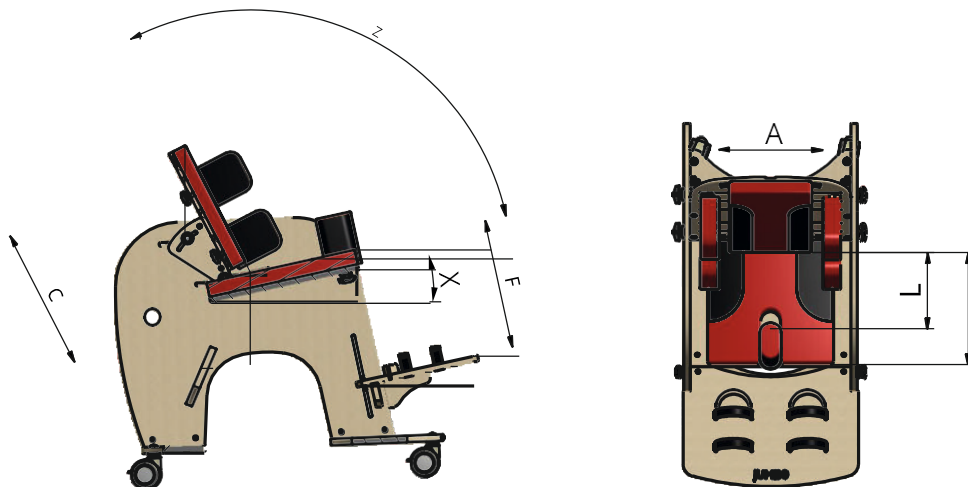

Symbol	Medición	Unidad	Talla 1	Talla 2	Talla 3
A	Ancho silla	[cm]	35	39	46
L	Profundidad silla	[cm]	13-31	19-38	29-54
L1	Distancia del pomo al respaldo	[cm]	0-24	3-29	8-45
C	Altura respaldo	[cm]	34	38	55
E	Ancho respaldo	[cm]	17-27	22-32	22-35
F	Largada reposapiés	[cm]	18-35	24-45	28-45
	Largada plataforma	[cm]	19	25	26
X	Ángulo de inclinación del asiento	[°]	10	10	10
Y	Ángulo de inclinación del respaldo	[°]	100-125	100-125	100-125
	Peso máximo del usuario	[kg]	30	45	75

Peso y dimensiones del dispositivo		Talla 1	Talla 2	Talla
Ancho	[cm]	50	56	60
Profundidad	[cm]	82	100	120
Altura	[cm]	76	95	105
Peso	[kg]	14	20	24,5

Nota: Dimensiones tolerantes en la tabla: +1/-1 cm..



5 DESCRIPCIÓN DE CÓMO USAR LA SILLA

A. Ajuste del reposacabezas - equipo adicional. Es posible tener ajuste vertical y además, el reposacabezas se puede ajustar en cualquier ángulo de inclinación.

B. El ajuste del ángulo de inclinación del respaldo – el ángulo de inclinación de respaldo depende del tipo de disfunción

C. Ajuste de la profundidad del asiento - afloje el nudo para ajustar la profundidad del asiento B. Posibilidad de ajuste del frente trasero

D. El ajuste de la mesa - equipo adicional. Es posible ajustar la mesa en cualquier ángulo de inclinación.

E. Ajuste de la altura del reposapiés - Posibilidad de ajuste vertical. Es necesario ajustar la altura del reposapiés para que los muslos descansen sobre el asiento.


F. El ajuste del bloqueo de abducción - El bloque de abducción evita que se caiga de la silla.





G. Ajuste de las placas para el pecho -

Posibilidad de ajuste lateral. También es posible ajustar en cualquier ángulo de inclinación. El ajuste debe hacerse de acuerdo con las mediciones del pecho del paciente

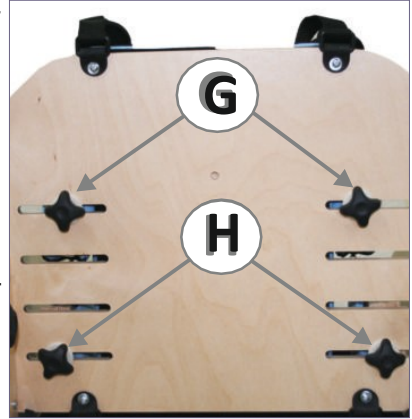

H. Ajuste de las placas para la pelvis -

Posibilidad de ajuste lateral. También es posible ajustar en cualquier ángulo de inclinación. El ajuste debe hacerse de acuerdo con las mediciones del pecho del paciente

I. Chaleco. Conecte las abrazaderas del chaleco con las abrazaderas de las correas ajustables que se sujetan tanto en la parte inferior y como en la parte superior del respaldo (4 piezas). A continuación, ajuste el chaleco al cuerpo del paciente con la ayuda de cinturones.



Es muy importante ajustar adecuadamente el chaleco debido al hecho de que protege al paciente de caerse de la silla.

El chaleco está equipado con el sistema "hold & pull" gracias al cual todos los elementos se ajustan con precisión al paciente. Este sistema es útil porque el producto es estable y el niño se siente cómodo mientras está sentado en este dispositivo.



6 EQUIPAMIENTO ADICIONAL

6.1. **REF SLK_102** Cincha estabilización de cabeza

Siga estos pasos para montar la cinta estabilizadora de la cabeza:

- Sujetar la correa a las partes laterales del reposacabezas con la ayuda de una cinta de Velcro,
- Ajustar la longitud de los cinturones al paciente,
- Tire de las correas para verificar si están montadas correctamente.



6.2. **REF SLK_114** Arnés H

Por favor, mire el punto I para saber cómo montar el chaleco (@página 10). Inicialmente, el paciente no debe ajustar el chaleco con fuerza. Una vez que se pone el chaleco, se debe sujetar con la ayuda de correas con tiras de plástico. El chaleco se puede desabrochar rápidamente.



6.3. **REF SLK_410** Funda reposacabezas

La funda está hecha de algodón y debe colocarse en el reposacabezas. En cuanto al material, tiene algunas bandas gracias a las cuales el material no se desliza hacia abajo.





6.4. [REF] SLK_403 Bandeja

Siga estos pasos para montar la bandeja:

- Afloje la perilla D que ajusta la bandeja (mira la página 10, ajuste D);
- Inserte la bandeja de manera que sus empuñaduras estén situadas entre el lado de la silla y la taza;
- Apriete firmemente las perillas.



6.5. [REF] SLK_003 Funda para bandeja

Siga estos pasos para montar la funda para la bandeja:

- Adherir 5 cintas de velcro adhesivas;
- Coloque la funda de manera que sus bordes cubran los bordes de la bandeja.






6.6 [REF SLK_401] Bandeja terapéutica manual

La bandeja terapéutica manual está montada en lugar de la bandeja estándar. Si desea montarla, siga las instrucciones - página 11.

6.7 [REF SLK_125] Chaleco 6 puntos

Para montar 6 puntos chaleco es necesario:

- Colocar los chalecos que se deben poner y luego es importante abrocharse la cremallera y abrocharse la parte delantera del chaleco;
-

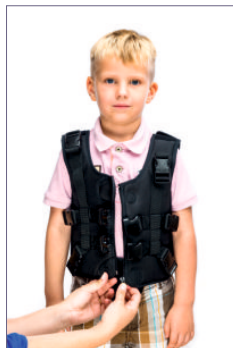

¿ Ajuste el chaleco con la ayuda de cintas de velcro situadas en la parte posterior del chaleco.

¿ El chaleco de 6 puntos se debe sujetar en un lugar que se cree para el chaleco estándar (mira la página 10). Para sujetarlo, use no solo hebillas sino también un cinturón de sujeción que debe enroscarse detrás del respaldo de la silla y abrochado en la parte delantera del chaleco.





6.8 REF SLK_104 Reposacabezas ajustable



6.8.1. Desmontaje del tapón

Para quitar el tapón debes:

- inyectar dos tornillos (J) con una llave allen, y luego:
- remover la tapa e instalar el reposacabezas.

6.8.2. Montaje del reposacabezas:

Es necesario montar el reposacabezas al respaldo con la ayuda de dos tornillos. Los tornillos deben apretarse con la ayuda de una llave Allen.

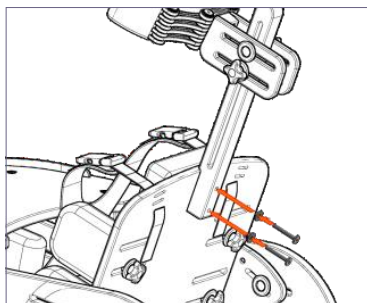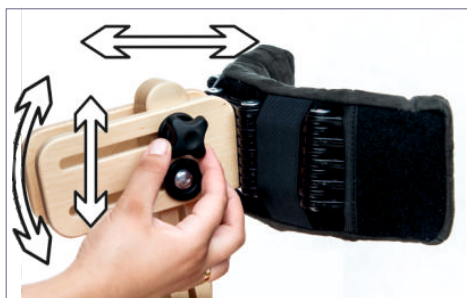

6.8.3. El ajuste del reposacabezas

- Aflojar los tornillos de fijación situados a ambos lados del reposacabezas,
- Ajustar el reposacabezas,
- Apretar firmemente los tornillos de fijación.
- Aflojar los tornillos de las nervaduras del reposacabezas con la ayuda de la llave Allen,
- Ajustar la forma del reposacabezas a sus necesidades,
- Apretar firmemente los tornillos.





7 EL USO DE LA SILLA



¡ATENCIÓN! La silla JUMBO™ se debe utilizar conforme a las pautas incluidas en este manual del usuario. Recuerde usar el producto solo con alguien que esté capacitado y tenga conocimiento. No olvide preparar tanto el producto como el paciente antes de usar la silla JUMBO™

7.1. Preparación del paciente

Antes de usar el producto, es esencial asegurarse de que:

- El paciente utiliza ropa cómoda (se aconseja ropa deportiva);
 - Calza zapatos cómodos y que estabilicen el tobillo.
 - Por razones higiénicas y para evitar la abrasión, es aconsejable que el paciente siempre use ropa cuando use el dispositivo. La piel no debe estar desnuda, especialmente en lugares de contacto regular con la tapicería.
 - Drenajes, bolsas, catéteres, etc. si se aplican, deben asegurarse para funcionar correctamente y no molestar durante el uso del producto;
-



¡ATENCIÓN! La ropa debe proteger la piel del paciente del contacto directo con la tapicería y otras partes del equipo.

¡ATENCIÓN! ¡Solo el médico puede tomar una decisión con respecto al uso de cualquier tipo de suministro ortopédico!



7.2. Cómo usar la silla

1. Antes de usar, es necesario:

- Desplegar el dispositivo;
- Colocar el dispositivo en un suelo plano;
- Asegurarse de que todas las piezas estén en buen estado, montadas correctamente y sean estables;
- Bloquear los frenos;
- Ajustar el dispositivo a las medidas del paciente;
- Deshacer el chaleco, los cinturones del baúl, etc. para colocar fácilmente al paciente en el dispositivo;
- Colocar el paciente en el dispositivo;
- Fijar todos los elementos que estabilizan al paciente: chaleco, cinturones, cinturones estabilizadores de pies, etc.;
- Instalar equipo adicional, como puede ser la bandeja.

En el caso de pacientes que tienen problemas con la vejiga, es necesario colocar un paño especial en el asiento. Este paño se puede comprar en farmacias o tiendas médicas.



¡ATENCIÓN! Antes de usar el producto, es muy necesario asegurarse de que todos los cinturones, así como los equipos de seguridad, estén correctamente ajustados. Además, verifique que no se desabrochen debido a la presión y que las sujeciones de los elementos ajustables estén bien apretadas.

El equipo funciona correctamente solo cuando el dispositivo se ajusta de acuerdo con la altura del paciente y el peso. Recuerde tener en cuenta todas estas medidas al comprar el producto. Lo más importante es ajustar el producto correctamente, ya que sólo entonces el producto será seguro. Está prohibido obligar al niño a mantener una posición específica porque se sentirá incómodo y puede llevar a una postura incorrecta.



7.3. Posición para sentarse

La investigación clínica muestra que es realmente beneficioso para los niños adoptar una posición sentada para estimular el desarrollo psicomotor. Además, adoptar una posición sentada o de pie es ventajoso para personas con discapacidad debido a que tiene una influencia positiva en órganos y sistemas. Además, a menudo actúa como la etapa de posición erguida y aprender a caminar:

- La causa más importante de usar silla es la estimulación del sistema psicomotor;
- Influencia en el estado de ánimo del paciente;
- Influencia en el desarrollo de los músculos, las articulaciones y el sistema musculoesquelético;
- Previene contracciones o hace más fácil curarlas; mejora la movilidad articular;
- Impide la atrofia muscular (especialmente postural); facilitar realizar ejercicios para miembros superiores mientras está sentado;
- Mejora el sistema cardiovascular;
- Mejora la ventilación pulmonar y previene la neumonía; mejora la peristalsis intestinal;
- Previene problemas urinarios o hace que sea más fácil curarlos;
- Previene las úlceras por decúbito o hace que sea más fácil curarlas;
- El sentado pasivo suele ser solo la etapa del proceso de rehabilitación

Cuando un paciente se sienta por primera vez generalmente se realiza en la sala de rehabilitación, neurología, neurocirugía o sala ortopédica. El médico y el fisioterapeuta lo supervisan debido a la posibilidad de que ocurran problemas médicos como: pérdida del conocimiento, disminución de la presión arterial, etc. Es muy importante ajustar todas las partes del dispositivo a la condición del niño, teniendo en cuenta consideración contracturas y deformaciones.

El acto de sentarse en casa debe ser supervisado por personal calificado (fisioterapeutas, enfermeras, miembros entrenados de la familia).





¡ATENCIÓN! El ajuste incorrecto del dispositivo puede provocar efectos secundarios como desmayos, deformidades corporales o sobrecarga de las articulaciones. Es muy recomendable ajustar el dispositivo antes de cada uso. Este ajuste lo tiene que hacer solo una persona o terapeuta formado. Si aparece alguno de estos efectos secundarios, es muy importante detener el proceso de posición vertical, sacar al paciente del dispositivo y posicionarlo boca abajo. Si los efectos secundarios continúan, es necesario contactar al médico..

¡ATENCIÓN! ¡Solo el médico puede tomar decisiones sobre el uso de la silla de rehabilitación!



8 REGLAS DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN! La silla **JUMBO™** se debe usar de acuerdo con las pautas de este manual del usuario.

Es muy importante consultar a un médico o fisioterapeuta para tomar una decisión correcta con respecto a la elección de la silla y su tamaño. También es esencial familiarizarse con las pautas descritas en el manual del usuario antes de usar el dispositivo.

1. Antes del uso, es necesario:

- Asegurarse de que no haya daños o fallos que puedan poner en peligro la vida del paciente; compruebe si todas las piezas funcionan y están montadas correctamente y, además, verifique si no están rotas;
- Comprobar si están apretadas todos los tornillos y todas las piezas encoladas, cosidas o roscadas;
- Comprobar si los frenos funcionan correctamente;
- Comprobar si las hebillas funcionan correctamente;
- Utilizar siempre cinturones de seguridad, las cintas de velcro deben solaparse min. 8cm;
- Ajustar el dispositivo de acuerdo con las mediciones y necesidades del paciente, por ejemplo, el reposapiés;
- Asegurarse de que todas las partes móviles sean estables y estén bloqueadas;
- Asegurar al paciente con la ayuda de elementos como chalecos, cinturones estabilizadores de pie, taco abductor o reposacabezas. Es muy importante asegurar al paciente porque lo protege de caerse. Si se produce una contractura de abducción, se recomienda utilizar un taco abductor para prevenir las úlceras entre las rodillas;





1. Está prohibido usar la silla para fines diferentes a los que está destinada.
2. Está prohibido usar la silla cuando está dañada o falta alguna pieza.
3. Está prohibido dejar al paciente desatendido.
4. La silla debe usarse solo cuando hay alguien formado y con conocimiento.
5. Está prohibido dejar la silla y el paciente en un terreno inestable sin supervisión, incluso si el freno está enganchado.
6. Está prohibido subir o bajar escaleras; no importa si el paciente se coloca en el dispositivo o no.
7. Es importante asegurarse de que el paciente no se quede de pie al subir o bajar de la silla.
8. Es importante activar el freno al entrar y salir de la silla.
9. Asegúrese de que todas las extremidades no estén cerca de radios u otros elementos ajustables.
10. Aunque el dispositivo y la tapicería están hechos de materiales resistentes al fuego, por favor, preste atención al acercarse a fuentes de fuego o fuentes de altas temperaturas durante el uso del dispositivo. Además, la silla no debe almacenarse en habitaciones con alta humedad.
11. Asegure la silla durante el transporte para evitar posibles daños. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan aparecer debido a una preparación inadecuada del dispositivo durante el transporte.



¡ATENCIÓN! El hecho de colocar a un paciente en sedestación por primera vez generalmente se realiza en la sala de rehabilitación, neurología, neurocirugía o sala ortopédica. El médico y el fisioterapeuta supervisan de pie debido a la posibilidad de que ocurran problemas médicos como: pérdida del conocimiento, disminución de la presión arterial, etc. Es muy importante ajustar todas las partes del dispositivo a la condición del niño, teniendo en cuenta contracturas y deformaciones.



¡ATENCIÓN! El producto contiene piezas pequeñas que los niños pueden tragar.

¡ATENCIÓN! Está prohibido realizar cambios en la estructura del cochecito debido a que es peligroso y ocasiona la pérdida de la garantía.



¡ATENCIÓN! El peso del usuario no debe ser mayor que el peso máximo descrito en la página 9, donde encontrará información sobre este tema.

¡ATENCIÓN! Este dispositivo solo se puede usar dentro de los edificios.

- 1) AKCES-MED Sp. z o. O. vende productos libres de defectos o defectos de fabricación.
- 2) El fabricante otorga al comprador una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Todos los defectos revelados durante el período de garantía serán reparados sin cargo.
- 3) Todos los defectos que aparecen después del período de garantía pueden repararse solo cuando el usuario lo pague. Esta regla no se aplica a los productos reembolsados: el usuario puede solicitar el reembolso de National Health Refund.
- 4) El fabricante afirma que el producto puede usarse durante 36 meses. El usuario puede utilizar este producto después de este período solo cuando envíe el dispositivo al fabricante para que lo reparen. A continuación, el fabricante determina nuevamente cuánto tiempo se puede utilizar el producto y, además, se determinará la fecha del próximo servicio.
- 5) Si el producto está dañado, póngase en contacto con nuestro distribuidor o servicio al cliente de AKCES-MED (tel. 17/864 04 70)





9 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La silla debe mantenerse limpia y usarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El dispositivo debe ubicarse en una habitación limpia, seca y ventilada. El mantenimiento y la limpieza deben realizarse al menos una vez al mes. La limpieza regular y el mantenimiento de la silla son indispensables para mantener su funcionalidad y seguridad correctas.

Es muy recomendable realizar un mantenimiento adecuado para mantener el producto en buenas condiciones. Para hacer eso, es esencial cumplir con estas pautas:

1. Se recomienda limpiar el tapizado con la ayuda de productos de limpieza, esponja suave y agua tibia. Si usa una esponja demasiado húmeda, las manchas pueden agrandarse y la tapicería puede destruirse. Es necesario recordar que el exceso de humedad debe eliminarse del tejido antes de la siguiente limpieza. Enjuague la tapicería con agua tibia y limpie el paño una vez que haya eliminado la mancha.
2. ¡Está prohibido empapar la tapicería!
3. Está prohibido limpiar la tapicería con cepillos duros.
4. Está prohibido limpiar la tapicería con agentes químicos fuertes, como químicos solventes o cáusticos.



¡ATENCIÓN! Akces-MED Sp z o. o no se responsabiliza por los daños causados por el uso de un agente compensador incorrecto

1. Está prohibido empapar la tapicería durante la limpieza. Recuerde que la tapicería debe estar siempre seca antes de usarse.
2. Está prohibido limpiar, hacer cambios o el mantenimiento durante su uso.
3. Todos los elementos metálicos y plásticos deben limpiarse a mano con la ayuda de productos de limpieza generales. Recuerde familiarizarse con el folleto del producto de limpieza.



¡ATENCIÓN! ¡Recuerde que la tapicería debe estar siempre seca antes de usarse!

Antes de usarlo es necesario:

- Limpiar las ruedas;
- Comprobar si la base y las ruedas están montadas correctamente; verificar si el freno deja de girar la rueda;
- Asegurarse de que todas las piezas de madera, como la bandeja, no tienen astillas;
- Comprobar si la construcción de la silla está libre de roturas o cualquier tipo de deformidad;
- Verificar si todas las partes móviles funcionan y que los tornillos y las tuercas están apretados correctamente.
- Comprobar si los cinturones, los chalecos, los cinturones de tronco, los cinturones de estabilización de los pies, etc. no están deshilachados; comprobar si las hebillas y las abrazaderas funcionan correctamente.



¡ATENCIÓN! El fabricante sólo se responsabiliza por fallas ocultas o daños que aparezcan a pesar de que el usuario cumpla con las pautas.

¡ATENCIÓN! En caso de cualquier daño, es esencial ponerse en contacto con la persona que le vendió el producto.





10 ETIQUETADO

10.1. Símbolos

	Declaración de que el producto cumple los requisitos		Proteger de la luz solar
	Número de catálogo		Limitación de la temperatura de almacenamiento
	Número de serie		Almacenamiento de humedad relativa
	Por favor, lea las instrucciones del manual		Secar verticalmente
	¡Atención!		No aplicar cloro
	Fabricante		No planchar
	Fecha de fabricación		No secar en una secadora
	El producto no contiene		No usar blanqueador
	Almacene en un lugar seco		¡Cuidado! contenido delicado
	Prohibición de uso sin cinturones de seguridad		No dejar al paciente sin atención durante el uso del producto
			Uso interior

10.2. Ejemplo de placa de identificación

Código QR - después de la exploración se le dirige a la web

Dirección del fabricante

Carga máxima permitida del producto

Etiquetado - Mira arriba

Número de serie en forma de código de barras

Número de serie

Nombre del producto en polaco

Nombre del producto en inglés

Fecha fabricación

AKCESMED
www.akces-med.com

SLONIK 1
FOTELIK REHABILITACYJNY

JUMBO 1
POSITIONING CHAIR

Akces-MED Sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
POLAND

05.2014

MAX LOAD: 25 kg

SLK 001/U/1/AA



ORTHOPAEDIC DEVICES MANUFACTURER



Akces-MED Sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 Jasionka
tel. (17) 864 04 77

www.akces-med.com

e-mail: export@akces-med.com

Authorised Dealer



Date of issue: 01.04.2009

The last update: 30.05.2017

our passion - your independence!