

Seating

Standing

Sleeping


Therapy



Instruction for use part 2 of 2

JUC21
JUC22
JUC23

Sep 2017. Version 001

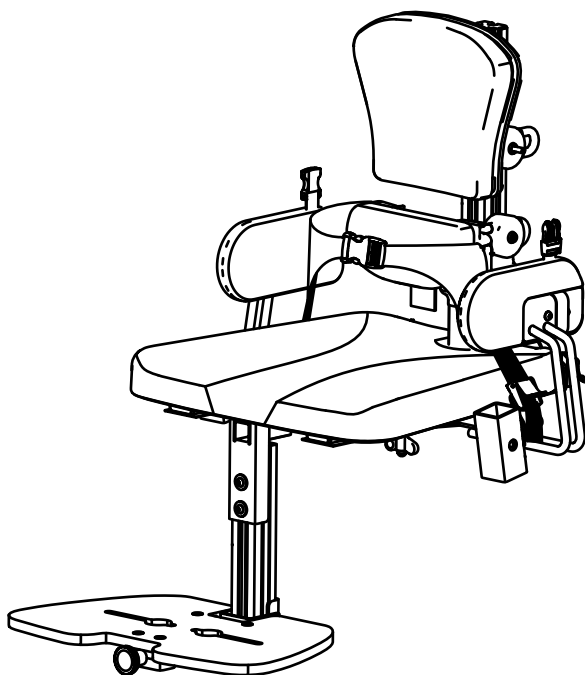

Read part 1 and part 2 before use





Cuidadores y usuarios
Auxiliares e utilizadores domésticos
Assistenti ed utenti
Opiekunowie



Reedición y tiendas
Re-edição e lojas
Ortopedie
Sklepy



Usuarios profesionales y técnicos
Utilizadores profissionais e técnicos
Terapisti e Tecnici
Profesjonalisci

Product Labels

- Each Jenx product has a number of pictorial safety labels attached, please refer to the explanations below.
- Cada producto de Jenx tiene etiquetas con iconos de seguridad, cuyo significado se explica a continuación
- Cada produto Jenx tem um número de etiquetas de segurança pictórica em anexo, referem-se às explicações abaixo.
- Il numero di serie è riportato sull'etichetta CE (vedere figura), presente sul prodotto. Indicare sempre questo codice qualora sia necessario contattare Jenx per assistenza.
- Każdy wyrób firmy Jenx oznaczony jest szeregiem etykiet bezpieczeństwa w formie piktogramów. Ich opisy zamieszczono poniżej.



- Attention / Warning
- Regulaciones
- Attenção/ Aviso
- Attenzione/Avvertenza
- Uwaga!



- Please read Instruction for Use
- Por favor lea las instrucciones
- Leia as instruções
- Leggere le istruzioni
- Prosimy, przeczytaj instrukcję



- Only for indoor use
- Solo para uso en interiores
- Apenas para utilizar em exteriores
- Solo per utilizzo al chiuso
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń



- Always fasten and adjust positioning straps and belts to suit the child. Adjust to suit changes in clothing. Allow one fingers width between the belt and the child.
- Presione y ajuste siempre las correas posicionadoras y los cinturones para que el producto se adapte al niño. Ajuste siempre teniendo en cuenta los cambios de ropa. Deje siempre el espacio de un dedo de ancho entre el cinturón y el niño.
- Aperte e ajuste faixas e cintos de posicionamento para se adequar à criança. Ajuste de acordo com a mudança de roupa. Permitam largura de um dedo entre a correia e a criança.
- Allacciare le cinture e le cinghie di posizionamento e regolarle in base alle esigenze del bambino e in base agli indumenti indossati dal bambino. Verificare di riuscire a inserire un dito tra la cintura ed il bambino.
- Upewnij się, że wszystkie pasy są w użyciu



- Do not leave child unattended
- No deje el niño sin vigilancia
- NÃO UTILIZE como dispositivo de mobilidade.
- Nunca utilize o produto em solo irregular ou superfícies desniveladas.
- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki



- DO NOT USE as a mobility device Never use product on rough ground or uneven surface.

- NO USAR ESTO PRODUCTO como un dispositivo de movilidad no usar este producto o sobre superficies irregulares.
- NÃO UTILIZE como dispositivo de mobilidade. Nunca utilize o produto em solo irregular ou superfícies desniveladas.
- NON UTILIZZARE come dispositivo di mobilità. Non usare il
- prodotto su terreni irregolari o disassati.
- NIE UŻYWAJ WYROBU, jako urządzenia transportowego. Nigdy nie korzystaj z wyrobu na nie równej, lub pochylej nawierzchni.



- User Weight Limit (changes per model and size)
- Peso limite del usuario (cambia por modelo y dimensiones)
- Limite peso de cliente (altera por modelo e tamanho)
- Portata massima (dipende dal modello e dalla misura)
- Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika (zależna od wyrobu i jego rozmiaru)
- Conforms to CE Marking Regulations Medical Devices Directive (MDD) 93/42 EEC).
- Conformidad con la Marcación CE Regulaciones Directiva de Dispositivos Medicos(MDD) 93/42 EEC)
- Compatível com as Normas de Identificação da CE Directiva de Dispositivos Médicos (MDD) 93/42 EEC)
- Conforme alle disposizioni CE Direttiva riguardante i dispositivi medici 93/42 CEE
- Wyrób zgodny z wymaganiami zasadniczymi przepisów dot. oznakowania CEDyrektywa Wyrobów Medycznych (MDD) 93/42 EEC



Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX® 
Positioning for life

Minimum Safe Configuration





Configuración de seguridad mínima

Configurazione base sicura

Configuração de segurança básica

Bezpieczne konfigurasjon

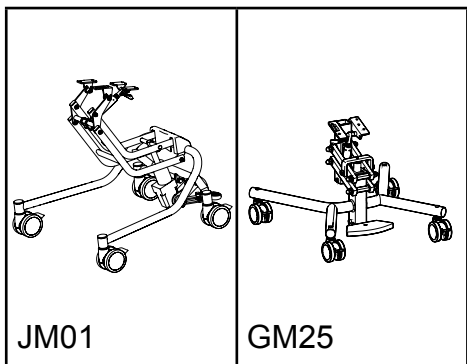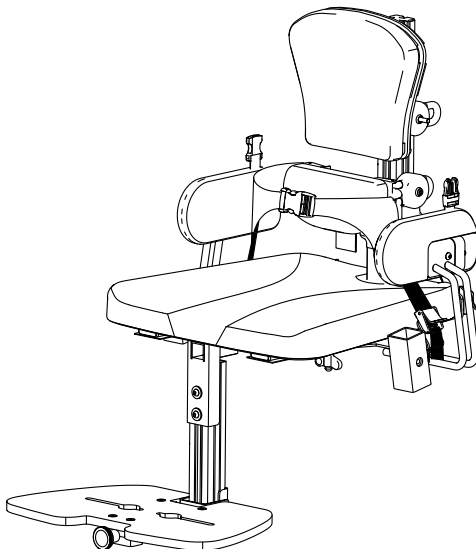

Specification








Especificaciones

Dati tecnici

Especificações


Technické údaje

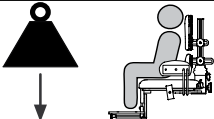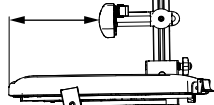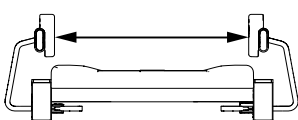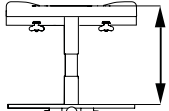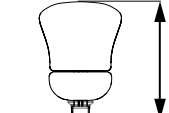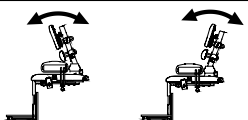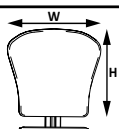

	JUC21	JUC22	JUC23
	Max : 50 kg	Max : 50 kg	Max : 50 kg
	Min : 210 mm Max : 305 mm	Min : 240 mm Max : 320 mm	Min : 275 mm Max : 390 mm
	(Min : 150mm with COV005) Min : 200 mm Max : 375 mm	(Min : 150mm with COV005) Min : 200 mm Max : 375 mm	(Min : 150mm with COV005) Min : 200 mm Max : 375 mm
	Min : 195 mm Max : 270 mm	Min : 250 mm Max : 365 mm	Min : 250 mm Max : 405 mm
	Min : 360 mm Max : 500 mm	Min : 360 mm Max : 500 mm	Min : 400 mm Max : 540 mm
	15° 15°	15° 15°	15° 15°
	5° 35°	5° 35°	5° 35°
	W : 238mm H : 204mm	W : 238mm H : 204mm	W : 276mm H : 280mm

Castors




Ruedas
Rodízios
Ruote
Rolki

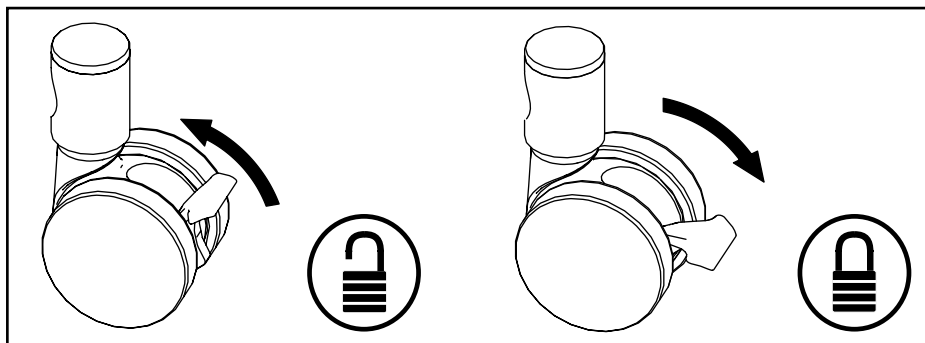

Safety straps



correas de seguridad
cintas de segurança
cinghie di sicurezza
pasy bezpieczeństwa




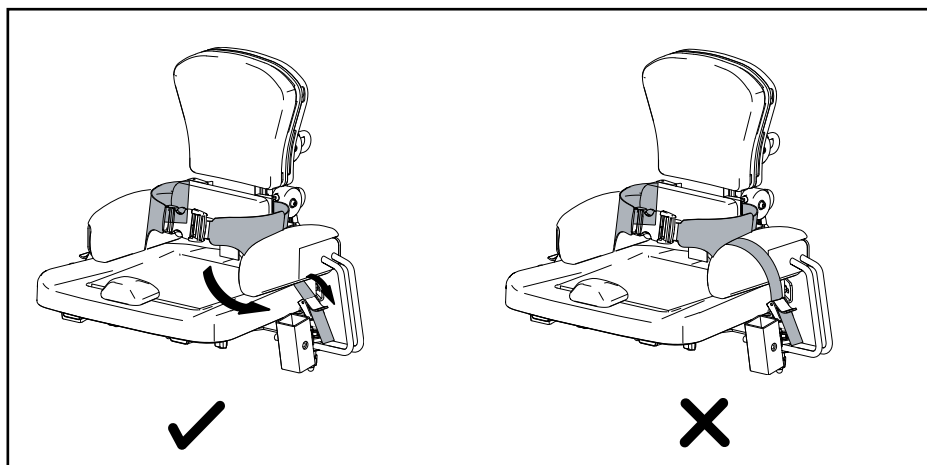
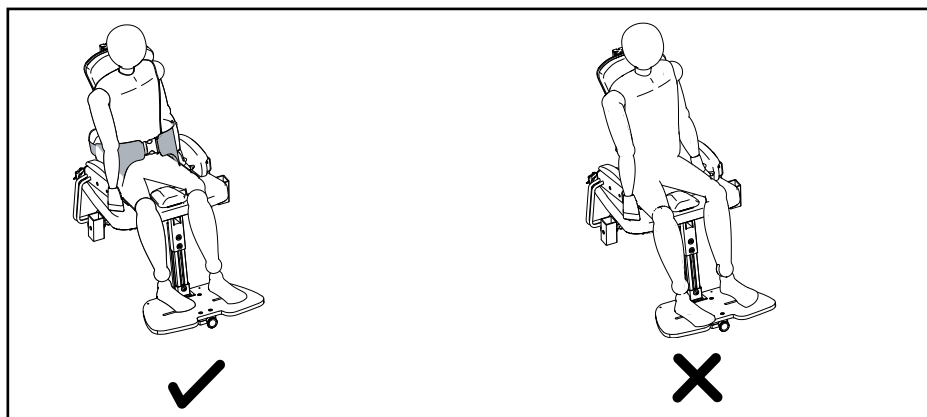
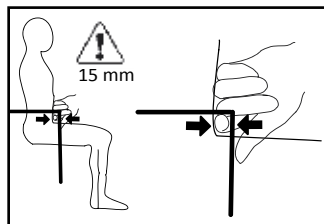


Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX® 
Positioning for life







Safety straps

correas de seguridad
cintas de segurança
cinghie di sicurezza
pasy bezpieczeństwa

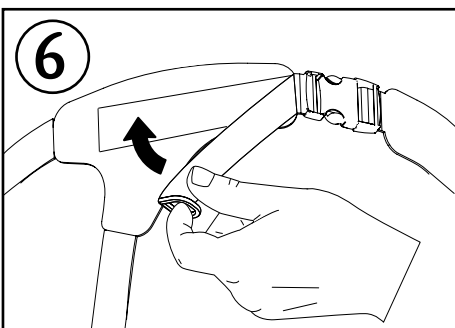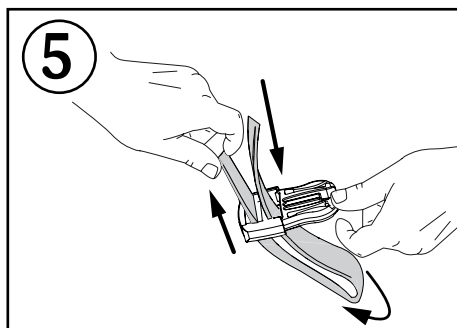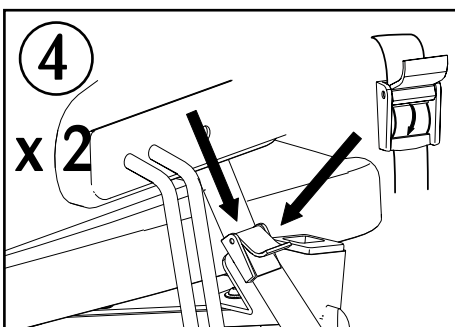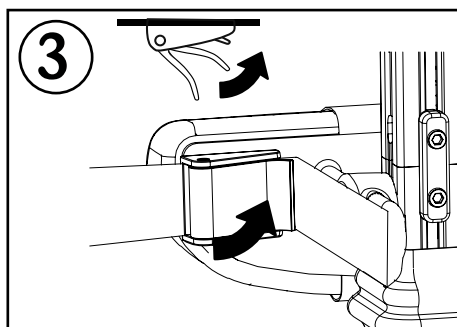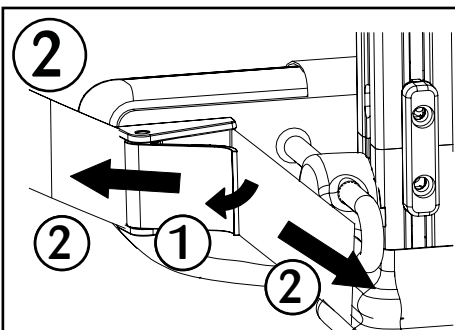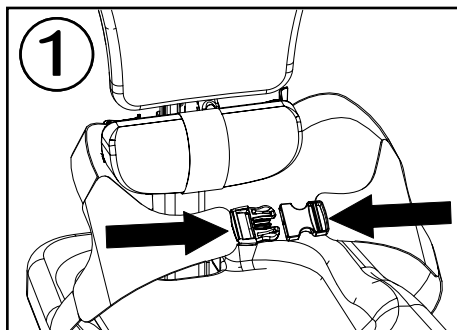

Safety straps




correas de seguridad
cintas de segurança
cinghie di sicurezza
pasy bezpieczeństwa

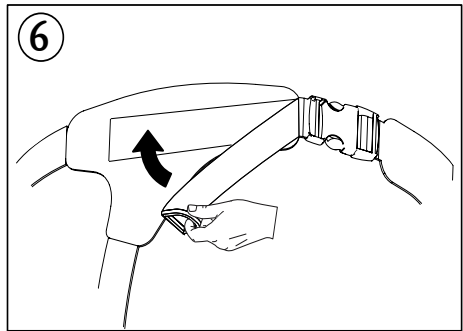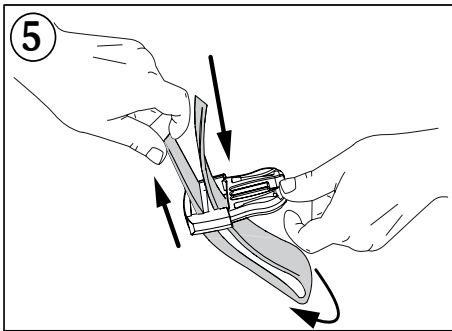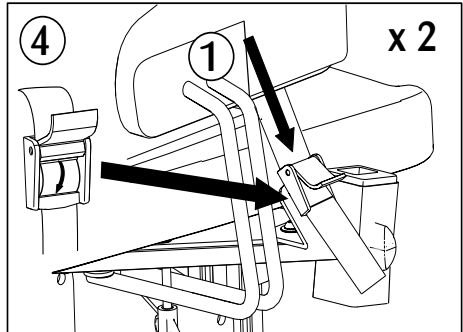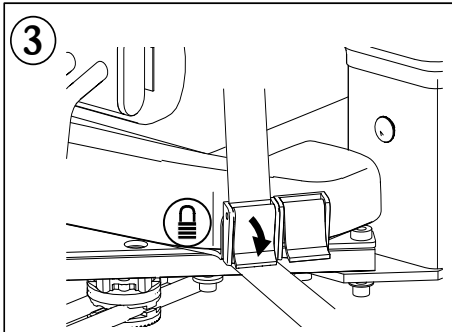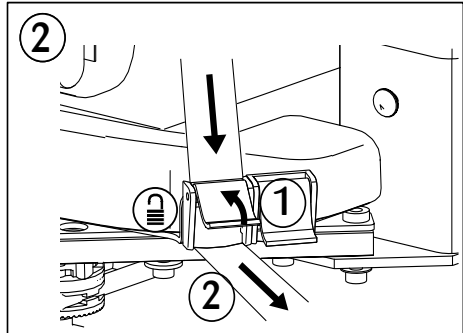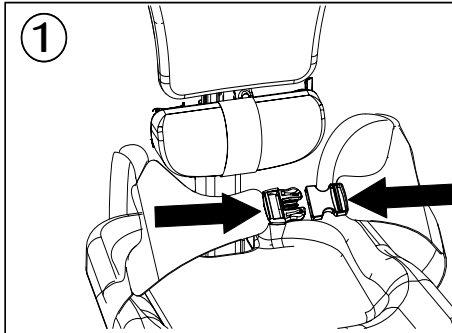

Lumbar pad



almohadilla lumbar
almofada lombar
cuscinetto lombare
pad lędźwiowego

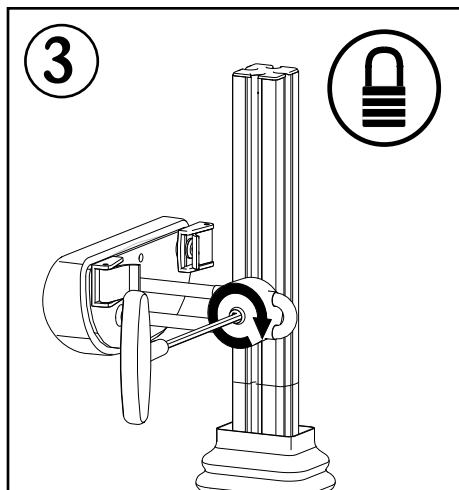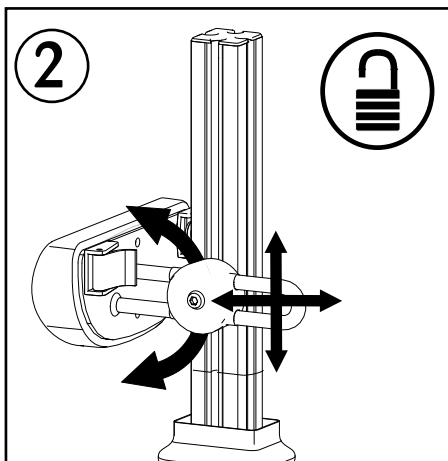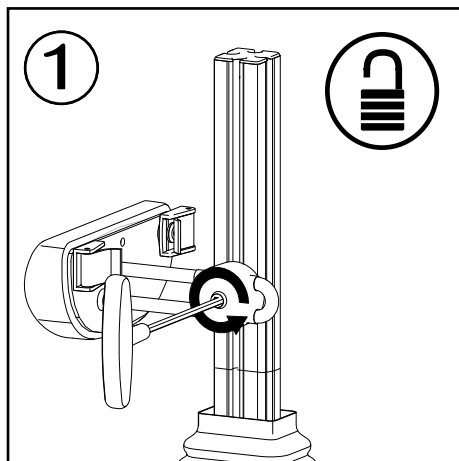




Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX[®] 
Positioning for life

Back Pad







ajuste de vuelta
ajuste de volta
regolazione indietro
powrót regulacji

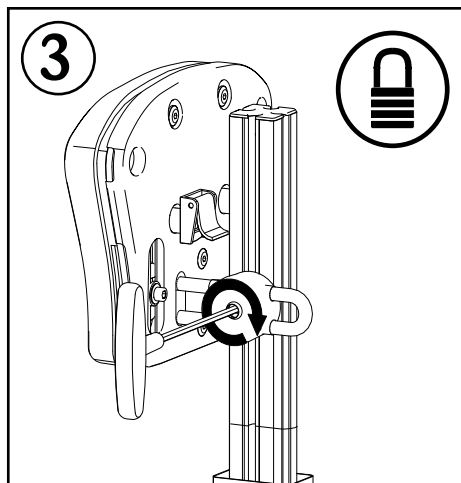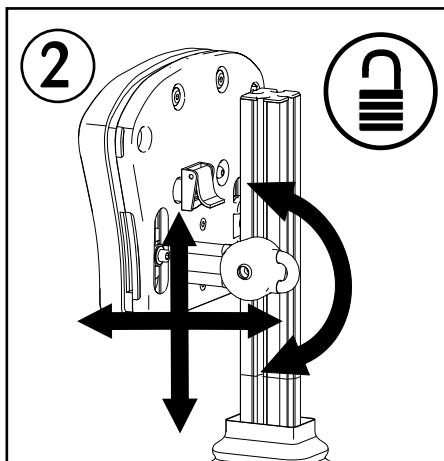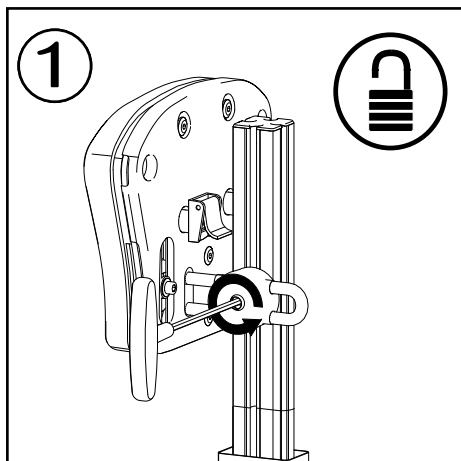

Footplate





reposapiés
pedana
Apoio pés
plyta stóp

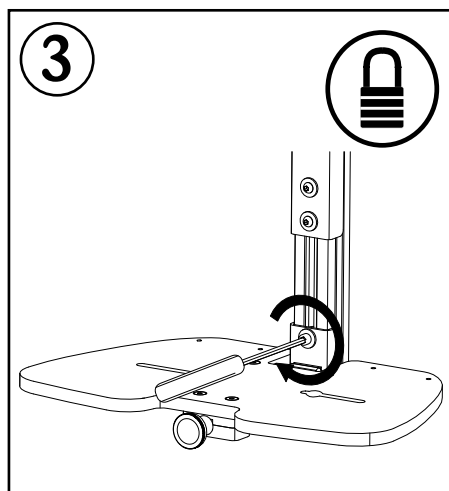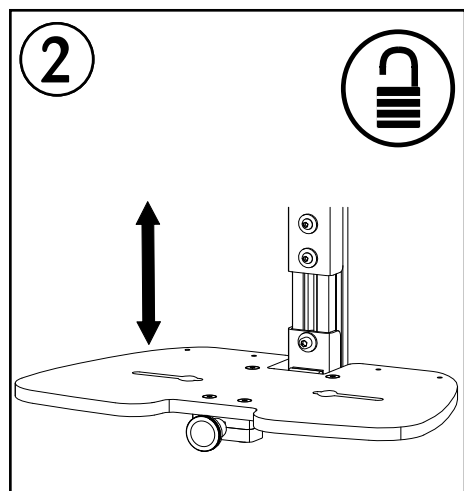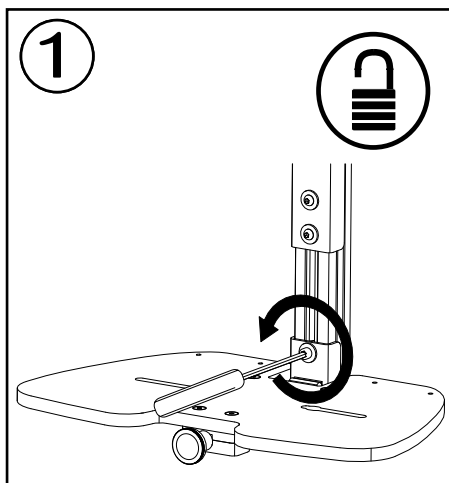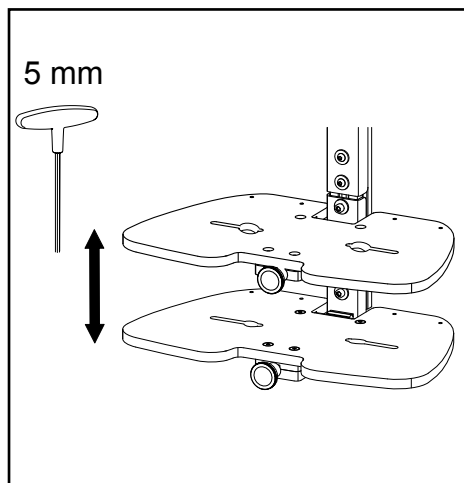

Footplate



reposapiés
pedana
Apoio pés
plyta stóp

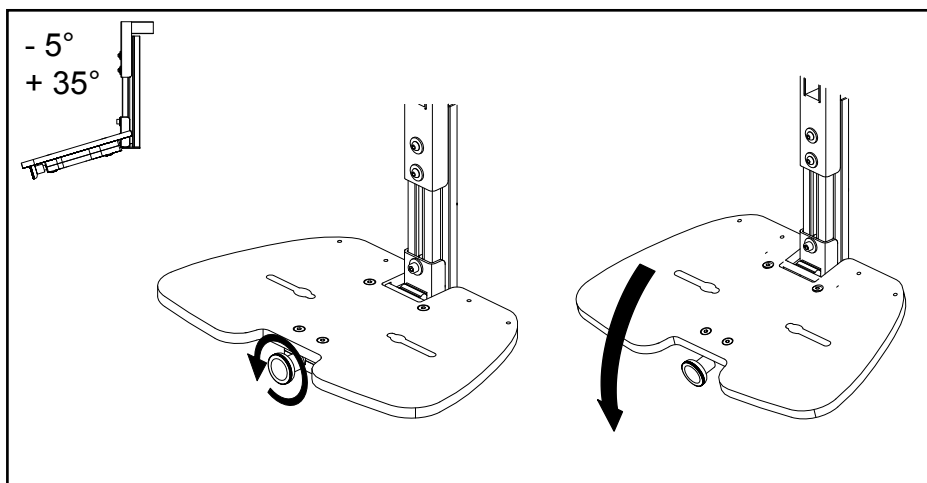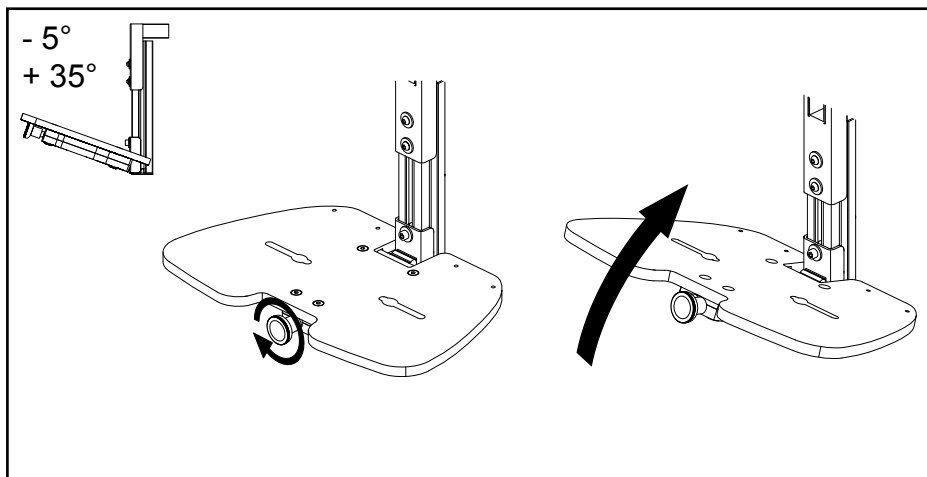

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX® 
Positioning for life




Hip Supports

Guías de cadera

Guías de Anca

Guide per il bacino

Regulacja podpór biodrowych

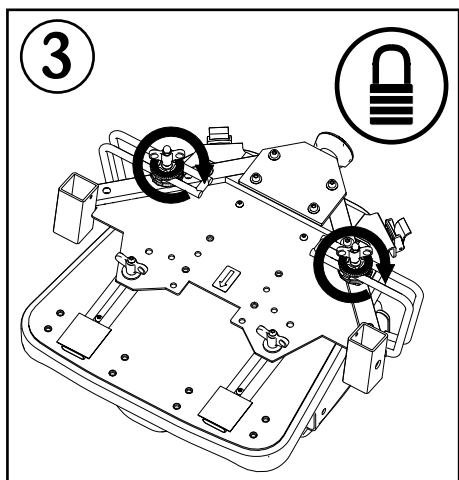
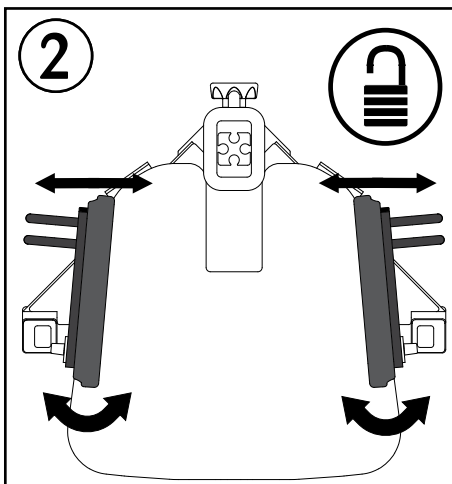
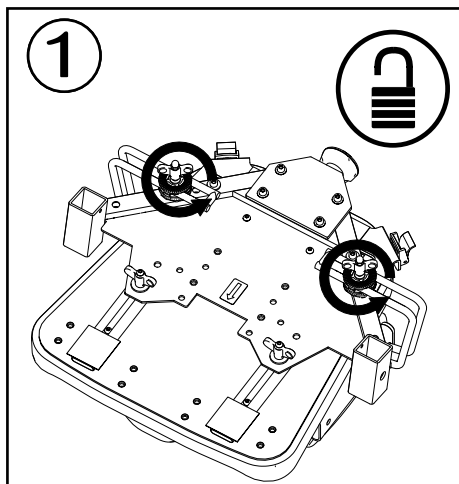


Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX[®] 
Positioning for life

Seat Depth

Profundidad del Asiento
Profundidade do Assento
Profondità della seduta
głębokość siedziska

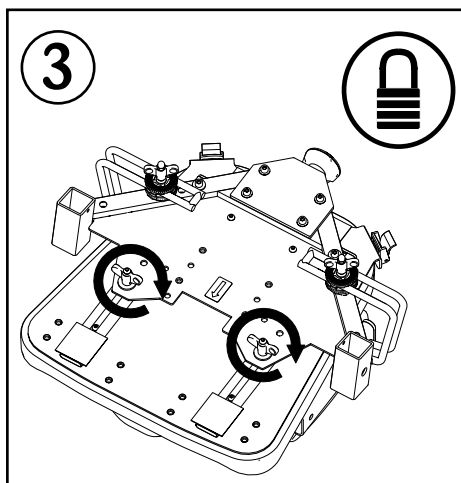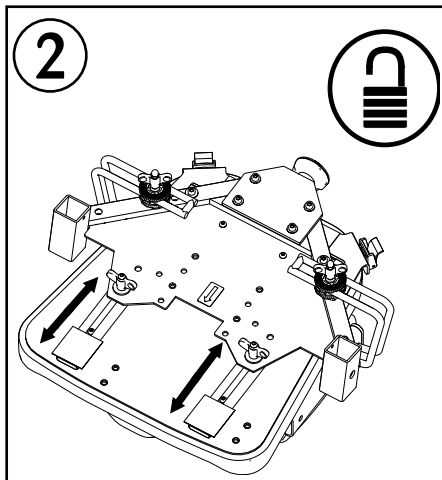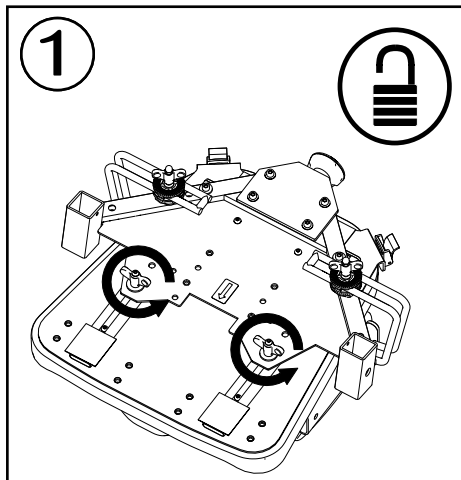





Back Angle

ángulo del respaldo

ângulo de volta

inclinazione dello schienale


powrót ką

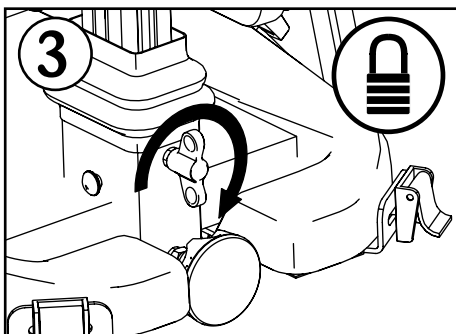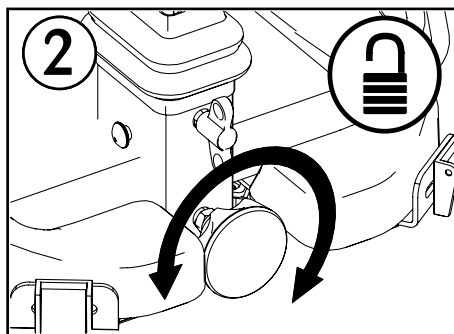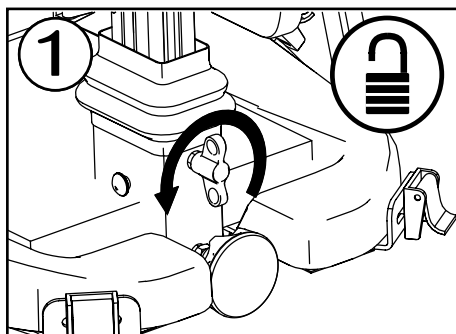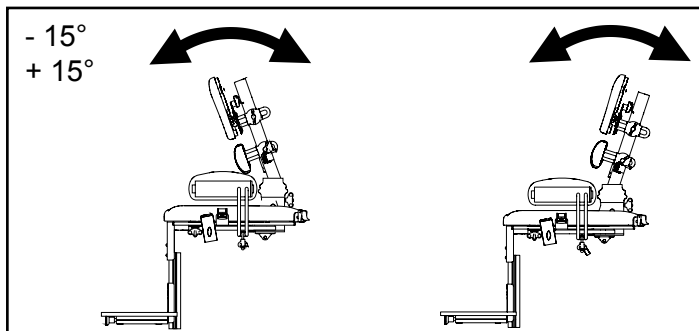

Seat Pad



Cojín del Asiento
Almofada de Espuma de Memória
Imbottitura a lenta memoria
siedzisko

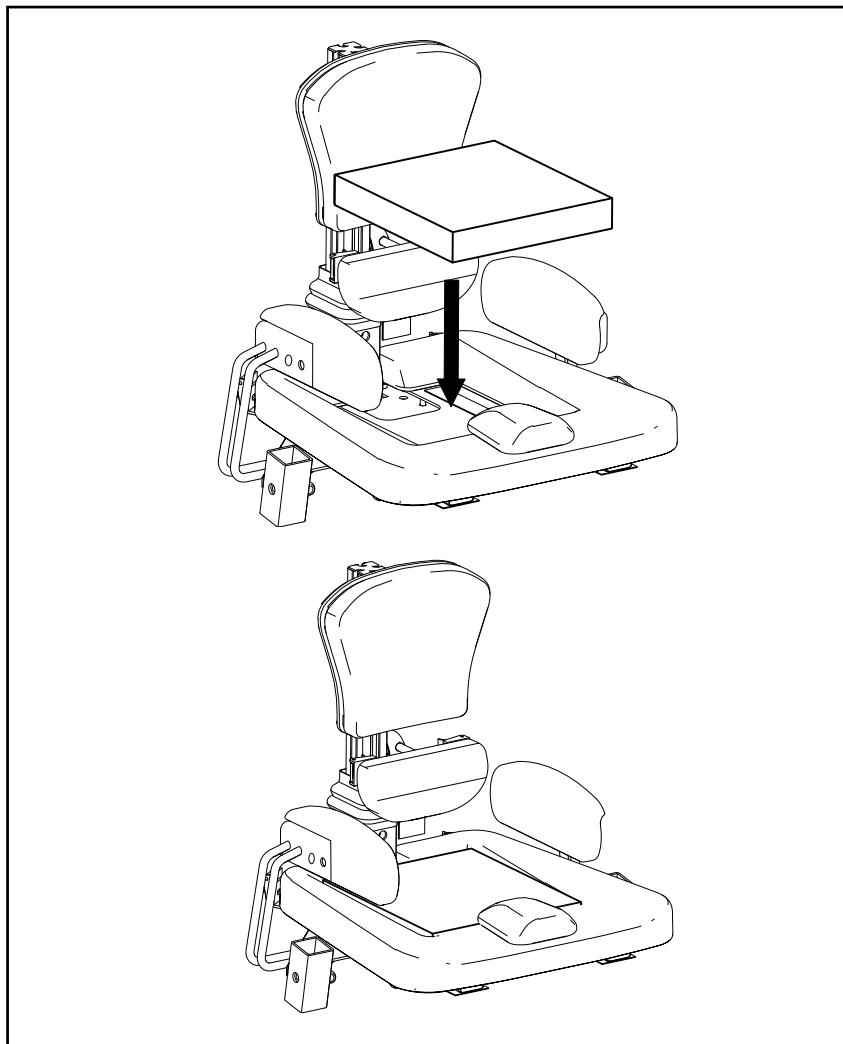







Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX® 
Positioning for life

Seat Cover



cubierta de asiento
tampa de assento
coprisedile
pokrycie siedzenia

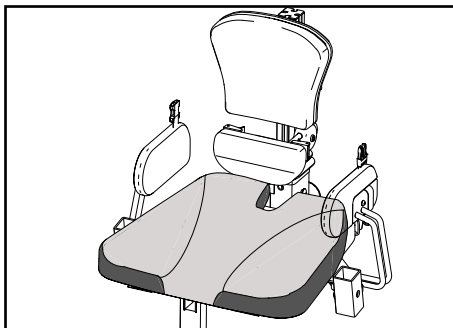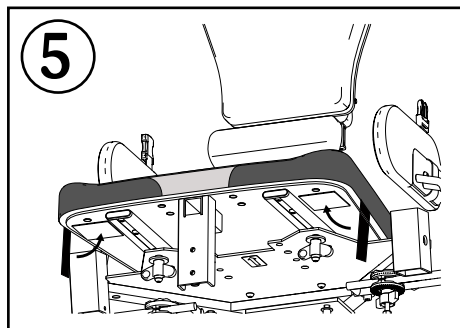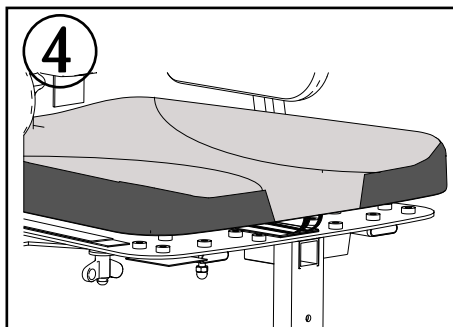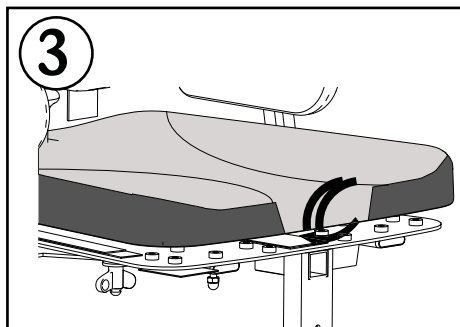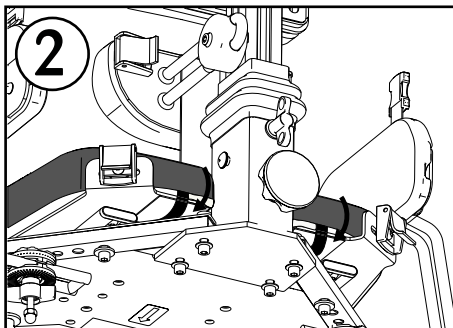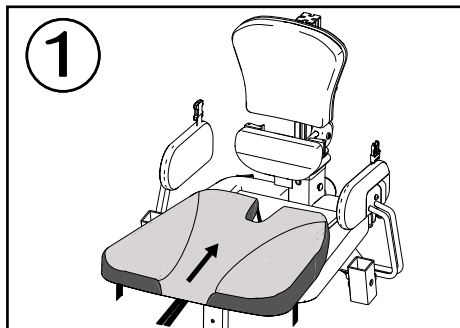

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

JENX® 
Positioning for life

Notes

notas
notatki

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 285 3376
Email: export@jenx.com
www.jenx.com

