

JOY™

MESA



MANUAL USUARIO

Our passion - your independence!

AKCES[®]MED



¡ATENCIÓN! El fabricante asume la responsabilidad por el uso correcto del dispositivo sólo cuando el producto se adquirió en una tienda médica especializada.

¡ATENCIÓN! AKCES-MED Ltd. se reserva el derecho de introducir cambios técnicos y comerciales en el contenido de la instrucción sin previo aviso.

Akces-MED. Sp. Zoo. Compañía introducida al sistema de gestión de calidad ISO 13485 relativa a la producción, venta y servicio. El sistema está certificado por Det Norske Veritas.



CONTENIDO

1. Propósito del manual.....	5
2. Montaje	6
3. Medidas de la tabla	7
4. Montaje del tablero.....	8
5. Cómo ajustar la mesa	11
6. Normas de seguridad	13

INTRODUCCIÓN

La mesa **Joy™** es el perfecto accesorio para nuestras sillas Jordi y Kidoo. Pero también se puede usar con otras sillas, ya sean de escuela o de oficina, ya es regulable en altura.

El amplio tablero ofrece muchas posibilidades, ya que en él se puede jugar, aprender, comer, etc.

Su firme construcción hace que sea muy robusta. Es lisa y fácil de mantener y limpiar.

Antes de usar el producto, el usuario debe leer detenidamente el Manual de usuario. Recuerde que cumplir con las pautas es muy importante, ya que garantiza su seguridad y extiende la durabilidad del dispositivo.

Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en contactarnos:
Consultor médico: móvil +48 508 382 509
Akces-MED Sp. z o.o. : ph. +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com Gracias por comprar nuestro producto.



¡ATENCIÓN! Antes de utilizar el producto, el usuario debe familiarizarse con el manual de usuario. Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy importante. Se garantiza la seguridad y se extiende durabilidad, así como la estética del dispositivo.

1 PROPÓSITO DEL MANUAL

Este manual contiene información básica necesaria para el uso apropiado de la mesa **JOY™**, preparándola para el trabajo y también cómo mantenerla y limpiarla adecuadamente. El manual de usuario debe mantenerse en su lugar fácilmente accesible. Está diseñado para las personas que se ocupan de las personas con discapacidad, y por tanto los médicos, así como los fisioterapeutas que operan el dispositivo.



¡ATENCIÓN! Antes de utilizar el producto, el usuario debe familiarizarse con el manual de usuario.

Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy importante. Se garantiza la seguridad y se extiende durabilidad, así como la estética del dispositivo.

2 MONTAJE DE LA MESA

2.1 Equipamiento estándar:


1. Tablero ancho
2. Estructura regulable en altura



Versiones:



3 MEDIDAS DE LA MESA

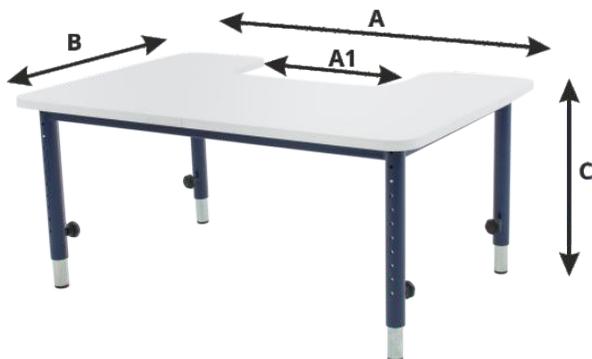

Símbolo	Unidad	Dimensión
A	[cm]	90
A1	[cm]	40
B	[cm]	60
C	[cm]	40-70
Peso	[kg]	11,2
Peso máximo usuario	[kg]	50

Nota: El rango de tolerancia de medición es +/- 1 cm / 1/2 in

4 MONTAJE DEL TABLERO

4.1. Componentes:

1. Ajustando ángulo inclinación tablero(x2)

2. La placa de la bisagra (x2)

3. Tornillo de madera 4x16(x12)

4. Tornillo cónico M6x30(x4)

5. Arandela 6.4(x4)

6. Tuerca M6(x6)


7. Tornillo cabezal hexágono - M6x40(x2)

8. Arandela - PA6.4(x4)

9. Tapa de tuerca M6(x2)

10. Estructura
(x1)



11. Tablero
(x1)

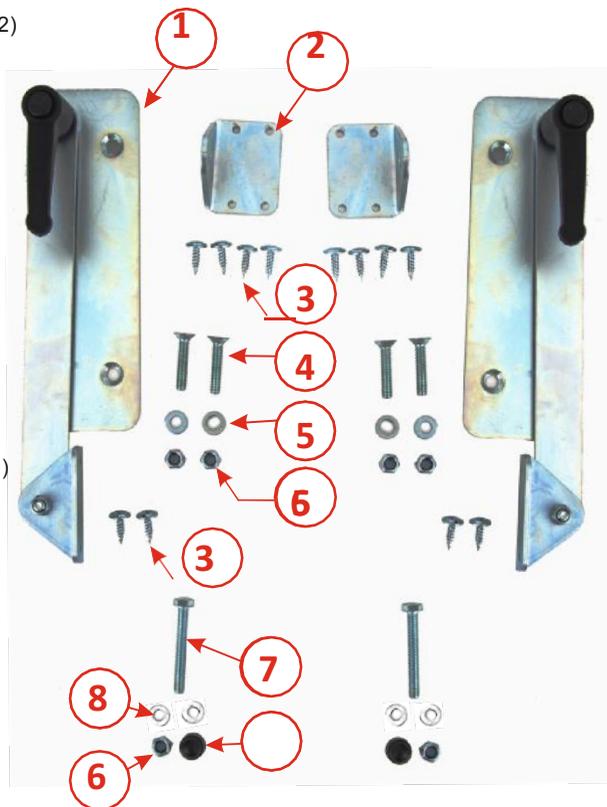

PASO 1

El montaje de la mesa comienza con:

- Fijación de la placa de bisagra (el.2) al tablero (figura 1) con tornillos (el.3) (figura 2). Repita este paso en el otro lado.

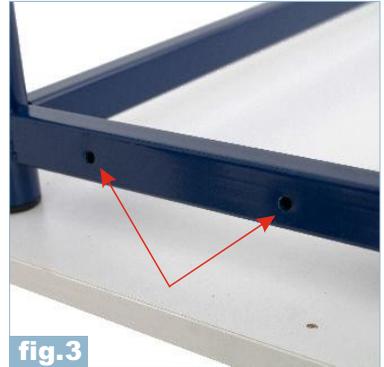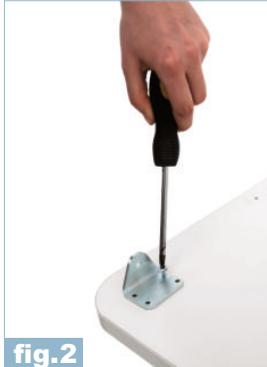

-A continuación ajuste el ángulo de inclinación (fig. 1) a la estructura (fig.3) con tornillos (el. 4) (fig. 4). Repita este paso al otro lado.



PASO 2

-A continuación ajuste el ángulo de inclinación (fig. 1) a la estructura (fig.3) con tornillos (el. 4) (fig. 4). Repita este paso al otro lado.



-A continuación, ajuste el ángulo de inclinación de la placa con los tornillos (fig. 3) (figura 9,10).



5 CÓMO AJUSTAR LA MESA

5.1. Altura de la mesa

- Para regular la altura, recomendamos girar la mesa.



- Afloje los tornillos.

- A continuación, presione el botón y regule la pata de la mesa a la altura requerida.



- Apriete los tornillos.



¡ATENCIÓN! ¡Antes de usarlo, es necesario asegurarse de que todos los mandos para ajustes estén estables y bloqueados!

5.2. Ajustando la inclinación del tablero

El ángulo de inclinación del tablero se puede cambiar con los picaportes ubicados en ambos lados de la mesa. Para cambiar el ángulo de inclinación:

- Tuerza los picaportes,
- Ajuste el ángulo correcto del tablero
- Apriete los picaportes.



La mesa JOY™ se puede utilizar tanto con sillas de posicionamiento como escolares.



6 NORMAS DE SEGURIDAD

1. ¡El producto debe ser utilizado de acuerdo con las pautas incluidas en este Manual de usuario! ¡Antes de cada uso, es necesario preparar al paciente y y al dispositivo!
2. Antes de usar el producto, es esencial asegurarse de que no haya daños que puedan poner en peligro la vida del paciente. Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente y estén montadas adecuadamente. Además, asegúrese de que no haya grietas ni deformaciones.
3. Está prohibido usar la mesa para fines diferentes a los previstos.
4. La parte superior de la mesa debe limpiarse con un paño suave y un producto de limpieza no agresivo.
5. Preste atención al inclinar el tablero. No coloque los dedos entre el tablero y la estructura al hacerlo.

¡ATENCIÓN! El producto contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por niños.



¡ATENCIÓN! Está prohibido realizar cambios en la estructura de la mesa, debido a que es peligroso y comporta la pérdida de la garantía.

¡ATENCIÓN! La mesa debe ser utilizada solo en interiores.



PRODUCENT PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B

36-002 Jasionka

tel. (17) 864 04 70

www.akces-med.com

e-mail: produkcja@akces-med.com

Autoryzowany Przedstawiciel



Data wydania: 25.08.2016

Data ostatniej aktualizacji: 24.04.2017

our passion - your independence!